

# Esteem synergy™

ConvaTecs stomiposer har flere unikke egenskaber og holder den højeste kvalitet i spørgsmål om *sikkerhed, funktionalitet og komfort*. Præcis som vores hudplader.

Højeffektivt kulfilter

Passer til Esteem synergy® hudplader

Blødt, stilfærdigt og sikkert materiale

Supertyndt design med lav profil.

Findes også i lille størrelse.

## Produktfakta

### ACT-bandage

- Esteem synergy® Plus er en såkaldt ACT- bandage (Adhesive Coupling Technology™). Det betyder, at posen klæbes fast på hudpladen i stedet for at blive fastgjort med en traditionel koblingsring. Teknikken er lige så sikker som ringkoblingen, men kræver ikke lige så stort et tryk ved påsætning/aftagning af posen.
- Posen skal anvendes sammen med Esteem synergy® hudplader. Læs mere om vores hudbeskyttelse på produktbladet til hudplader.
- Posen skiftes efter behov.

### Posens materiale

- Blødt og smidigt plastlaminat i fem lag. Luft- og lugttæt. Plasteren er blødgjort med sojabønneolie.

- Komfortmaterialet (non-woven) rundt om posen giver en blød og kølig overflade ind mod huden. Det er både vandafvisende og hurtigtørrende.

### Design

- Komfortabelt todelsdesign med lav profil. Det gør bandagen blød, smidig, diskret og komfortabel.

### Filter

- Højeffektivt kulfilter, som hurtigt udlufter gas og fjerner lugt. Indersiden har et ekstra lag plastfilm, som forhindrer tilstopning/lækage i filteret. Ved bad/brus beskyttes filteret på ydersiden af det medfølgende klistermærke.

### Opbevaring

- Stomibandager skal opbevares tørt og ved stuetemperatur. Undgå kulde og høj luftfugtighed.

### Holdbarhed

- Fem år fra fremstillingsdato.

### Klassificering

- Produktet er CE-mærket og opfylder relevante miljø- og sikkerhedskrav.


### Affaldshåndtering

- Følg de lokale anvisninger. Ved brug i hjemmet pakkes alt stomimateriale omhyggeligt ind og bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Indholdet i posen kan efter behov først tømmes ud i toiletet.


# Brugsanvisning

1. Hudplade med gennemsigtig "Landing Zone" til posen.
2. Stomiposens klæbende ring, som skal fastgøres på hudpladen.
3. Vend den nederste del af posens klæbende ring, så den vender ind mod den nederste del af "Landing Zone", og tryk den fast. Forsæt med påsætning med en rullende bevægelse nedefra og op. Før fingeren rundt om posens klæbende ring, så du sikrer dig, at den er glat og uden folder. Hvis der opstår problemer, kan posen tages af og klæbes fast igen. Den tomme pose kan justeres efter påsætning.

## Påsæt posen

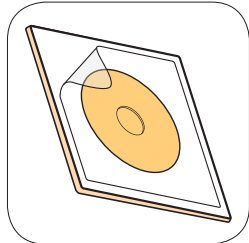

1

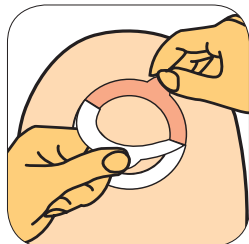


2




3

## Aftag posen

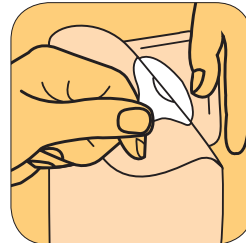

1

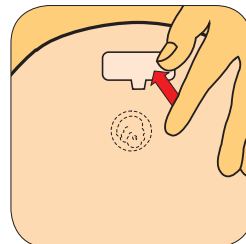


2

1. Aftag stomiposen fra pladen på følgende måde: Hold i filgen på posens klæbende ring med den ene hånd, hold i kanten af "Landing Zone" med den anden. Træk posen skråt nedad med en varsom, rullende bevægelse.
2. Ved bad og brus dækkes filteret med den medfølgende filterbeskytter.

▲ For detaljerede oplysninger, se brugsanvisningen i emballagen.


## Varenummer

**Esteem Synergy™**   
Type: Lukket pose  
Størrelse: Standard  
Antal: 30 stk./pk.

Ringstørrelse m.m.    ConvaTec-kode

**Beige**  
35                      416775  
48                      416779  
61                      416783

**Klar**  
35                      416774  
48                      416778  
61                      416782

**Esteem Synergy™**   
Type: Lukket pose  
Størrelse: Liten  
Antal: 30 stk./pk.

**Beige**  
35                      416777  
48                      416781

© 2013 ConvaTec Inc. Symbolerne ®/™ angiver registrerede varemærker tilhørende ConvaTec Inc.