



ESTEEM™ Flex Konveks

Med forudstanset og opklipbare hudplader



Lukket pose

Tømbar pose

Urostomi pose

1 Sådan får du den rigtige pasform




Opklipbare hudplader:



Hullet i hudpladen skal passe til stomien så tæt på som muligt. Klip stomihullet så den passer til størrelsen på din stomi. Pas på ikke at gøre åbningen større end den ydre ring markeret på hudpladen.

Forudstansede hudplader:

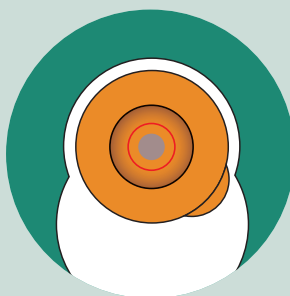


Vælg en hudplade med en udstanset åbning, der er en anelse større end din stomi.

2 Sådan lukker du den tømbara stomipose



Fold enden op mod dig selv, indtil velcrostrimlerne er ud for hinanden. Tryk lukningen sammen og klem godt, så den holder.

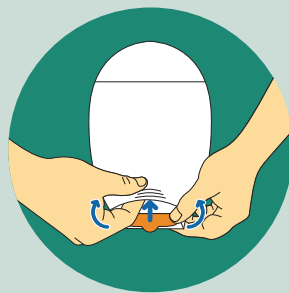

Vend Lock-it-Pocket™ med vrangen ud for at gemme udløbet indvendigt.

3


Sådan sætter du posen på




Pust en anelse luft ind i posen for at adskille posens indre lag.




Opvarm hudpladen med dine hænder et par sekunder, for at hjælpe klæberen med at fæstne ekstra godt.

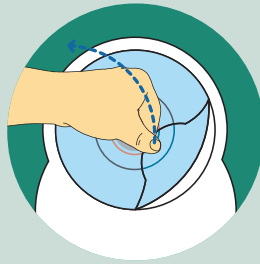

Fjern den klare plastfilm.

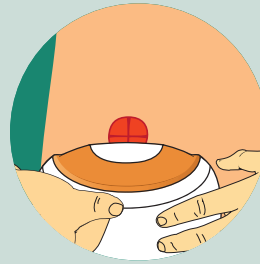

Hold hudpladen under din stomi, start påsætningen nede fra og påsæt langsomt hudpladen nedefra og op omkring stomien.

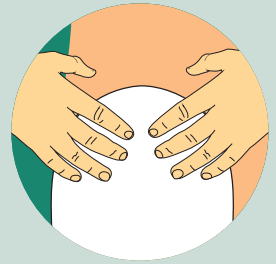

Udglat hudpladen og posen med dine fingre og pres let for at få den til at fæstne mod huden.

4


Sådan tømmer og rengører du den tømbar pose



Du tømmer posen ved at vende udløbet op mod kroppen. Åbn lukningen op, og fold udløbet ud.



Luk stomiposens lukning op, og åbn for udløbet, idet du klemmer i begge ender af udløbets kanter med fingrene. Tøm posen.

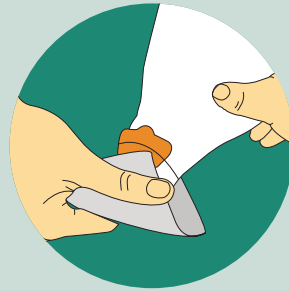


Tip til rengøring af posen: Støt posen med den ene hånd, og tør posens udløb af med toiletpapir med en fast nedadgående bevægelse med den anden hånd.



Rens den indvendige side af udløbet med toiletpapir eller en vådserviet.

5

Sådan tager du stomiposen af

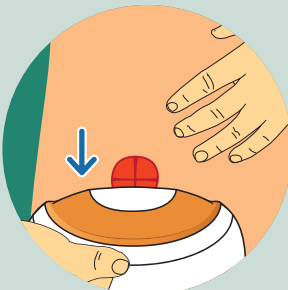

Du fjerner posen ved forsigtigt at trække posen af, mens du holder på den omkring liggende hud.

Få flere oplysninger ved at ringe til os på - 48 16 74 75
Der henvises til indlægssedlen for den fuldstændige brugsanvisning.

TM © er varemærker tilhørende ConvaTec Inc. Natura er et registreret varemærke i USA.