



## Datablad

# Coban™ 2-lags kompressionsbehandling

### Produktbeskrivelse:

3M Coban™ 2-lags kompressionsbehandling består af 2 lag. Et komfortlag med et adhesive materiale og et tyndt selvklæbende kompressionsbind. Bandagen sidder sikkert uden ekstra brug af fiksering, fordi de 2 lag hæfter til hinanden.

### Egenskaber:

- Effektiv og gradueret kompression
- Sikker og stabil subbandagestryk
- Hurtig ødemreducering og derfor hurtigere sårheling
- Løsner sig ikke, minimal nedglidning
- Komfortabelt for patienten
- Mulighed for at anvende eget fodtøj
- Hurtig og nem at anlægge for personalet
- Kan sidde på benet i op til 7 dage

### Indikationer:

- Ordineret kompressionsbehandling
- Venøse bensår og lignende tilstande
- Ankel/armindex > 0,8

### Brugsvejledning:

Kompressionsbehandling er altid en lægeordineret behandling.

Komfortlaget lægges med skumlaget mod huden med cirkulær teknik og kun minimal overlapning. Hælen skal ikke lukkes. Foden holdes i en vinkel på 90° under anlæggelsen.

Kompressionsbindet anlægges med fuldt stræk og med cirkulær teknik 50% overlapning.

Hælen lukkes 2-3 gange, de 2 lag moduleres sammen med hænderne, hvorefter bindene hæfter på hinanden og ekstra fiksering er derfor ikke nødvendig.

OBS! Coban 2-lags kompressionsbind skal anvendes med behandlingsstedet retningslinier for sårbehandling.



**Deklaration:**

- Skumlaget består af: polyurethan skum beklædt med et selvhæftende lag, latex-fri
- Kompressionsbindet består af: polyester fibre, spandex elastikgarn, latex-fri
- Coban 2-lagskompressionsbehandling er til engangsbrug

**Bestillingsinformation****3M™ Coban™ 2-lags kompressionsbehandling**

| Varenr.: | Størrelse<br>cm x m                                                             | Antal/æske | Æsker/karton |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| 2094     | Skumlag: 10 cm x 2 meter<br>Kompressionsbindet:<br>10 cm x 4.5 meter fuld stræk | 1 sæt      | 8            |