

En dansk brugers erfaring med brugen af Osto-EZ-Vent® Luftventil

Ventil til afhjælpning af stort tryk i stomipose p. gr. a. meget tarmluft også kaldet "balooning"

Ældre mand med colostomi som fungerer normalt – i perioder dog med noget balooning.

Efter instruktion i hvorledes denne lille ventil/prop skal påsættes, placering på stomiposen m. m. har jeg brugt dette lille hjælpemiddel i en uges tid med normalt skift morgen og aften – aftenposen er ensbetydende med at sove med ventil/proppen på, ret spændende første nat – ville proppen sætte sig fast i noget og dermed åbne for output fra posen, men nej, ingen problemer, den sad som den var placeret og var total tæt, så det begynder godt.

Efter ny pose om morgenen ville jeg, i løbet af dagen, prøve at åbne for den lille prop men det viste sig at være lidt svært, da den sidder virkelig godt fast – skal jo også være tæt, så "stomisten" ikke får problemer; efter en del trækken i dimsen lykkedes det at åbne den, der kunne så udledes lidt luft og proppen skulle lukkes igen, hvilket også var lidt vanskelig, men må skyldes at jeg ikke er vant til brugen af ventilen – med øvelse vil dette ikke være noget problem, blot ventilen er placeret efter vejledningen.

De næste dage gik med rutinemæssig skift af posen, samtidig med at en ny pose blev gjort klar med påsætning af ventil, som står i vejledning.

For at prøve at fremprovokere lidt mere luft fra stomien, spiste jeg en del grøntsager og krydret mad, hvilket nok kan sætte gang i tingen, men m. h. t. ventilen så var den tæt og jeg havde ingen problemer, lindede lidt på proppen og trykket fra posen gjorde at den overskydende luft fandt sin vej ud gennem ventilen, de eneste gener var "det lugter ikke særligt godt" men det er til at overkomme når posen får sin mere normale facon.

Der er lidt nyt i og med at man skal montere ventilen det rette sted, øverst i/på posen men allerede efter anden dag var det helt naturligt, klæbepuden sidder virkelig godt fast på inderposen og den lille prop som sidder i "udluftningsrør" sidder fast og kræver det rigtige tag både for at åbne og lukke den.

Jeg har brugt og bruger en en-del konveks pose med en ventil, som ikke fungerer helt optimalt når der kommer meget luft og jeg må derfor bearbejde/massere ventilen for at få gennemgang, dette er, med den ny ventil, overhovedet ikke nødvendigt.

Max Christiansen, Holbæk

Osto-EZ-Vent® – Nyhed i Danmark

Trænger din stomipose til hurtig udluftning?
Så er Osto-EZ-Vent® værd at prøve!



smed-graphic.dk

Spørgsmål til Osto-EZ-Vent® Kontakt venligst importør af OEV™ i Danmark:

Focuscare Denmark ApS
Hospitals- og sygeplejeartikler
Østervangsvej 21
DK-8900 Randers

T: 49 26 13 99

F: 49 21 02 57

info@focuscare.dk

www.focuscare.dk



Focuscare



Enterprises, Inc.

© 2011 KEM Enterprises, Inc. USA
USPATNO. 6,015,399
All Rights Reserved.



Produkt Information

Osto-EZ-Vent[®], luftventil, er et førende produkt til alle typer stomiposer, 1-dels, 2-dels, tømbar eller lukkede poser. Nem, hurtig adgang til stomiposen gør OEV[™] ventilen til et bedre alternativ til ballondannelse end at skulle åbne udløbet på en tømbar pose eller nå toiletet med en oppustet lukket pose uden den linder fra. Mindre bøvl, færre pinlige situationer – giver brugeren øget tryk.

Dette stomiprodukt blev udviklet uden filter for at give hurtigere udluftning

Osto-EZ-Vent[®] blev specielt udviklet uden filterfunktion for at give mulighed for en hurtig udluftning, så posen bliver flad øjeblikkelig. Dette forebygger at posen springer eller løsner sig fra huden. Netop fordi Osto-EZ-Vent[®] ikke har et filter virker den effektivt, holder lige så længe som posen, den bliver ikke ineffektiv ved badning, passer til alle posetyper, og den er nem at montere og anvende.



Sådan bruges Osto-EZ-Vent[®] (OEV[™])

Produkt til udluftning af colo-, ileostomiposer. (LATEX FRI)

VIGTIGT: For at Osto-EZ-Vent[®] skal fungere korrekt, venligst læs og følg instruktionen.

BEMÆRK: Har din stomipose stofovertræk, skal du klippe lille hul i stoffet øverst på forsiden, da Osto-EZ-Vent[®] skal monteres på selve posens inderfolie.

Trin 1: Forbered pose og OEV[™]

- Placer OEV[™] ventilen øverst på stomiposens forside på selve inderfolien. Bedst at gøre dette et godt stykke tid før posen skal bruges, så ventilens klæber får god kontakt til folien, se fig. 1.

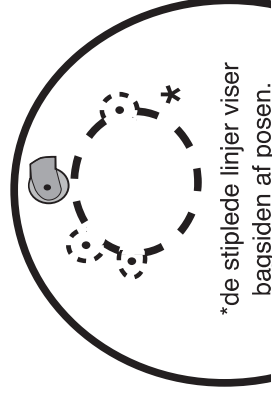


Fig. 1

*de stiplede linjer viser bagsiden af posen.

Trin 2: Montering af OEV[™] på posen

- Fjern dæklampen (med grønt print) fra ventilen og undlad at berøre den klæbende flade.
- Åbn ventilen – placer den vandret øverst oppe på stomiposens forside (IKKE oveni et indbygget filter) se fig. 2.
- Tryk den åbnede ventil godt fast hele vejen rundt for maksimal fastklæbning.

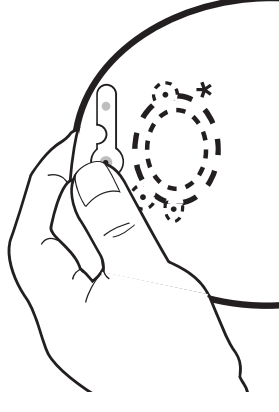


Fig. 2

Trin 3: Lav udluftningshul i posen

- Når OEV[™] er sikkert monteret på posen, krænges toppen af posen, hvor ventilen nu sidder, ned og udluftning gennem åbningen på 2-dels posen eller ned til hullet i klæberen på 1-dels posen.
- Nu stikkes den ene klinge af en spids saks eller lignende gennem hullet i ventilen, svarende til hele hullet i ventilen (vist som sort prik i fig. 3) – herefter kan tarmluften nemt og hurtigt lukkes ud af posen ved behov.
- Når hullet er lavet, LUKKES ventilens prop, posen krænges tilbage til normal position (se fig. 1) og er KLAR til brug.
- Da ventilen er uden filter, bør udluftning foregå på toilet eller i det fri!

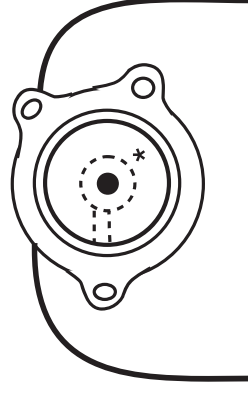


Fig. 3