


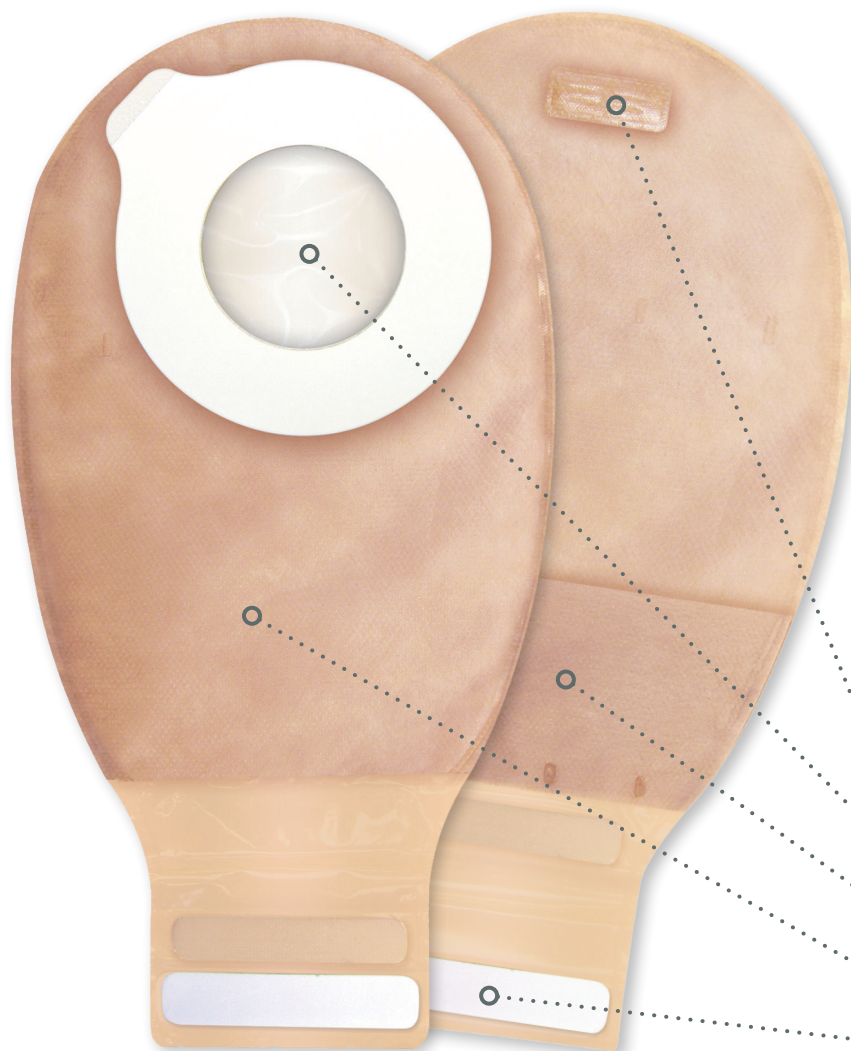

Esteem synergy™

ConvaTecs stomiposer har flere unikke egenskaber og holder den højeste kvalitet i spørgsmål om *sikkerhed, funktionalitet og komfort*. Præcis som vores hudplader.

- Højeffektivt kulfilter
- Passer til Esteem synergy™ hudplader
- Praktisk lomme, som gemmer poselukningen
- Blødt, stilfærdigt og sikkert materiale
- InvisiClose® poselukning giver en sikker lukning.

Produktfakta

ACT-bandage

- Esteem synergy® Plus er en såkaldt ACT-bandage (Adhesive Coupling Technology™). Det betyder, at posen klæbes fast på hudpladen i stedet for at blive fastgjort med en traditionel koblingsring. Teknikken er lige så sikker som ringkoblingen, men kræver ikke lige så stort et tryk ved påsætning/aftagning af posen.
- Posen skal anvendes sammen med Esteem synergy® hudplader. Læs mere om vores hudbeskyttelse på produktbladet til hudplader.
- Posen skiftes efter behov, men normalt en gang i døgnet.

Posens materiale

- Blød og smidig plastlaminat i fem lag. Luft- og lugttæt. Plasteren er blødgjort med sojabønneolie.

- Komfortmaterialet (non-woven) rundt om posen giver en blød og kølig overflade ind mod huden. Det er både vandafvisende og hurtigtørrende.

Design

- Komfortabelt todels design med lav profil. Gør bandagen blød, diskret og smidig.

Filter

- Højeffektivt kulfilter, som hurtigt udlufter gas og fjerner lugt. Indersiden har et ekstra lag plastfilm, som forhindrer tilstopning/lækage i filteret. Ved bad/brus beskyttes filteret på ydersiden af det medfølgende klistermærke.

Indbygget poselukning med lomme

- InvisiClose® poselukning giver en sikker lukning. Lukningen rulles sammen og kan stoppes ned i en lomme, hvilket

gør den tømbare pose lige så lille og praktisk som den lukkede.

Opbevaring

- Stomibandager skal opbevares tørt og ved stuetemperatur. Undgå kulde og høj luftfugtighed.

Holdbarhed

- Fem år fra fremstillelsesdato.

Klassificering


- Produktet er CE-mærket og opfylder relevante miljø- og sikkerhedskrav.

Affaldshåndtering


- Følg de lokale anvisninger. Ved brug i hjemmet pakkes alt stomimateriale omhyggeligt ind og bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Indholdet i posen kan efter behov først tømmes ud i toiletet.

Brugsanvisning

Påsæt posen

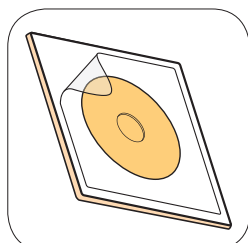

1

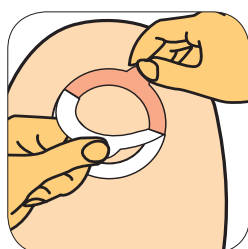

2



3

1. Hudplade med gennemsigtig "Landing Zone" til posen.


2. Stomiposens klæbende ring, som skal fastgøres på hudpladen.

3. Vend den nederste del af posens klæbende ring så den vender ind mod den nederste del af "Landing Zone", og tryk den fast. Fortsæt med påsætning med en rullende bevægelse nedefra og op. Før fingeren rundt om posens klæbende ring, så du sikrer dig, at den er glat og uden folder. Hvis der opstår problemer, kan posen tages af og klæbes fast igen. Den tomme pose kan justeres efter påsætning.

Aftag posen



1

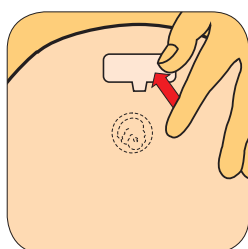


2


1. Aftag stomiposen fra pladen på følgende måde: Hold i fligen på posens klæbende ring med den ene hånd, hold i kanten af "Landing Zone" med den anden. Træk posen skråt nedad med en varsom, rullende bevægelse.

2. Ved bad og brus dækkes filteret med den medfølgende filterbeskytter.


Luk posen

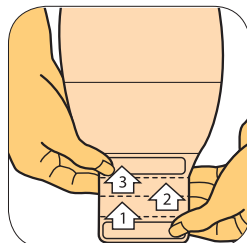

1

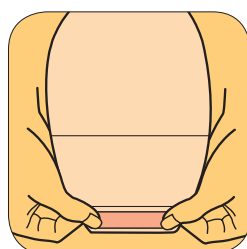

2

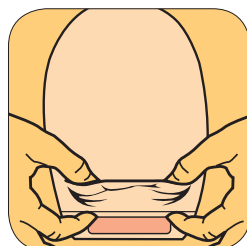


3

1. Luk for posens åbning ved at begynde at dreje ved den hvide strimmel længst nede, til poselukningen overlapper.

2. Tryk poselukningen sammen i hele bredden, og klem den sammen, til den er låst fast.

3. Hvis det ønskes, kan lommen vendes enten ud eller ind for at skjule poselukningen.

Tøm posen

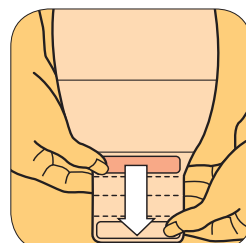

1



2

1. Når posen skal tømmes, åbnes poselukningen, og enden af posen åbnes ved at klemme på begge ender på de hvide strimler med fingrene. Tøm posen.

▲ For detaljerede oplysninger, se brugsanvisningen i emballagen.

Varenummer

Esteem synergy™ 
Type: Tømlar pose
med InvisiClose
Størrelse: Standard
Antal: 10 stk./pk.

Ringstørrelse m.m. ConvaTec-kode

Beige
35 416796
48 416799
61 416902

Klar
35 416795
48 416798
61 416901

© 2011 ConvaTec Inc. Symbolerne ®/™ angiver registrerede varemærker tilhørende ConvaTec Inc.



ConvaTec