

Flexima® Active, lukket med filter

med en unik elastisk hudklæber

Indikation




- Kolostomi

Egenskaber

- Patenteret elastisk hudklæber der
 - har en behagelig bærekraft
 - giver stor flexibilitet, er god til at tilpasse sig hudkonturer
 - ikke efterlader klæberester på huden
 - giver god hudbeskyttelse
 - har lille risiko for maseration
 - har øjeblikkelig vedhæftning
 - giver mulighed for repositionering
- Klæberen er påsat højt oppe på posen, hvilket giver en bedre komfort, samt diskretion
- Opklipbar klæber i str.:
 - mini: 15–45 mm
 - midi: 15–50 mm
 - maxi: 15–65 mm eller 15–80 mm
- **Nyhed:** Findes nu også med inspektionsvindue, der gør det muligt at observere stomien. og kan være en hjælp ved påsætning af posen.

Produktbeskrivelse

- 1-dels lukket stomipose m. filter
- Blomsterformet elastisk hudklæber, der følger huden
- 5 forudstansede udgaver
- Transparent og beige
- 3 str. – mini, midi og maxi
- **Nyhed:** Opklipbare poser med inspektionsvindue i mini, midi og maxi

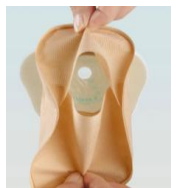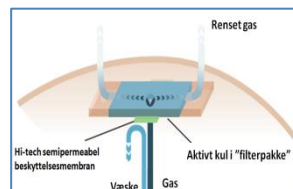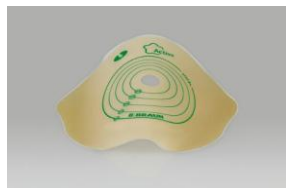

Flexima® Active har

- ✓ en helt unik sikker, elastisk og smidig hudklæber
- ✓ et meget effektivt og sikkert kulfilter
- ✓ et inspektionsvindue der giver mulighed for at observere stomien samt gør påsætning nemmere

Varenr.	Varenr. med inspektionsvindue	Produkt navn, Beige	Salgsenhed /æske
4610115N	NY 4612115N	Flexima Active Lukket m. filter, Midi 15-50 mm	30 stk.
4610125N	-	Flexima Active Lukket m. filter, Midi 25 mm	30 stk.
4610130N	-	Flexima Active Lukket m. filter, Midi 30 mm	30 stk.
4610135N	-	Flexima Active Lukket m. filter, Midi 35 mm	30 stk.
4610140N	-	Flexima Active Lukket m. filter, Midi 40 mm	30 stk.
4610145N	-	Flexima Active Lukket m. filter, Midi 45 mm	30 stk.
4610380N	NY 4612380N	Flexima Active Lukket m. filter, Maxi 15-65 mm	30 stk.
4610480N	NY 4612480N	Flexima Active Lukket m. filter, Maxi 15-80 mm	30 stk.
4610215N	NY 4612215N	Flexima Active Lukket m. filter, Mini 15-45 mm	30 stk.
		Transparente størrelser/varenumre på modsatte side	



Påsætning af posen

Stå op eller sid ned uden at trække i huden eller læne overkroppen bagud under påsætningen.

Hjælp evt. påsætningen på vej ved at folde stomiposen som vist. Dette kan give et bedre overblik, når posen skal sættes på.

Det er muligt at løsne klæberen og atter påsætte den, hvis man ikke er helt tilfreds med resultatet.

Et godt tip til aftagning er at trække klæberen nedad og ikke ud.

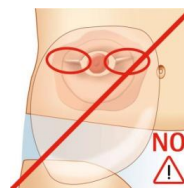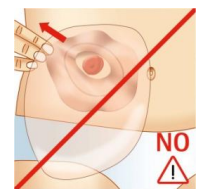

Varenr.	Produktnavn, Transparent	Salgsenhed /æske
4611115N	Flexima Active Lukket m. filter, Midi 15-50 mm	30 stk.
4611125N	Flexima Active Lukket m. filter, Midi 25 mm	30 stk.
4611130N	Flexima Active Lukket m. filter, Midi 30 mm	30 stk.
4611135N	Flexima Active Lukket m. filter, Midi 35 mm	30 stk.
4611140N	Flexima Active Lukket m. filter, Midi 40 mm	30 stk.
4611145N	Flexima Active Lukket m. filter, Midi 45 mm	30 stk.
4611380N	Flexima Active Lukket m. filter, Maxi 15-65 mm	30 stk.
	Beige størrelser/varenumre på modsatte side	