


Medicina polyurethan ernæringssonder med guidewire

Pakningen indeholder sonde, fikseringsplaster, pH teststrimmel og en label, som kan klistres på patientens papirer indeholdende b.la. informationer om anlæggelse og sondens størrelse

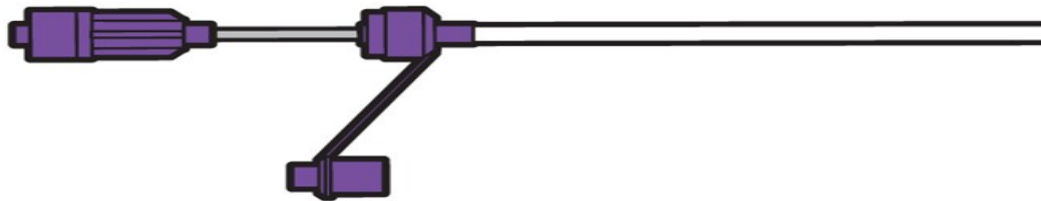

Anvendelse.

Medicina polyurethan sonde med guidewire er velegnet til langtidsbrug (bør skiftes efter 60 dage) til anlæggelse i ventriklen. Sonden er blød og udviklet til børn og voksne, som har brug for ernæring over en længere periode. Den leveres i 5 forskellige varianter (FR). Sonden er nem og sikker at anlægge. Der aspireres udelukkende for at kontrollere korrekt placering med Medicina pH teststrimmel. KOM ALDRIG VAND I SONDEN/GUIDEWIREN inden korrekt placering er kontrolleret. Guidewiren må aldrig udskiftes eller genanlægges så længe sonden stadig befinder sig i patienten.

Egenskaber.

- Sonden er fremstillet af polyurethan. Fri for latex, ftalater og PVC.
- Guidewiren har ENFit holder, som tillader aspiration inden guidewiren fjernes
- Guidewiren stopper minimum 2 cm inden de laterale huller, hvorved perforationsskade undgås
- Afrundet, lukket spids med laterale uskarpe huller
- Afstandsmarkeringer (1 cm's afstand) til kontrol af sondens beliggenhed
- Er fuldt røntgenfast (40% Bariumsulfat). Lyser tydeligt op ved røntgen
- Har ENFit kobling
- Størrelserne 8FR og 10FR findes tillige med tungsten

Sortiment.

NGP6/55L	6FR x 55 cm (25)	NGP10/85L	10FR x 85 cm (25)
NGP6/75L	6FR x 75 cm (25)	NGP10/120L	10FR x 120 cm (25)
NGP6/85L	6FR x 85 cm (25)	NGP12/85L	12FR x 85 cm (25)
NGP8/55L	8FR x 55 cm (25)	NGP12/120L	12FR x 120 cm (25)
NGP8/75L	8FR x 75 cm (25)	NGP14/85L	14FR x 85 cm (25)
NGP8/85L	8FR x 85 cm (25)	NGP14/120L	14FR x 120 cm (25)
NGP8/120L	8FR x 120 cm (25)		

H
HARDAM

Hardam A/S
Måbjerg Skolevej 48 , 7500 Holstebro
Telefon 9742 3233
Email: Post@hardam.dk
www.hardam-shop.dk

