

P04-545-100 01/13 onthefront.dk



Convex

# Dansac NovaLife Convex PRODUKTDATABLAD

NovaLife Convex 1-dels og 2-dels lukkede og åbne poser

# Hvorfor bruge konveksitet?

En pålidelig og sikker stomibandage er af fundamental betydning for rehabiliteringen af personer med stomi. En sådan bandage vil ikke alene reducere omkostningerne, men også give en bedre livskvalitet og mindske risikoen for komplikationer såsom lækage, lugt, ødelagt peristomal hud, smerter og tab af selvværd.

## Det konvekse produkts rolle er:

- At give et spejlbillede af det peristomale område
- At sørge for kontinuerlig kontakt mellem huden og stomibandagen
- At give det peristomale område det ekstra tryk, der skubber stomien frem.
- At forenkle poseskift/pladeskift



## Konveksitet spiller en vigtig rolle i afhjælpningen af:

- En flad stomi
- En tilbagetrasket stomi
- En stomi i en hudfold
- En stomiåbning, der sidder i eller under hudniveau
- En forkert konstrueret stomi, som kan tippe
- Peristaltiske bevægelser, der får slimhinden til at trække sig sammen i hudniveau
- I visse tilfælde, f.eks. i forbindelse med retraktion, fistler og glidende tilbagetrækning, giver den konvekse plade en løsning, som er billigere og indebærer færre risici end en ny operation





# Tilstand



# Løsning

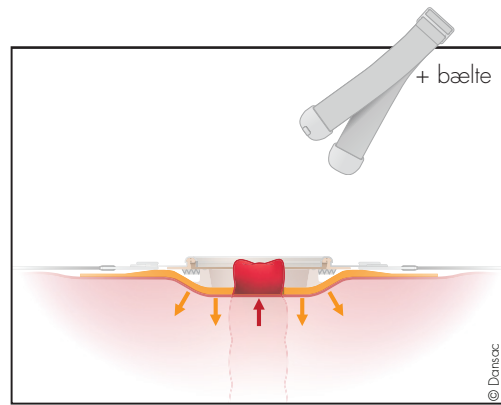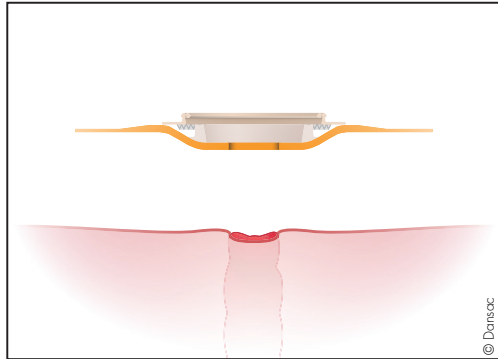



## Flad

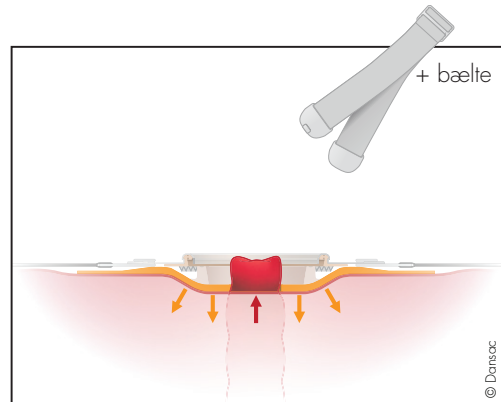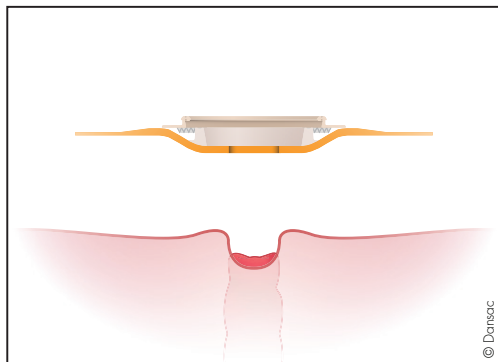

## Tilbagetrukket

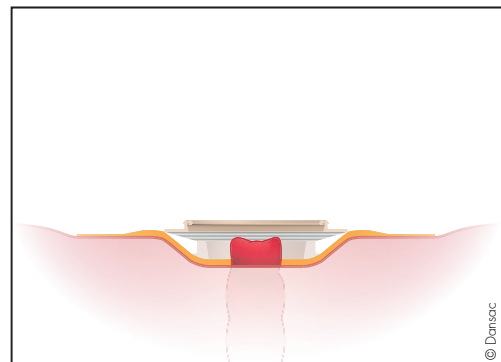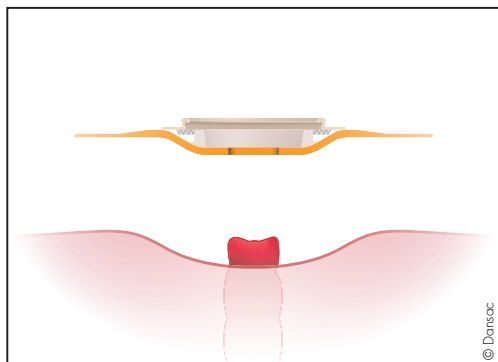

## Voldgrav

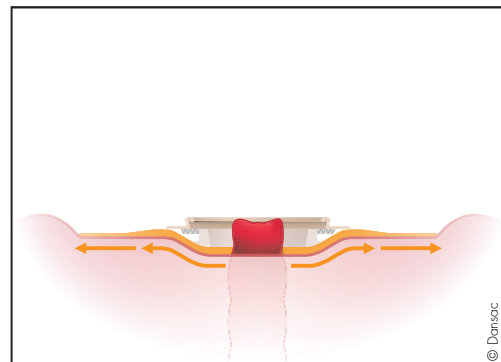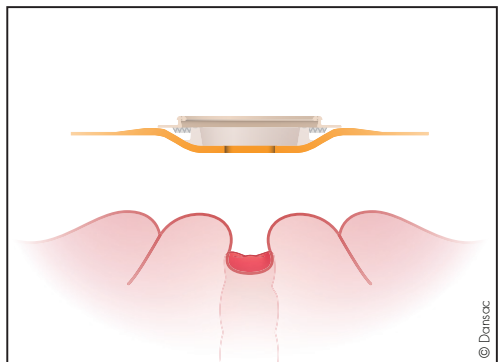


## Hudfolder

# Novalife Convex

## Convex egenskaber

### Det rigtige tryk på det rigtige sted

Et fast, konvekst indlæg gør det muligt for stomibandagen at lægge trykket tæt på stomien.

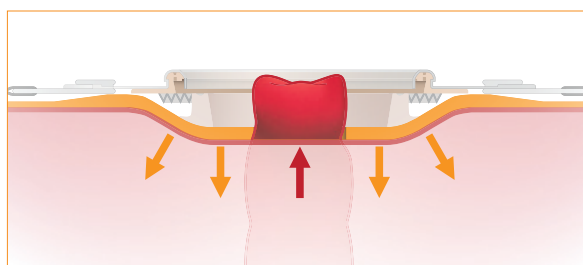

### 4 konvekse størrelser

Med fire forskellige plateustørrelser er der en valgmulighed for alle stomistørrelser – fra stor til lille.

### Oval klæber

Det unikke ovale design passer til kroppens naturlige former og sikrer, at klæbematerialet er placeret i siderne og foroven, hvor der er mest brug for det.

### Hudvenlig klæber

Sammensætningen i GX hydrocolloid klæberen er baseret på naturlige ingredienser, der beskytter huden omkring stomien. Klæberen har bevist sin hudvenlighed i mange år.

### Gradueret klæber



Klæberens overflade er tykkest rundt om stomien og bliver tyndere ud mod kanterne, så vedhæftningen på huden bliver sikker og skånsom.

### Nemt at fastgøre bælte

Hvis der er behov for et større tryk, kan du anbringe et bælte i posens bælteører. Dansac-bæltet fås i hvid og kan justeres 55-100 cm.



### 1-dels plade

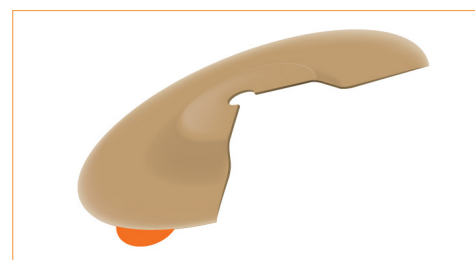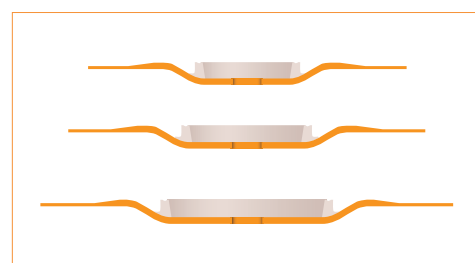



## Yderligere Novalife egenskaber

### Lav poseprofil

Posearealet over pladen er reduceret, hvilket giver en lavere poseprofil. Det gør posen mere diskret og modvirker fremfald af posen, også når der er afføring i den.

### Sikker og fleksibel kobling

Posen og pladen sættes sikkert sammen ved hjælp af det gennemprøvede koblingssystem. Den løftbare koblingsring sikrer nem påsætning af posen med et minimalt tryk på maven.

### Aftagningsøre

Klæberen fjernes enkelt og sikkert takket være det meget synlige, ikke-klæbende aftagningsøre.




### Vandafvisende stofbeklædning

Posens bløde stof er vandafvisende og forbliver tørt også under badning.

### Effektivt Novalife filter

Membraner på begge sider af Novalife filteret beskytter mod posens indhold og vand udefra og gør brugen af filterbrikker unødvendig. Filteret filtrerer hurtigt en stor mængde luft, hvilket minimerer risikoen for ballondannelse i posen.

### 2-dels plade

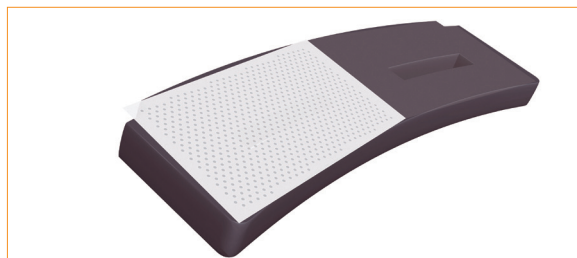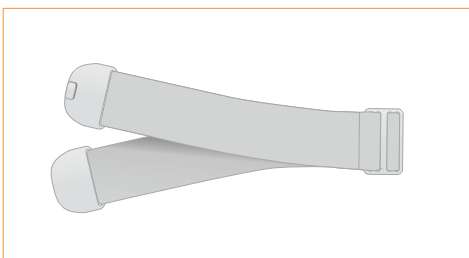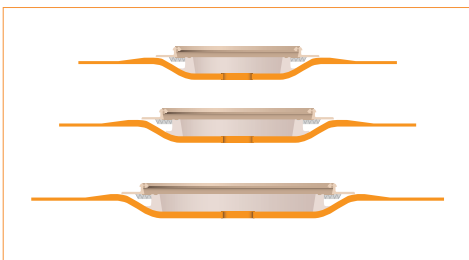









## Novalife 2 Convex plade



	Plateau	Ringstørrelse	Opklippelig til	REF	REF	REF	REF
 36 mm	A	10 - 23 mm 20 mm 23 mm	23 mm	1936 - 10 1936 - 20 1936 - 23			
 43 mm	B	10 - 30 mm 25 mm 30 mm	30 mm		1943 - 10 1943 - 25 1943 - 30		
 55 mm	C	10 - 42 mm 35 - 42 mm 40 mm	42 mm			1955 - 10 1955 - 35 1955 - 40	
 70 mm	D	10 - 59 mm 40 - 59 mm 45 - 59 mm	59 mm				1970 - 10 1970 - 40 1970 - 45

### Specifikationer

Konveksitet				6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
Længde x bredde				107 x 91 mm	116 x 98 mm	130 x 110 mm	150 x 127 mm
Æsker á				5 stk	5 stk	5 stk	5 stk



## Novalife 2 Lukket



	MINI	MIDI	MIDI
	FARVET	FARVET	KLAR
<b>Ringstørrelse</b>	REF	REF	REF
36 mm	1303 - 36	1301 - 36	1302 - 36
43 mm	1303 - 43	1301 - 43	1302 - 43
55 mm	1303 - 55	1301 - 55	1302 - 55
70 mm		1301 - 70	1302 - 70

### Specifikationer

Længde x bredde	175 x 130 mm	190 x 145 mm	190 x 145 mm
Kapacitet	260 ml	390 ml	390 ml
Æsker á	30 stk	30 stk	30 stk



## Novalife 2 Åben



	MINI	MINI	MIDI	MIDI	MAXI	MAXI
	FARVET	KLAR	FARVET	KLAR	FARVET	KLAR
<b>Ringstørrelse</b>	REF	REF	REF	REF	REF	REF
36 mm	1319 - 36	1320 - 36	1315 - 36	1316 - 36		
43 mm	1319 - 43	1320 - 43	1315 - 43	1316 - 43	1321 - 43	1322 - 43
55 mm	1319 - 55	1320 - 55	1315 - 55	1316 - 55	1321 - 55	1322 - 55
70 mm			1315 - 70	1316 - 70	1321 - 70	1322 - 70

### Specifikationer

Længde x bredde	220 x 132 mm	220 x 132 mm	239 x 144 mm	239 x 144 mm	259 x 158 mm	259 x 158 mm
Kapacitet	280 ml	300 ml	440 ml	480 ml	650 ml	690 ml
Æsker á	30 stk	30 stk	30 stk	30 stk	30 kpl	30 stk