



LØSNINGEN TILPASSET DINE BEHOV

**TRANSANAL IRRIGATION
MED AQUAFLUSH**

TRANSANAL IRRIGATION
MED KONUS

TIL PATIENTEN

aquaflush®

Aquaflush transanalt irrigationssystem er designet ud fra brugerens behov og består af 4 forskellige sæt: Quick, Compact, Lite & Actif. Din sygeplejerske hjælper dig med at finde det rigtige produkt til dig.

Du har måske allerede haft flere samtaler med din sygeplejerske om, hvad der er den bedste løsning for dig.

Effekten af at irrigere er meget individuel, og det kan tage noget tilvænnning inden du får rutinen. Vær tålmodig og du kan opdage, at irrigation giver dig bedre kontrol over din tarm.

Systemet giver dig mulighed for at etablere en effektiv rutine til at styre tømningen af tarmen. At du irrigerer på et fast tidspunkt efter eget valg, gør at Aquaflush Systemet kan passes ind i din hverdag og give dig frihed til, at leve livet på egne betingelser.

Dette hæfte vil guide dig igennem hvad irrigation er. (også kaldet transanal irrigation (TAI)). Hæftet beskriver Aquaflush Systemet og besvarer spørgsmål om transanal irrigation, samt giver nyttige tips.







“

Det er simpelt, robust
og holder dig aktivt
deltagende - den
bedste løsning hidtil.

”




Hvad er transanal irrigation?

Transanal irrigation har været praktiseret i flere hundrede år. I de senere år har det været en løsning, som sundhedsprofessionelle har brugt til regulering af udskillelsen af afføring.

Transanal irrigation kan afhjælpe symptomerne på afføringsinkontinens, lidelser forbundet med besværet afgang af afføring og forstoppelse; ofte når andre behandlinger ikke har slået til.

Transanal irrigation er en enkel procedure, hvor kropstempereret vand pumpes gennem en konus indsat i endetarmen. Herved skylles endetarmen og den nedre del af tyktarmen. Når vandet løber ind i endetarmen, udvider endetarmsvæggen sig indtil du kan mærke afføringstrangen. Når pumpningen standses og konus fjernes, vil tarmen tømme sig for afføring og vand.


- Den transanale irrigation kan gentages, afhængigt af behovet. Hvis ikke du føler afføringstrang, kan der anvendes en afmålt vandmængde, som du opnår erfaring med vil udløse udskillelsen af afføringen
- Skyllingen tager cirka 30-45 minutter, og det bør udføres regelmæssigt (normalt hver 24. eller 48. time) for at opnå de bedste resultater
- Undersøgelser viser en tendens til, at antallet af urinvejsinfektioner reduceres, når du irrigerer
- Transanal irrigation kan reducere tiden du bruger på selve tømningen af din tarm og derved forbedre din livskvalitet, selvtillid, selvværd og værdighed

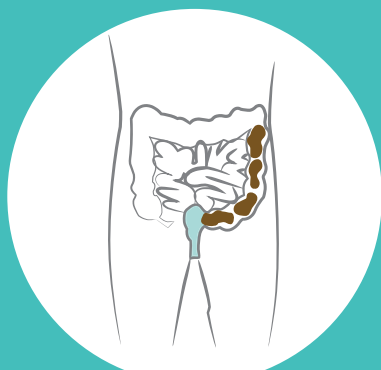

Konservativ
behandling for
afføringsproblemer



Transanal irrigation

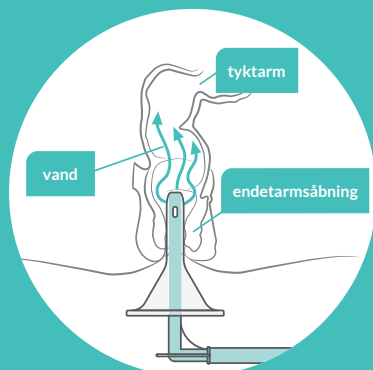

Placering af konus

Retningslinjer for brug af transanal irrigator



Før du begynder, bør din sygeplejerske vise dig, hvordan du bruger Aquaflush Systemet korrekt.

Inden du begynder at irrigere er det en god ide at blive fortrolig med Aquaflush System. Samle systemet, fyld det med vand og lad vandet løbe igennem, mens du følger brugervejledningen. Det kan tage lidt tid at vænne sig til at irrigere, og for tarmen at vænne sig til det. Så du skal være tålmodig. Det kan tage 2-4 uger for at finde rutinen. Det er vigtigt at irrigere på samme tidspunkt hver dag og give sig selv god tid.

Hvis du kun har en lille eller ingen afføringstrang og ikke ved, hvornår din afføring vil komme, er det en fordel at blive hjemme, indtil du ved, hvornår du kan forvente afgang af afføring. Når du har fået rutinen, kan dette derefter forvandle din toiletbesøg til det bedre. I første omgang vil vi anbefale, at du sidder på et beskyttende underlag umiddelbart efter udførelse af irrigationen.

Når Aquaflush tømmer den nedre del af tyktarmen, hjælper dette på:

- Reducere risikoen for forstoppelse ved, at forhindre en ophobning af afføring
- Reducere risikoen for afføringsinkontinens og lækage mellem hver tømning
- Genvinde kontrollen over dine toiletbesøg
- Reducer mængden af den tid du bruger på toiletet

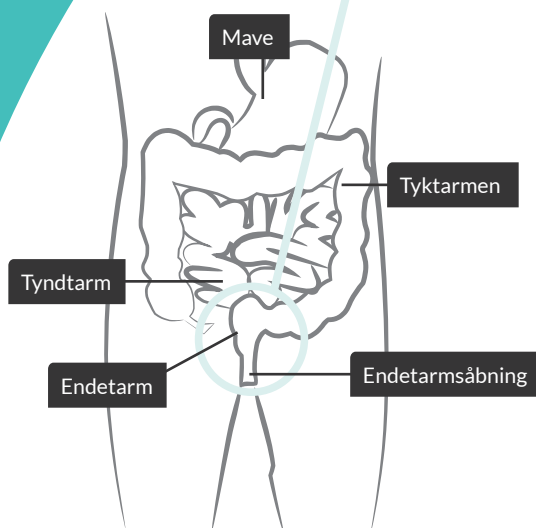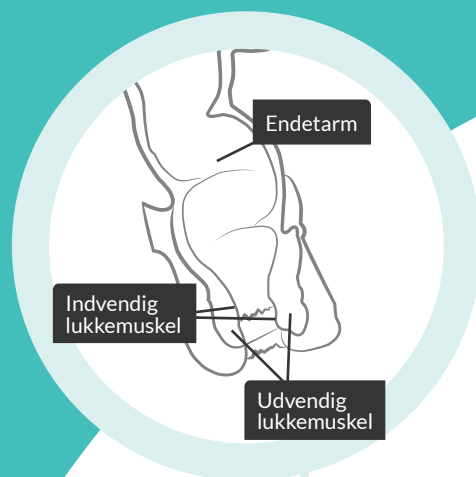

“

Det er et brugervenligt system, med tydelige klik og en enkel lukkemekanisme på slangen, som kan betjenes med en hånd.

”





Quick

Aquaflush Quick er vores mest avancerede irrigationssæt, som indeholder en stor vandbeholder, en-vejs ventiler og konus med klik-kobling. Aquaflush Quick er designet til dem, der kan sidde på et toilet eller toiletstol og holde konus på plads under irrigationen.

- 1 Glat silikone konus med afrundet spids
- 2 Taske til diskret opbevaring
- 3 2 liter vandpose med integreret termometer til at kontrollere vandtemperaturen
- 4 Håndpumpe der nemt kontrollere hastigheden
- 5 Integreret hane for at styre vandets hastighed
- 6 Klik-kobling med en én-vejs ventil, som forhindrer tilbageløb af forurenet vand ind i systemet, en unik funktion hos Aquaflush




Aquaflush Quick giver en afmålt mængde vand ved kropstemperatur, som ses på den integrerede termometerstrip. Vandet føres ind i tarmen ved, at konus placeres i endetarmen og med håndpumpen, pumpes vandet ind. Når ønskede mængde vand er løbet ind, fjernes konus og vand og afføring tømmes ud i toilettet.

Lite

Aquaflush Lite er vores forenklede irrigationssæt med kun de væsentligste dele, som er let at bruge, en god kompakt løsning. Den mindre vandbeholder passer brugerne, der har behov for mindre vand ved hver irrigation og som kan sidde på et toilet eller toiletstol, mens de holder konus på plads.

- 1 Glat silikone konus med afrundet spids
- 2 Taske til diskret opbevaring
- 3 1,2 liter vandpose med integreret termometerstrip til at kontrollere vandtemperaturen
- 4 Håndpumpe som kontrollere hastigheden af irrigationen
- 5 Integreret hane for at styre vandets hastighed
- 6 Klik-kobling til vandpose

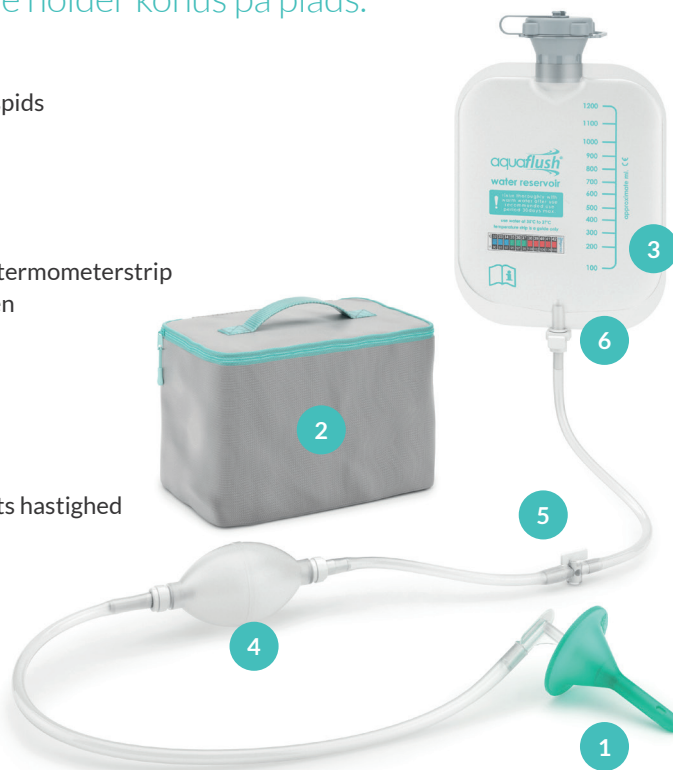


Aquaflush Lite giver en afmålt mængde vand ved kropstemperatur, som vises på den integrerede termometerstrip. Vandet føres ind i tarmen ved, at placere konus i endetarmen og bruge håndpumpen til at pumpe vandet ind. Når ønskede mængde vand er løbet ind, fjernes konus og vand og afføring tømmes ud i toiletet.

Actif

Aquaflush Actif er et unikt produkt med, flere anvendelsesmuligheder. Til transanal irrigation hos børn eller til irrigation via stomi hos børn og voksne. Produktet er udstyret med en ergonomisk designet konus, som har den perfekte længde til begge formål.

- 1 Glat silikone konus med afrundet spids
- 2 Taske til diskret opbevaring
- 3 2 liter vandpose med integreret termometerstrip til at kontrollere vandtemperaturen
- 4 Blødere håndpumpe der nemt kontrollere hastigheden af irrigationen
- 5 Integreret hane til kontrol af vandets hastighed
- 6 Klik-kobling med énvejs ventil, som forhindrer tilbageløb af forurenet vand ind i systemet, en unik funktion hos Aquaflush

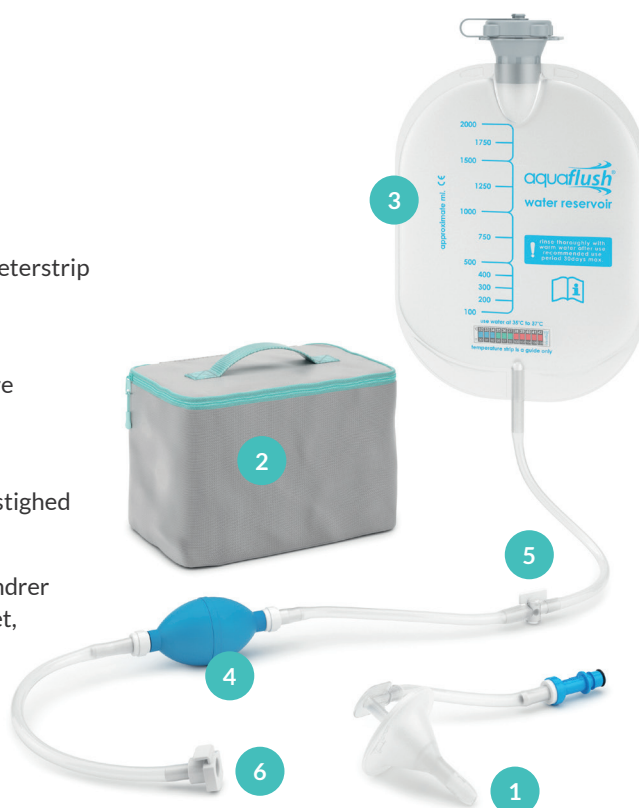

Aquaflush Actif giver en afmålt mængde vand ved kropstemperatur, som vises på den integrerede termometerstrip. Vandet føres ind i tarmen ved at placere konus i endetarmen/ stomien og bruge håndpumpen til at pumpe vandet ind. Når ønskede mængde vand er løbet ind, fjernes konus og vand og afføring tømmes ud i toiletet.



Compact

Aquaflush Compact er designet med brugeren i tankerne. Her tilbydes et system, der er hurtigt, let at lære og sikkert at bruge. Compact er designet til dig, der kun har brug for en lille mængde vand, til irrigationen.

- 1 Glat silikone konus med afrundet spids
- 2 Taske til diskret opbevaring
- 3 Håndpumpe der nemt kontrollerer hastigheden af irrigationen
- 4 Klik-kobling med énvejs ventil, som forhindrer returløb af forurenede vand ind i systemet, en unik funktion hos Aquaflush



Aquaflush Compact giver en afmålt mængde lunkent vand, som føres ind i endetarmen ved at indsætte en konus i endetarmen og presse pumpen én gang. Dette kan gøres ved hjælp af kun én hånd. En ventil forhindrer returløb af forurenede vand ind i systemet. Konus fjernes og vand og afføring tømmes derefter i toilettet. En forlængerslange kan sættes til pumpen ved behov. Processen kan gentages 2-3 gange efter behov.



Praktiske tips til brugen af systemet

Før du starter, skal du sørge for, at alt er gjort klart

Til hver konus er der en vandbaseret glidecreme, der gør det nemmere at indføre konus i endetarmen. Engangshandsker, vådservietter og en affaldsspand kan være en fordel, at have inden for rækkevidde.

Brug båndet til at fastgøre slangen til dit ben, så pumpen er nem at nå

Der er et elastisk bånd med i Aquaflush Starter sættet og de kan købes separat (AFStrap).

Brug forlængerslangen til at øge længden, for at lette brugen

En forlængerslange er med i Aquaflush Starter sættet og kan købes separat (AFExtn).

Hvor skal du placere vandposen?

Vandposen har en integreret ring, så du kan hænge den på en krog, på håndvasken eller toilet-rulleholderen. Uanset hvad du vælger, skal du sikre dig, at det kan holde en vandpose, der kan veje over 2 kg.

Sættet indeholder en unik foldbar vandpose-holder (vist ovenfor), så du kan placere din vandpose på gulvet ved siden af, inden for rækkevidde. Alle startsets indeholder en pose-holder. Holderen kan rekvireres gratis ved din forhandler.

Brug slange-klemmen for at forhindre slangen snor sig sammen på gulvet

Hvert Aquaflush sæt med vandpose indeholder en slange-klemme.

Medicin der regulerer udskillelsen

Hvis du får medicin, såsom afføringsmidler, er det vigtigt at fortsætte med det indtil sygeplejersken giver dig besked på andet. Svær forstoppelse eller udtamponering, skal være overstået, før der påbegyndes transanal irrigation. Din sygeplejerske kan hjælpe dig med dette. Drik altid rigeligt med vand (1,5-2 liter om dagen). Spis masser af fibre (5 stykker frugt / grønt om dagen). Når du er ovre forstoppelsen, vil transanal irrigation kunne forebygge fremtidige tilfælde.

Vigtig information

Smerte

Der bør ikke være smerte af nogen art i forbindelse med irrigaton. Hvis der på noget tidspunkt i processen opleves smerte, skal du stoppe øjeblikkeligt og kontakte læge eller sygeplejerske. Hvis smerterne fortsætter, og der samtidig opstår blødning eller opkastning, skal du søge lægehjælp med det samme.

Blod

Der kan forekomme blodspor på konus eller i toilettet. Er det vedvarende skal du kontakte læge eller sygeplejerske. Pludselig større blødning kræver akut lægehjælp.

Mavekramper/mavekneb

Tjek at vandet ikke er for varmt eller koldt. Pump vandet langsommere ind. Tillad evt. luft at passere. Nogle mennesker oplever krampe/mavekneb, når tarmen tømmer sig. Hvis mavekneb/mavekramper altid har været kendetegnende ved toiletbesøg, kan dette øges i forbindelse med irrigation.

Utilpashed eller oppustethed under/efter irrigationen

Det er ikke usædvanligt at du kan føle dig en smule utilpas under irrigation eller umiddelbart efter irrigationen.

Disse symptomer bør hurtigt gå over:

- Kvalme
- Svimmelhed
- Gåsehud
- Svedeture
- Hjertebanken

Det kan være en fordel, at have pårørende tilstede i hjemmet, de første par gange, du prøver irrigation.

Sikkerhed

Mennesker har brugt transanal irrigation siden oldtiden. Hvis du er blevet vurderet af en kvalificeret sygeplejerske og korrekt instrueret i at bruge systemet, så er risikoen for komplikationer minimal. Nogle mennesker oplever lidt ubehag eller blødning. Hvis ikke systemet bruges ansvarligt, hvis konus sættes forkert ind, der bruges for meget vand eller tarmen beskadiges med for varmt vand, er der en risiko for at perforere tarmen. (Risikoen er 1: 50.000, hvis man anvender et rektal ballonkateter.)

VIGTIGT: For mennesker med rygmarvsskader

Har du en rygmarvsskade eller er du para- eller tetraplegiker, bør du tale med din læge eller sygeplejerske inden du opstarter transanal irrigation. Du og dine evt. hjælpere bør kende til de særlige hensyn, som er aktuelle ved disse tilstande i forbindelse med irrigation.

“

Hos Aquaflush har vi et tæt samarbejde med patienter og sundhedspersonale, for at udvikle produkter, der sætter brugeren først.

”



Hvornår skal jeg irrigere?

Tømning af dine tarme fungerer oftest bedst, når det gøres på den samme tid hver eller hver anden dag. Find en rutine der passer bedst omkring dine daglige aktiviteter. Vælg det tidspunkt, der er passer bedst for dig og forsøg at irrigere på dette tidspunkt hver gang.

Hvor dybt kan jeg indføre konus?

Konus kan med fordel smøres med en vandbaseret glidecreme. Konus presses let op i endetarmen til der kan lukkes tæt omkring konus med lukkemusklen i endetarmen. Lækker det, når du begynder at pumpe vandet op, så skub konus lidt længere op. Dog ikke så meget, at du føler ubehag eller får krampe. Hvis du er i tvivl, bør du stoppe med at irrigere og søge råd hos den sygeplejerske, som har oplært dig i irrigation.

Hvor lang tid tager det?

Det er afhængigt af, hvilket system du bruger. Quick og Lite systemerne tager ca. 35-40 minutter, men bruger du Compact tager det omkring 5-10 minutter.

Hvor meget vand skal jeg bruge?

For brugere af Quick eller Lite Systemerne er vejledning fra specialuddannede sygeplejersker ofte, at starte med omkring 300-400 ml og derefter arbejde op til min 800 ml/ irrigation henover den første uge. Nogle brugere kræver op til 1500 ml/irrigation, derfor er det vigtigt, at du følger de vejledninger, som din sygeplejerske har angivet. For brugere af Compact Systemet kan ballonen indeholde 120ml vand, og dette kan være tilstrækkeligt. Andre brugere kan være nødt til at gentage proceduren.

Hvilken temperatur skal vandet have?

Vi anbefaler en vandtemperatur på 35-37°C. Quick og Lite har strip, der er en integreret temperaturmåler på vandposen, som kan vejlede dig.

Vandet render ud, når jeg pumper det ind – er der noget galt?

Dette kan forventes, især hvis der er meget luft (flatulens) i tarmen. Fordelen ved Aquaflush konusbaserede transanale Irrigation System er, at tætheden mellem konus og lukkemusklen ikke er så stram, at det lukker helt af. Derved mindskes risikoen for at blive oppustet og utilpas, når luft og

afføring begynder at presse på. Det betyder også, at der er mindre risiko for interne komplikationer. Hvis du er meget forstoppet, vil vandet ikke være i stand til at komme forbi afføringen, som fylder endetarmen. Hvis dette er tilfældet, og det sker mere end 2 gange ved irrigationen, bør læge eller sygeplejerske kontaktes. De kan vurdere, om det er nødvendigt, at ordinere afføringsmidler. Du skal huske at drikke rigeligt med vand og spise mange fiber.

Meget lys brun eller næsten klart vand er tømt ud, men ingen afføring?

Dette kan betyde, at du har svær forstoppelse, eller det helt modsatte. Nemlig at du for nylig har tømt din tarm og der ikke er noget at udtømme. Hvis det sidste er tilfældet, så er det gode tegn, så skal du ikke irrigere så ofte. Hvis du oplever meget lyst returvand og ingen afføring kan du prøve at irrigere en gang mere. Husk at drikke rigeligt med vand (6-8 glas væske om dagen). Anvender du Aquaflush 20-30 minutter efter du har spist eller drukket, kan måltidet hjælpe med at stimulere din naturlige aktivitet af tarmen. Såfremt vandets indløb er langsomt, kan tarmen absorbere vandet i stedet for, at det aktivere en reel tømning af tarmen. Derfor er det væsentligt, at vandet løber ind over kort tid omkring 10-15 min for ca. 1000 ml.

Hvordan ved jeg, hvornår jeg er færdig?

Svaret er, at du skal prøve dig frem. Dette vil sandsynligvis være et mindre problem, hvis du får signal om, at du skal på toilettet. Hvis du kun har et svagt eller intet signal om nært forestående toiletbesøg, anbefales det at du venter et stykke tid efter den sidste irrigation.

Hvad så når jeg ikke er hjemme?

Til Aquaflush Systemet medfølger en Aquaflush taske. Den kommer med startsættet. Vær opmærksom på at du har tilfredsstillende antal konus med, når du er ude at rejse. Det kan være svært at skaffe produkter i udlandet. Hvis du skal flyve, skal du sikre, at du får pakket Aquaflush irrigationssættet i din håndbagage. Det er vigtigt på rejser, at du bruger vand fra flaske eller koger og afkøler vandet selv, de steder hvor det ikke er sikkert, at vandet fra hanen kan drikkes.



Skal jeg stoppe med at irrigere, hvis jeg bliver utilpas eller min medicinske tilstand ændrer sig?

Er du i tvivl kontakt din læge eller sygeplejerske. Efter kirurgiske indgreb på tarm eller mave bør du ikke irrigere, medmindre andet er aftalt med sygeplejersken og du er instrueret heri.

Hvad skal jeg forvente efter transanal irrigation?

Du kan forvente, at der med det samme kommer vand og afføring sammen med luft. Ofte vil tarmen tømme sig 2-3 gange over ca. 20 min. Hvis der ikke er sket noget efter ca. 20 minutter, kan det hjælpe at massere maven i urets retning, hoste, ændre stilling, bøje sig frem. Nogen oplever at kunne aktivere processen, ved at anvende en Glycerol stikpille, som kan købes i håndkøb på apoteket. Hvis det er meget mørkebrunt vand og afføring der kommer, har du det ønskede resultat.

Lækage af vand eller afføring efter irrigation?

Lækage kan være et problem, når du starter med irrigation. Det kan tage 2-4 uger og for nogen længere, at finde rutinen. Så giv dig god tid i starten. Hvis du har svært ved eller ikke kan mærke, når du skal af med afføring, er det en god idé, at være tæt på et toilet, indtil du ved hvad du kan forvente. Når du har fundet en regelmæssig rutine, vil irrigation sandsynligvis være med til at forbedre dine toiletbesøg. Hvilket vil medføre færre komplikationer, samt være mindre tidskrævende.

Hvis der stadig er lækage, kan følgende prøves:

- 1 Sid på toiletet i længere tid for at sikre, at tarmen er tømt - nogle med nedsat følelse eller nedsat muskelkontrol, bruger en Glycerol stikpille, som kan købes i håndkøb på apoteket. Dette kan være med til at starte peristaltikken – de bevægelser der fører afføringen frem i tarmen.
- 2 Prøv at bruge mere vand – du aktiverede peristaltikken, men brugte ikke vand nok til helt at skylle endetarmen / nederste del af tyktarm. Prøv at irrigerer en gang mere, for at sikre at tarmen er tømt og der ikke kommer mere afføring.
- 3 Prøv at bruge mindre vand - for meget vand kan overstimulere den øverste del af tarmen, og derved vil afføring højere oppe fra end den nedadgående tyktarm aktiveres og blive ført frem i tarmen. Systemet er ikke beregnet til irrigation af hele colon/tyktarmens fulde længde.
- 4 Skyl oftere – hvis du kan mærke du skal på toiletet og der kommer en regulær portion afføring og det er 12 timer eller mere siden du sidst har irrigeret. Så kan det være nødvendigt at du irrigerer hver dag.

Kontakt din sygeplejerske/læge for yderlig rådgivning

Quick



Quick – Startset

Indhold	Varenummer
1 stk. Vandpose med pumpe/slange og slange-klemme	AFQS
5 stk. Silikone konus med slange	
5 stk. Breve med glidecreme	
1 stk. S-krog	
1 stk. Fikseringsbånd til benet AFStrap	
1 stk. Taske	
1 stk. Vandpose-holder	
1 stk. Forlængerslange AFExtn	
1 stk. Instruktionsbog	
1 stk. Produktoversigt	

Quick – Månedssæt

Indhold	Varenummer
1 stk. Vandpose med pumpe/slange og slange-klemme	AFQM
15 stk. Silikone konus med slange	
15 stk. Breve med glidecreme	
1 stk. Instruktionsbog	
1 stk. Produktoversigt	

Tilbehør

Forlængerslange	Varenummer
2 stk. 500mm forlængerslange med klik-kobling	AFExtn

Justerbart bånd	Varenummer
2 stk. 20mm x 550mm justerbart bånd med Velcro lukning	AFStrap

Lite



Lite – Startset

Indhold	Varenummer
1 stk. Vandpose	AFLS
1 stk. Pumpe/slange med slange-klemme	
7 stk. Silikone konus og breve med glidecreme, pakket i genlukkelig pose	
1 stk. S-krog	
1 stk. Fikseringsbånd til benet AFStrap	
1 stk. Forlængerslange AFLExtn	
1 stk. Taske	
1 stk. Pose-holder	
1 stk. Instruktionsbog	
1 stk. Produktoversigt	

Lite – Månedssæt

Indhold	Varenummer
1 stk. Vandpose	AFLM
1 stk. Pumpe/slange med slange-klemme	
16 stk. Silikone konus og breve med glidecreme, pakket i genlukkelig pose	
1 stk. Instruktionsbog	
1 stk. Produktoversigt	

Tilbehør

Forlængerslange	Varenummer
2 stk. 500mm forlængerslange med klik-kobling	AFExtn

Justerbart bånd	Varenummer
2 stk. 20mm x 550mm justerbart bånd med Velcro lukning	AFStrap

Actif



Actif – Startset

Indhold	Varenummer
1 stk. Vandpose med pumpe/slange og slange-klemme	AFAS
5 stk. Silikone konus med slange	
5 stk. Breve med glidecreme	
1 stk. S-krog	
1 stk. Fikseringsbånd til benet AFStrap	
1 stk. Taske	
1 stk. Pose-holder	
1 stk. Forlængerslange AFExtn	
1 stk. Instruktionsbog (stomi)	
1 stk. Instruktionsbog (til børn)	
1 stk. Produktoversigt	

Actif – Månedssæt

Indhold	Varenummer
1 stk. Vandpose med pumpe/slange og slange-klemme	AFAM
15 stk. Silikone konus med slange	
15 stk. Breve med glidecreme	
1 stk. Instruktionsbog (stomi)	
1 stk. Instruktionsbog (til børn)	
1 stk. Produktoversigt	

Tilbehør

Forlængerslange	Varenummer
2 stk. 500mm forlængerslange med klik-kobling	AFExtn

Compact



Compact – Startset

Indhold	Varenummer
1 stk. Pumpe med klik-kobling.	AFCS
5 stk. Silikone konus og breve med glidecreme, pakket i genlukkelig pose	
1 stk. klik-koblings ventil AFCONNB	
1 stk. Taske	
1 stk. Beskyttelsespose	
1 stk. Instruktionsbog	
1 stk. Produktoversigt	

Compact – Månedssæt

Indhold	Varenummer
1 stk. Pumpe med klik-kobling	AFCM
15 stk. Silikone konus og breve med glidecreme, pakket i genlukkelig pose	
2 stk. Klik-koblings ventil AFCONNB	
1 stk Instruktionsbog	
1 stk. Produktoversigt	

Tilbehør

Forlængerslange	Varenummer
2 stk. 500mm forlængerslange med klik-kobling	AFExtn

Start med irrigation

Når du begynder at irrigere er det vigtigt, at gøre det hver dag i de første to uger (medmindre andet er aftalt med din læge eller sygeplejerske). Derefter finder du det bedste tidspunkt for dig, når du skal irrigere. Du vil også lære, hvor ofte du skal irrigere, og hvor meget vand du skal bruge osv. Det kan tage et par uger at få etableret den bedste rutine for dig, men resultaterne vil være det værd, i den sidste ende.

Brug nedenstående skema, når du irrigere, det vil hjælpe dig med at finde en rutine.

Kontaktoplysninger
til sygeplejersken

Navn:

Tlf:

Email:

Dato	Tidspunkt	Vandmængde	Resultat	Kommentarer

Kirstine Hardam A/S
Måbjerg Skolevej 48, 7500 Holstebro
Telefon: 97 42 32 33
Mail: post@hardam.dk
Webshop: hardam-shop.dk

Tak til specialesygeplejerskerne Gitte Weinreich og Cathrine Hjort Bachmann fra de analfysiologiske klinikker i Region Hovedstaden for deres faglige bidrag.

Aquaflush Medical Limited,
43 All Saints Green,
Norwich NR1 3LY

aquaflush.co.uk

The logo for Aquaflush, featuring the word "aquaflush" in a lowercase, sans-serif font. The letters "a" and "h" are white, while "quaflush" is teal. Above the "a" and below the "h" are white, curved swooshes that suggest motion or a splash of water. A registered trademark symbol (®) is located to the upper right of the "h".