


Minimerer lækage og maceration



AQUACEL[®] Hydrofiber[®] -bandage er en stærkt absorberende bandage, der benyttes til moderat til kraftigt væskende sår. Hydrofiber[®]-teknologiens unikke evne til at indkapsle væske giver kontrol over sårsekret og bakterier. Dette minimerer faren for lækage og maceration. Gelen, der dannes, skaber et gunstigt fugtigt sårmiljø og muliggør skånsomme bandageskift. AQUACEL forlænger skifteintervallerne og giver dig en omkostnings effektiv sårbehandling.

**GUNSTIGT SÅR-
HELINGSMILJØ**
Sammenhængende
gel, der skaber et gunstigt
miljø for sårhelingen.

**HYDROFIBER®
TEKNOLOGI**
AQUACEL® består af
100% natriumcarboxy-
methylcellulose, og
indkapsler sårsekret
med bakterier i
cellulosefibre.

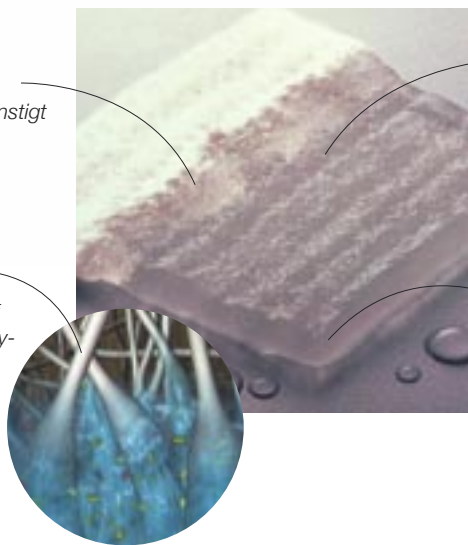

**ABSORPTION OG
RETENTION**
Fibre omdannes
hurtigt til en sammen-
hængende gel.

AQUACEL
Bevarer et fugtigt sårmiljø
og er enkel at fjerne fra
såret.

KONTROL OVER SÅRSEKRETET

AQUACEL® Hydrofiber® -bandage har en fantastisk god absorbtionsevne og håndterer sårsekret på en unik måde. AQUACEL håndterer og kontrollerer sårsekretet og er velegnet til moderat til kraftigt væskende sår. Faren for maceration og antallet af bandageskift reduceres.

BEHAGELIG FOR PATIENTEN

AQUACEL danner en sammenhængende gel i kontakt med sårsekret og er derfor let at fjerne fra såret uden at forårsage ubehag.

ENKEL AT ANVENDE

AQUACEL lægges direkte i såret med en dækbandage over. Sekundær bandage med fugtbarriere anbefales, f.eks. DuoDERM® Extra Thin-bandage eller Versiva®-bandage, som fikserer AQUACEL effektivt. AQUACEL appliceres således, at det ligger 1-2 cm udover sårets kanter. Ved behov kan AQUACEL lægges ovenpå hinanden i flere lag. AQUACEL anvendes tør på væskende sår, men kan også fugtes med saltvand til behandling af tørre sår. Ved ildelugtende sår kan CarboFlex®-bandage benyttes som dækbandage.

AQUACEL® Hydrofiber® bandage

Størrelse	stk./æske	Varenr.
5 x 5 cm	10	177901
10 x 10 cm	10	177902
10 x 10 cm	5	177918
15 x 15 cm	5	177903

AQUACEL® Hydrofiber® cavitetsbandage

2 x 45 cm (bånd)	5	177904
------------------	---	--------

AQUACEL® Hydrofiber® postoperative bandager

4 x 10 cm	10	403730
4 x 20 cm	10	403731
4 x 30 cm	10	403732



FAKTA

AQUACEL® HYDROFIBER®- BANDAGE

AQUACEL består af 100% cellulose (natriumcarboxymethylcellulose). Materialet håndterer sårsekret på en unik måde, ved at væsken og eventuelle bakterier absorberes og bindes hurtigt og effektivt inde i fibre. Dette giver forlængede skifteintervaller og skaber et godt sårhelingsmiljø.

INDIKATIONER

AQUACEL anvendes til moderat til kraftigt væskende sår, eller til sår som forventes at bløde, f.eks. kroniske sår som bensår, tryksår, diabetiske og akutte sår som f.eks. postoperative sår, donorflader og brandsår. Til behandling af inficerede sår, anbefaler vi AQUACEL® Ag -bandage med 1,2 % ioniseret sølv.

SKIFTEINTERVAL

Maksimalt 7 dage. Skiftes når bandagen er mættet.

OPBEVARING

Opbevares tørt ved stuetemperatur

STERILISERINGSMETODE

Gammasteriliseret.

KLASSIFISERING

AQUACEL er CE-mærket og opfylder relevante miljø- og sikkerhedskrav.

HOLDBARHED

5 år.

For yderligere information, se brugsanvisning i pakningen.

 **ConvaTec**
A Bristol-Myers Squibb Company

ConvaTec
Lyngby Hovedgade 98
2800 Kgs. Lyngby
Kundeservice tlf.nr.: 80 30 60 11
eller 45 87 60 11
www.convatec.dk