



## DEN EFFEKTIVE SELVKLÆBENDE BANDAGE TIL ARBEHANDLING


- Minimerer smerte og traume ved bandageskift<sup>1,2,3</sup>
- Ingen ekstra fiksering er nødvendig
- Tilpasser sig efter kroppens konturer
- Kan sidde på under de daglige aktiviteter

### Safetac® lag

- Patenteret blød silikone klæbeteknologi
- Reducerer smerte og traume ved bandageskift<sup>1</sup>

### Nonwoven bagside

- Åndbar
- Vandtæt

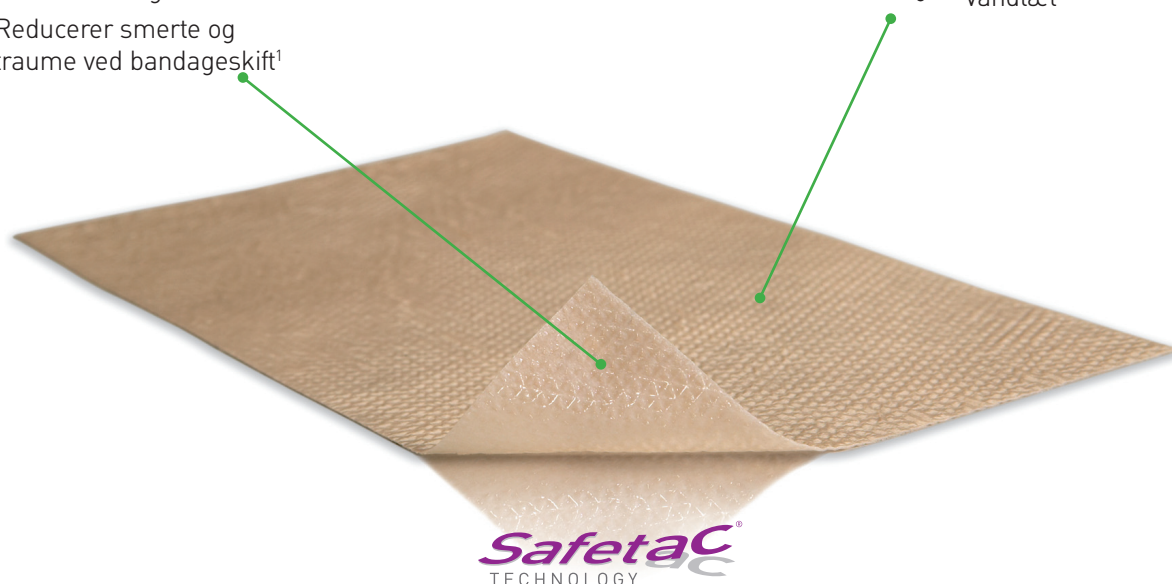


### Safetac® teknologi


#### Safetac® teknologi. Mindre smerte og mindre traume.

Safetac er en patenteret klæbeteknologi, der minimerer smerte hos patienten og traume mod såret. Safetac teknologi findes udelukkende på Mölnlycke Health Care bandager, herunder Mepilex® sortimentet, Mepitel®, Mepiform® og Mepitac®.

Læs mere på [www.safetac.com](http://www.safetac.com)

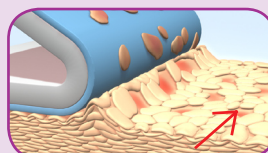


Stripping af hudceller  
med traditionel klæb

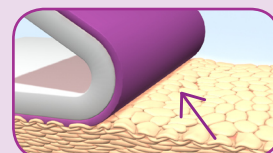


Ingen stripping af  
hudceller med Safetac


## Sådan anvendes Mepiform®

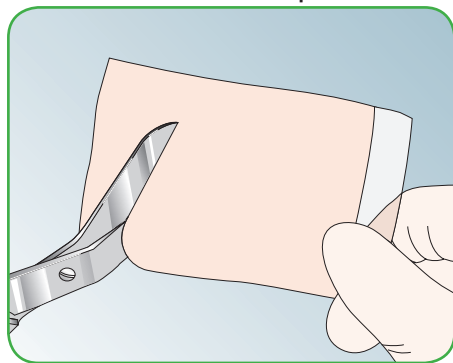

Fjern bagsidefilmen. Mepiform kan klippes til efter behov.

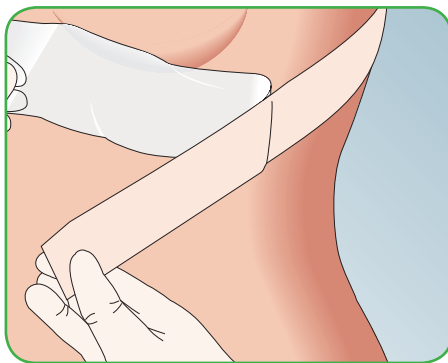

Appliker Mepiform på arret. Sørg for at hudområdet er rent og tørt og fri for enhver salve osv.

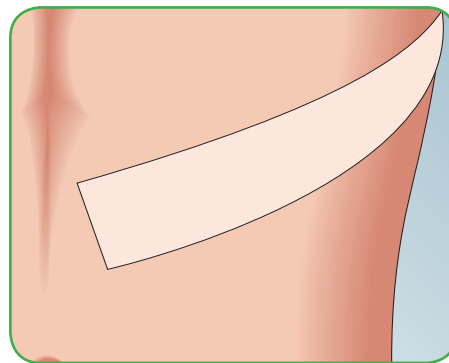

Appliseres igen efter daglig rengøring af arret.

## Sådan virker Mepiform

Medicinsk silikone har erfaringsmæssigt vist sig at have positiv effekt på hypertrofiske ar og keloider.<sup>4,5</sup> Det kan tage fra 3 måneder til et år eller mere at udbedre et gammelt ar, afhængigt af arvævets tilstand. Mepiform bør anvendes 24 timer i døgnet. Det anbefales, at Mepiform fjernes én gang i døgnet, f.eks. ved brusebad eller bad, hvor huden inspiceres og vaskes. Som forebyggende behandling skal Mepiform anvendes i 2-6 måneder, afhængig af arrets tilstand.

## Fordele ved Mepiform

- Minimerer smerte og traume ved bandageskift
- Ingen ekstra fiksering er nødvendig
- Mepiform er tynd, fleksibel og diskret
- Kan sidde på under de daglige aktiviteter
- Et stykke Mepiform kan anvendes i flere dage

## Anvendelsesområder

Mepiform er beregnet til behandling af gamle og nye hypertrofiske ar og keloider. Mepiform kan også anvendes på lukkede sår for at forebygge hypertrofisk og keloid ardannelse.

## Bemærk

Hvis der opstår maceration eller kløe, fjernes bandagen, indtil symptomerne er væk. Genoptag behandlingen gradvist ved at øge den daglige behandlingstid. Mepiform har en UV-beskyttelsesfaktor svarende til 5.<sup>6</sup>



### MEPIFORM SORTIMENT

#### Sterile

| Art. nr. | Str. cm | Stk/inderkrt. | Stk/trp.krt. |
|----------|---------|---------------|--------------|
| 293100   | 4 x 30  | 5             | 50           |
| 293200   | 5 x 7,5 | 5             | 25           |
| 293400   | 10 x 18 | 5             | 35           |

#### Usterile

| Art. nr. | Str. cm | Stk/inderkrt. | Stk/trp.krt. |
|----------|---------|---------------|--------------|
| 293600   | 4 x 30  | 5             | 50           |
| 293700   | 5 x 7,5 | 5             | 25           |
| 293800   | 10 x 18 | 5             | 35           |