

Mepilex® Border

DEN EFFEKTIVE ABSORBERENDE ALT-I-EN SKUMBANDAGE

- Minimerer traume og smerte ved bandageskift^{1,2}
- God og effektiv væskehåndtering
- Sikker fiksering og alligevel atraumatisk aftagning
- Brusetæt

Polyuretan filmbagside

- Åndbar
- Vandtæt
- Bakterie- og virusbarriere*

Safetac® lag

- Reducerer smerte og traume før, under og efter bandageskift¹
- Klæber ikke til det fugtige sårleje, men blidt til den tørre omkringliggende hud
- Forsegler sårkanterne og reducerer risikoen for maceration³

Flerlags absorberende skumpude

- Polyuretanskum som absorberer hurtigt og effektivt
- Fiberlag som indkapsler væsken
- Nonwoven fordelingslag som optimerer absorptionskapaciteten og forebygger lækage




* Mikrober større end 25 nm

Safetac® teknologi


Safetac® teknologi. Mindre smerte og mindre traume.

Safetac er en patenteret klæbeteknologi, der minimerer smerte hos patienten og traume mod såret. Safetac teknologi findes udelukkende på Mölnlycke Health Care bandager, herunder Mepilex® sortimentet, Mepitel®, Mepiform® og Mepitac®.

Læs mere på www.safetac.com

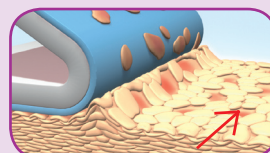


Stripping af hudceller med traditionel klæb

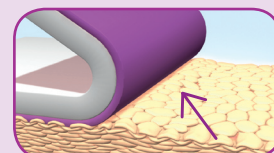


Ingen stripping af hudceller med Safetac

Sådan anvendes Mepilex® Border

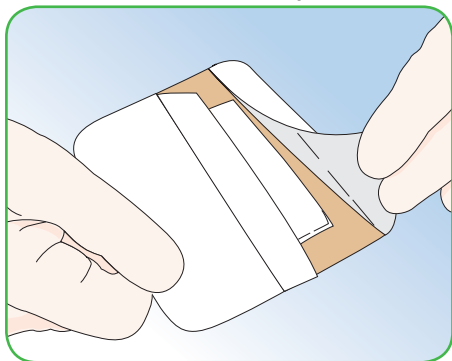

Rens såret.
Fjern beskyttelsesfilmen.

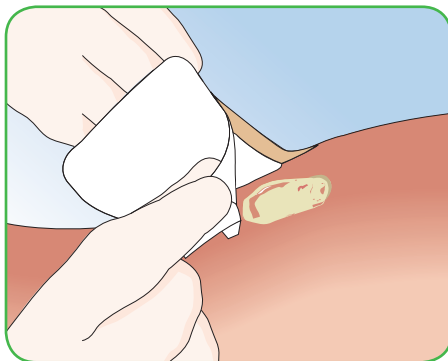

Applicer den klæbende side mod såret.
Stræk ikke bandagen.

Sådan virker Mepilex Border

Mepilex Border er en alt-i-en skumbandage med effektiv væskehåndterings- og retentionsevne, som bevarer et fugtigt sårmiljø. Safetac laget forsegler sårkanterne, hvilket forhindrer væsken i at løbe ud på den omkringliggende hud og minimerer risikoen for maceration. Safetac laget sikrer, at bandagen kan skiftes uden at beskadige såret eller den omkringliggende hud og mindsker derved smerte hos patienten.

Fordele ved Mepilex Border


- Minimerer smerte og traume ved bandageskift
- Selvklæbende - ingen sekundær fiksering nødvendig
- Brusetæt
- Kan anvendes under kompression
- Er behagelig for patienten ved brug
- Kan blive siddende i flere dage, afhængig af sårets tilstand
- Kan løftes og justeres uden at miste klæbeevnen
- Minimal risiko for hudirritation og allergi

Anvendelsesområder

Mepilex Border er udviklet til en bred vifte af væskende sår som ben- og fodsår, tryksår og traumatiske sår, f.eks. hudflænger og kirurgiske sår.

Bemærk

Ved kliniske tegn på infektion bør en læge kontaktes for korrekt infektionsbehandling.

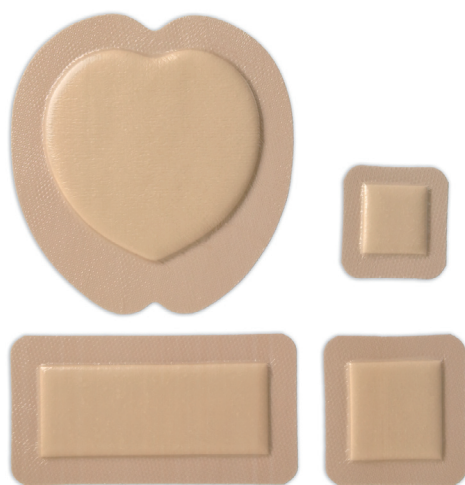

MEPILEX BORDER SORTIMENT (Sterilt pakket)

Art. nr.	Str. cm	Stk./inderkrt.	Stk./trp.krt.
295200	7,5 x 7,5	5	70
295300	10 x 10	5	50
295400	15 x 15	5	50
295600	15 x 20	5	45
Kirurgisk sortiment			
295800	10 x 20	5	35
295850	10 x 25	5	35
295900	10 x 30	5	25
Mepilex Border Sacrum			
282500	15 x 15	5	50
282000	18 x 18	5	40
282400	23 x 23	5	25