


Mepitel® Film

HUDBESKYTTENDE FILMBANDAGE

- Mepitel Film er en blid, transparent og åndbar filmbandage til hudbeskyttelse. Den kan anvendes alene eller i kombination med andre produkter.
- Mepitel Film minimerer smerte og traume ved bandageskift. ^{1,2,3,4,5,6}
- Mepitel Films appliceringssystem er udviklet for at sikre let anvendelse.

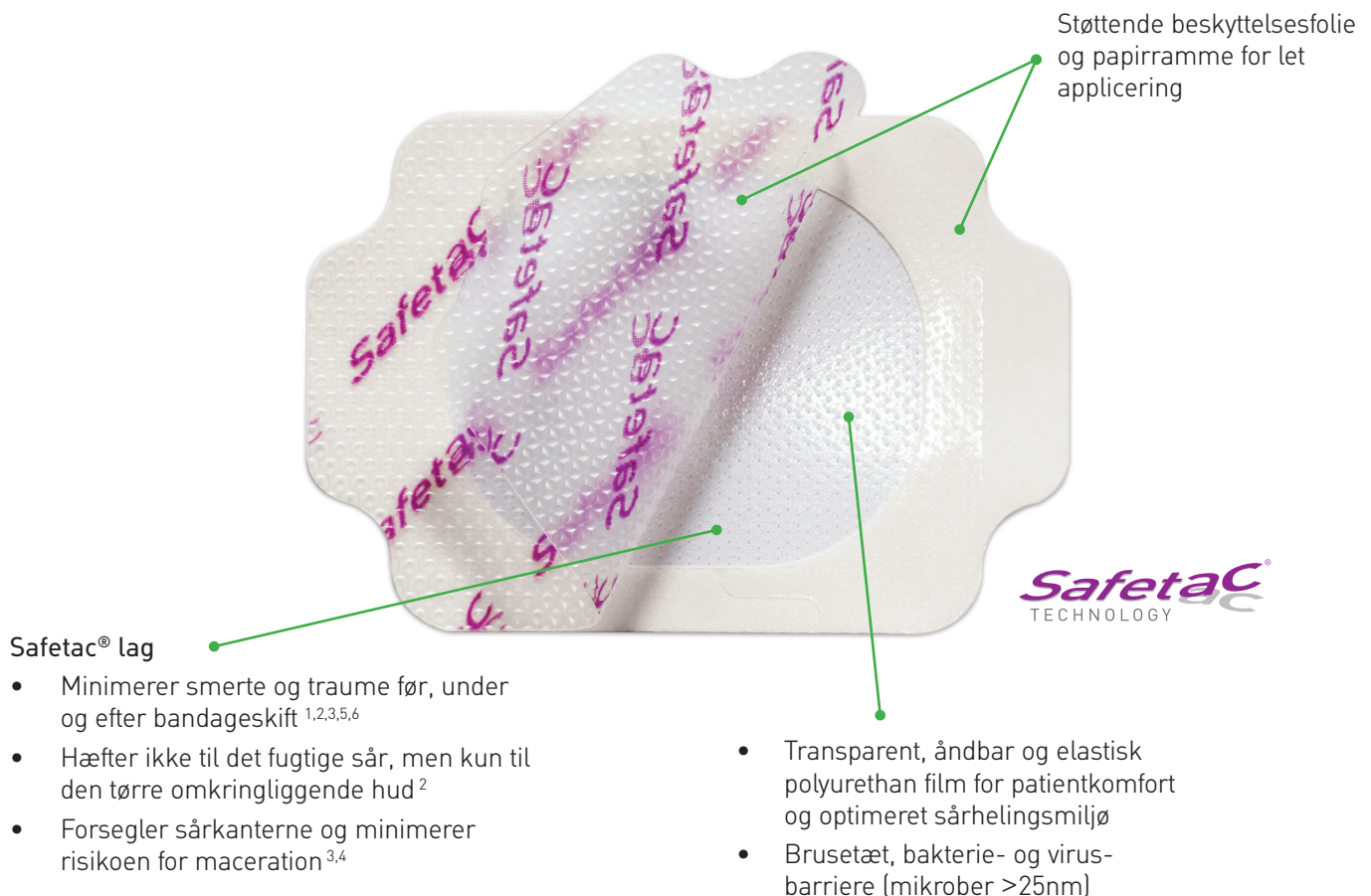


Safetac® teknologi


Safetac® teknologi. Mindre smerte og mindre traume.

Safetac er en patenteret klæbeteknologi som minimerer smerte hos patienten og traume mod såret. Safetac teknologi findes udelukkende på Mölnlycke Health Care bandager, herunder Mepilex® sårbandager, Mepitel® One, Mepiform® og Mepitac®.

Læs mere på: www.safetac.com

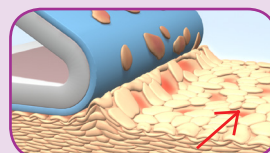

Stripping af hudceller med traditionel klæb

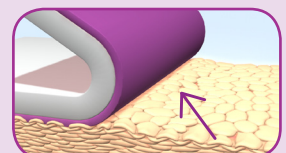

Ingen stripping af hudceller med Safetac teknologi

Sådan anvendes Mepitel® Film



Tør huden/omkringliggende hud grundigt. Fjern beskyttelsesfoliet (trykt Safetac®) for at kunne applicere bandagen.



Placer bandagen. Mepitel Film kan reappliceres så længe papirrammen er intakt. Fjern den hvide papirramme. Stræk ikke bandagen under appliceringen.

For bedst resultat, bør Mepitel Film dække den omkringliggende hud med mindst 1-2 cm for størrelserne op til 10x12 og 5 cm for de større størrelser for sikker fiksering.



Glat bandagen på huden. Mepitel Film kan fjernes uden at forårsage hudstripping og smerte.

Sådan virker Mepitel® Film

Mepitel Film giver et fleksibelt og transparent lag, som beskytter huden for mikrobiel kontaminering, væskegennemtrængning og mod andre udefrakommende kontamineringer. Produktet tilpasser sig hudoverfladens uregelmæssigheder og kroppens konturer.

Mepitel® Film vedligeholder et fugtigt miljø og fordampningsevnen tillader overskydende fugt at trænge væk fra huden. Ved hjælp af Safetac laget kan Mepitel Film give øjeblikkelig vedhæftning.

Mepitel Film efterlader ikke klæberester på huden og Safetac laget sikrer et atraumatisk bandageskift og at klæbeevnen ikke forstærkes over tid.

Skiftefrekvens

Mepitel Film kan blive siddende på huden i op til 7 dage afhængig af hudens tilstand eller sundhedspersonalets anbefalinger.

Fordele ved Mepitel® Film

- Minimerer smerte og traume ved bandageskift
- Minimerer risikoen for beskadigelse af nydannet væv
- Transparent for nem inspektion
- Tilpasser sig kroppens konturer, hvilket fremmer patientkomfort ved anvendelse
- Bakterie- og virusbarriere, hvor mikrober er større end 25nm
- Minimal risiko for hudirritation og allergi
- Efterlader ikke klæberester
- Væske uigennemtrængelig
- Brusetæt

Anvendelsesområder

Mepitel Film er udviklet til en række af overfladiske sår som tryksår kategori 1 og 2, overfladiske skader på huden og overfladiske forbrændinger. Mepitel Film kan anvendes som beskyttelseslag til åbne kirurgiske sår på f.eks. mave og kan anvendes i kombination med geler og salver. Produktet kan også anvendes som en beskyttende Landing Zone, hvor fikseringstape og udstyr kan fikseres ovenpå Mepitel Film for at beskytte skrøbelig og følsom hud.

Forholdsregler

- Mepitel Film er ikke et sårkontaktlag og tillader ikke eksudat at trænge igennem til et sekundært lag.
- Hvis der anvendes mere end et produkt og de overlapper, vil fordampningsgennemtrængningen forringes, dette kan føre til at overskydende fugt ikke kan trænge væk fra huden.

Advarsel

Mepitel Film kan ikke anvendes som primær fiksering til IV, kanyler, porte eller anden infusion og/eller livsbevarende udstyr.



MEPITEL FILM SORTIMENT (sterilt pakket)

Art. Nr.	Str. (cm)	Stk./inderkrt.	Stk./trp.krt
296170	6 × 7	10	50
296270	10 × 12	10	70
296470	10 × 25	10	50
296670	15 × 20	10	70