


SORBACT® GEL DRESSING

Infektionsforebyggende gelkompres

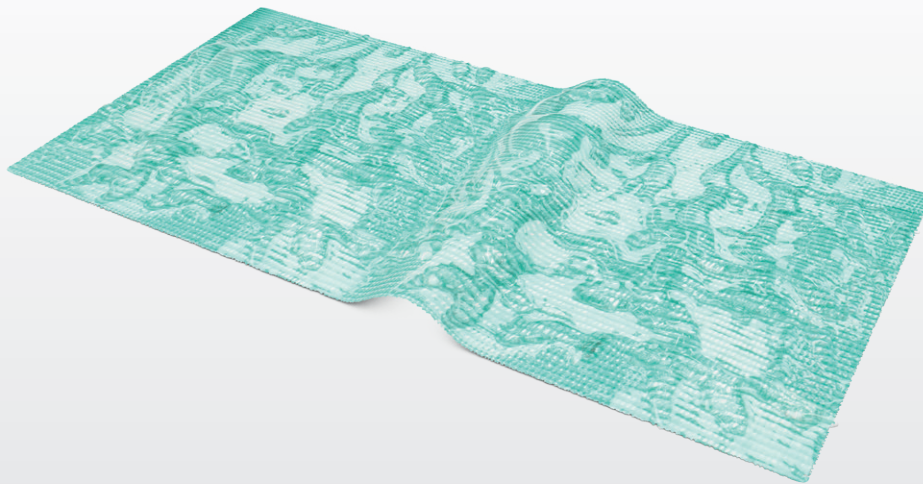

REDUCERER DEN MIKROBIOLOGISKE BELASTNING I TØRRE TIL LET VÆSKENDE SÅR

Sorbact® Gel Dressing er en steril gelbandage, der binder bakterier og svampe. Den består af et grønt Sorbact® sårkontaktlag med en hydrogel, der indeholder carbomer og propylenglycol. Sorbact® Gel Dressing tilfører fugt, og giver derfor et fugtigt sårmiljø.

| Produkt | Varenr. | Størrelse | Stk. / æske |
|-----------------------|---------|------------|-------------|
| Sorbact® Gel Dressing | 98136 | 7,5x7,5 cm | 10 |
| Sorbact® Gel Dressing | 98137 | 7,5x15 cm | 10 |
| Sorbact® Gel Dressing | 98139 | 3x15 cm | 10 |



TILSIGTET ANVENDELSE

Sorbact® Gel Dressing er beregnet til brug i behandlingen af rene, koloniserede, kontaminerede eller inficerede sår, som væsker lidt eller slet ikke, såsom traumesår, brandsår, kavitetssår, fistler, tryksår, diabetiske sår og sår på fødder og ben.

BRUGSANVISNING

1. Forbered såret i overensstemmelse med lokal klinisk praksis.
2. Vælg en passende bandagestørrelse til såret.
3. Fjern bandagen fra posen ved steril teknik.
4. Ved tilklipning af bandagen skal der anvendes steril teknik. Kassér åbne og ubrugte bandager.
5. Læg bandagen på. Sørg for at gelkompressen er i direkte kontakt med hele såroverfladen. Bandagen må ikke overlape den omgivende hud.
6. Lad altid et stykke af bandagen stikke ud ved kavitetssår og fistler, så den er nem at fjerne igen.
7. Anvend en passende sekundærbandage.
8. Bandagens skiftetofrekvens afhænger af sårets ekssudatniveau samt sårets og den omgivende huds generelle tilstand. Bandagen kan sidde i op til 7 dage, hvis den kliniske tilstand tillader det.



SORBACT® – FOREBYGGER INFEKTION

Sorbact® bakteriebindende bandage forebygger og behandler sårinfektioner ved at reducere den mikrobiologiske belastning i såret på naturlig vis. Mikroorganismene bindes irreversibelt til bandagens overflade og fjernes, når bandagen skiftes.