


STOMASAFE CLASSIC

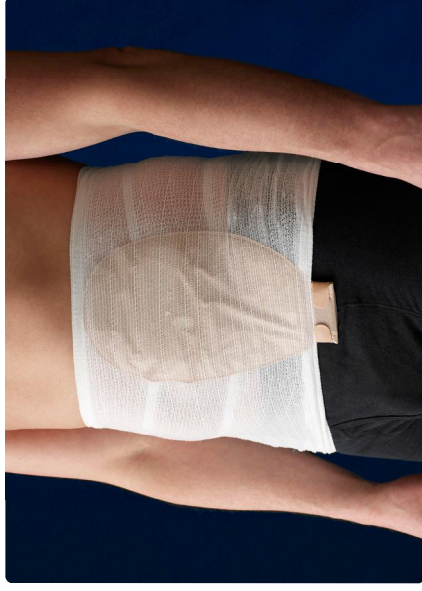

Velegnet når der er brug for let støtte til posen f.eks. under søvn og til jævn fordeling af indhold i posen.



FAKTA

- Tube i tyndt materiale
- Består af to lag, hvor det inderste lag har et hul til posen, og det yderste lag holder posen fast, så den ikke bevæger sig
- Forhindrer at udløbet snor sig ved brug af opsamlingspose

STØRRELSE	MÅL OMKR. MAVEN V/STOMIEN	BESTILLINGSNUMMER HVID
Small	80 - 100 cm	500052-01
Medium	95 - 115 cm	500052-03
Large	105 - 130 cm	500052-05
X-large	115 - 145 cm	500052-07

MÅLTAGNING OG ANVENDELSE

- Tag et mål hen over stomien rundt om maven
- Tag tuben på, og træk posen ud gennem hullet i det inderste lag
- Træk dernæst det yderste lag op over posen, så den ligger i lommen