



Tryghed og viden

– for menneskers skyld

Datablad

3M™ Tegaderm™ Foam

Produktbeskrivelse:

3M Tegaderm™ Foam er en stærk absorberende, åndbar, ikke-klæbende sårforbinding. Den er sammensat af en polyuretan skum belagt med en åndbar film. Filmen virker som en væske-, bakterie- og virusbarriere og hindrer såreksudat at trænge igennem. Forbindingen bibeholder et fugtigt sårmiljø, som fremmer sårhelingen.

Egenskaber:

- Til moderat og kraftigt væskende sår
- Hurtig absorption af sekret
- Ikke-svulmende - skumpuden svulmer ikke op
- Barriere mod gennemtrængning
- Barriere mod bakterier og virus
- Bred vifte af størrelser og design

Fordele:

- Nem at anvende, nem at fjerne
- Lang anvendelsestid
- Hæfter ikke i sår

Indikationer:

- Tryksår
- Venøse bensår, inkl. under kompressionsbandage
- Overfladiske sår
- Neuropatiske, diabetiske sår
- Hudafskrabninger
- Donorsteder ved hudtransplantationer
- Tracheostomi
- Sårstadiet II, III og IV

Advarsel:

Brug ikke forbindingen i kombination med oxiderende midler, såsom brintoverilte. Opløsninger af denne type kan påvirke strukturen og dermed effekten af den polyuretane skum.



3M

Brugsvejledning:

- Tag skumforbindingen ud af pakken og centrer den over såret med forbindingens påtrykte gitter vendt opad.
- Placer forbindingen over såret, således at forbindingens kanter rækker ud på områder med intakt hud. Forbindingen kan afklippes og hermed tilpasses sårets størrelse eller tilpasses sårets konturer.
- Fastgør derefter med tape, Tegaderm™ - eller Coban™/Coban™ LF selvhæftende bind eller benyt andre metoder.

Deklaration:

- Polyuretan skum.
- Skiftetofrekvens: Maks. 7 dage

Bestillingsinformation

3M™ Tegaderm™ Foam Dressing

Varenr.:	Størrelse cm x cm	Antal/æske	Æsker/karton
90600	5,0 x 5,0	10	4
90601	10,0 x 10,0	10	4
90602	10,0 x 20,0	5	6
90603	20,0 x 20,0	5	6
90604 tracheostomi	8,8 x 8,8	10	4
90605 rulle	10,0 x 60,0	1 rulle	6 ruller

DS53/000197-3