



Tryghed og viden

– for menneskers skyld

## Datablad

# 3M™ Tegaderm™ HP

### Produktbeskrivelse:

3M Tegaderm™ HP er en steril film til sår og sårbehandling. Den består af en tynd, transparent, semipermeabel film som giver god hudbeskyttelse og sikrer en fugtig sårheling. Tegaderm™ serien er udviklet i forskellige størrelser og design for at imødekomme en god forbindelse til vanskelige bandagerbare steder.

### Egenskaber:

- Kan anvendes i op til 7 dage
- Bevarer et fugtigt sårhelingsmiljø
- Beskytter mod udefra kommende bakterier, væsker og virus\*
- Elastisk
- Transparent. Inspektion af såret hindrer unødige skift af forbindingen, hvorved sårhelingen kan fortsætte uforstyrret
- Beskytter mod friktion
- Specielt design i form af oval eller sacral pasform gør det lettere at forbinde vanskelige bandagerbare steder, så som albuer, hæle, sacrum og hofterne

\*Laboratory testing has proven Tegaderm and Tegaderm HP transparent dressings provide a barrier against HIV-1 and HBV while the dressings remain intact without leakage.

### Fordele:

- Fremragende klæbeevne
- Nem at applicere med rammesystem
- Tilpasser sig nemt til vanskelige kropskonturer
- Risiko for maceration nedsættes, da ilt trænger igennem forbindingen, samtidig med at fugten kan komme ud.
- Nem at fjerne

### Indikationer:

- Rene kirurgiske sår
- Donorsteder
- Tryksår stadie I og II
- Yderforbinding over alginater, hydrogeler og hydrofibre
- Overfladiske sår, som hudafskrabning, blæner, rifter og snitsår



**3M**

**Indikationer:**

- 1. og 2. grads forbrændinger
- Forebyggende hudbeskyttelse
- Anvend 3M Tegaderm™ + Pad med en absorberende forbindelse, hvor det er nødvendigt på grund af store mængder sekretion
- Anvend 3M Tegaderm™ HP ved særligt krævende situationer med meget fugtig hud (febril patienter eller svedende patienter). Tegaderm™ HP har en ekstra god klæbeevne.

OBS: Anvendelse af enhver forbindelse til sår bør indgå i en veldefineret protokol for sårbehandling til forebyggelse af infektion.

**Brugsvejledning:**

- Vælg det rette produkt i Tegaderm™ serien
- Rens såret og den omkringliggende hud. Applicér altid Tegaderm™ på tør, ren hud
- Åben pakningen og fjern den sterile forbindelse
- Fjern den fortrykte liner fra klæbefladen
- Placer forbindingen over sårområdet og applicer fra midten og udefter. (forbindingen må aldrig strækkes inden applicering)
- Fjern rammen omkring filmen. Følg den med en finger rundt langs med kanten, herved undgås kantrulninger og unødige forbindelskift undgås
- Notér datoen for forbindelskift på tapeetikken eller i sårjournalen

**Deklaration:**

- Film: Polyurethan
- Klæbestof: Akrylatklæber

**Bestillingsinformation****3M™ Tegaderm™ HP**

| Varenr.: | Størrelse i cm | Antal/æske | Æsker/karton |
|----------|----------------|------------|--------------|
| 9534HP   | 6 x 7 cm       | 100        | 4            |
| 9536HP   | 10 x 12 cm     | 50         | 4            |
| 9543HP   | 11 x 12 cm     | 12         | 4            |
| 9545HP   | 5,4 x 6,4 cm   | 50         | 6            |
| 9546HP   | 10 x 11,5 cm   | 50         | 4            |
| 9548HP   | 14 x 16,5 cm   | 10         | 8            |