



Nitrilhandsker, pudderfri

Varenummer 290431, 3924-3927

Excellent Nitrilhandsker, pudderfri



Beskrivelse

Undersøgelsehandske i nitril (Nitrile Butadiene Rubber)

Pudderfri

Usterile

Blå

Lang manchet

Mikroteksturerede fingerspidser

Med rullekant

Egnet til håndtering af fødevarer

Produceret for Abena A/S, DK, i Malaysia under ISO 9001, ISO 13485, ISO14001

CE

Dual CE-mærket i henhold til EU direktiv 93/42/EEC, EU regulativ 2017/745, klasse I og 89/686/EEC PPE Regulative EU2016/425, Type B certification fra April 2019.

Class I og CAT III

AQL 1,0 i henhold til EN 455-1

Standarder

EN 455-1, 2, 3 & 4

EN 374-1:2016

EN 374-2:2015

EN 374-3:2003

EN 374-4:2013

EN16523-1:2016

EN 374-5:2016 VIRUS

EN 420:2003 + A1 2009

ASTM D6978-05:2013

ASTM D6319-10:2015

ASTM D6124-06:2011

ASTM F1671-13

Opbevaring og håndtering:

Opbevaring: 5-40°C

Undgå varme, fugt, stærkt lys og ozon

Holdbarhed: 5 år fra produktionsdato.



Nitrilhandsker, pudderfri

Varenummer 290431, 3924-3927

Fysiske egenskaber

Brudstyrke:
Før belastning 9 Newton
Efter belastning ved 70°C i 166 timer 6 Newton

Strækkevne:
Før belastning min. 500%
Efter belastning ved 70°C i 166 timer min. 400%

Tykkelse

Håndfladen 0,09 mm (+/- 0,02)
Fingrene 0,14 mm (+/- 0,02)

Størrelser	Varenr.	Int. Str.	Håndfladen mm (+/- 5)	Længde mm (+/- 5)	Forpakning
Xsmall	290431	5-6	76	300	100/1000
Small	3924	6-7	86	300	100/1000
Medium	3925	7-8	98	300	100/1000
Large	3926	8-9	107	300	100/1000
Xlarge	3927	9-10	115	290	100/1000

Test udført

Luft og vand test
Sensibiliseringstest
Irritationstest
Cytotoksitet
Restkemikalier
Brudstyrke
Mikrobiologi
Gennemtrængningstid
Pudderrester
Virusgennemtrængning
Bakterie og svampe
Fødevaregodkendelse (se separat fødevaredatablad)
Kemikalie, cytostaika, antibiotika gennemtrængning (se liste)

Sammensætning/varedeklaration:

Kemikalie	CAS
Nitrile NBR	9010-81-5
Sodium Dodecylbenzenesulfonate (SDBS)	85117-50-6
Sulphur	7704-34-9
Zinc oxide	1314-13-2
ZDBC	136-23-2
Titanium dioxide	13463-67-7
Wax Emulsion	-
Pigment	147-14-8 & 6358-30-1

Nitrilhandsker, pudderfri

Varenummer 290431, 3924-3927

Kemikalie	CAS nummer	Gennemtrængningstid	Klasse
1,2 dichloroethana		<1 min.	0
2-Hydroxyethyl methacrylate 97%		10 min.	1
0.5 M iodine solution	7553-56-2	>480 min.	6
2-Mercaptoethanole	60-24-2	3 min.	0
Acetic Acid 10%		241 min.	5
Acetonitrile >99%	75-05-8	<1 min.	0
Acrylamide 40%	79-06-1	>480 min.	6
Ammonia 25%	1336-32-6	13 min.	1
Chlorine 1.000 ppm		>480 min.	6
Chlorhexidine 4%	55-56-1	>480 min.	6
Chlorhexidine Gluconate 4%	18472-51-0	>480 min.	6
Citric Acid 15%		>480 min.	6
Cyclohexanol	108-93-0	68 min.	3
Dichloromethane >99%	75-09-2	<1 min.	0
Diethylamine	109-87-7	<1 min.	0
Diurethane dimethacrylate		320 min.	5
Ethanol 70 %	64-17-5	87 min.	3
Ethanol 80 %	64-17-5	15 min.	1
Ethidium bromide 1%	1239-45-5	>480 min.	6
Ethyl Acetate >99%	141-78-6	<1 min.	0
Formamide 40%	75-12-7	>480 min.	6
Formaldehyde 37% in Methanol 10%	50-00-0	>120 min.	3
Formaldehyde/Formalin 37%	50-00-0	>480 min.	6
Formic Acid 12,5%	64-18-6	240 min.	4
n-Hexane	110-54-3	>480 min.	6
Hydrochloric acid 36%	7647-01-0	140 min.	4
Hydrofluoric acid 40%	7664-39-3	6 min.	0
Hydrogen peroxide 3%	7722-84-1	>480 min.	6
Hydrogen peroxide 30%	7722-84-1	31-45 min.	2
Isopropanol 45%	67-63-0	>480 min.	6
Isopropanol 70%	67-63-0	55 min.	2
Isopropanol 100%	67-63-0	3 min.	0
Methanol 5%	67-56-1	>480 min.	6
Methanol 10%	67-56-1	30 min.	1
Methyl methacrylate		< 1 min.	0
Nitric acid 10%	7697-37-2	>480 min.	6
n-heptane	142-82-5	80 min.	3
n-Propanol		4 min.	0
Peracetic acid 38%	79-21-0	9 min.	0
Phosphoric acid 30%	7664-38-2	>480 min.	6
Perchloric acid 70 %		92 min.	3
Petroleum – distilled		5 min.	0
Phenol 90%		9 min.	0



Nitrilhandsker, pudderfri

Varenummer 290431, 3924-3927

Potassium hydroxide 30%	1310-58-3	>480 min.	6
Povidone iodine 10%	25655-41-8	>480 min.	6
Rely+On™ Virkon® (Solution of potassium Peroxymonosulphate)	70693-62-8	>480 min.	6
Silver nitrate 10%	7761-88-8	>480 min.	6
Sodium carbonate 5%		>480 min.	6
Sodium hydroxide 40%	1310-73-2	>480 min.	6
Sulphuric acid 50%	7664-93-9	>480 min.	6
Sulphuric acid 96%	7664-93-9	8 min.	0
Tri(ethylene glycol) dimethacrylate 95%		33 min.	1
O-Xylene >99%	95-47-6	<1 min.	0

Cytostatika

Flourouracil – 50.000 ppm		>480 min.	6
Carmustine 3.300 ppm		96 min.	3
Cisplatin 1.000 ppm		>480 min.	6
Cyclophosphamide 20.000 ppm		>480 min.	6
Dacarbazine 10.000 ppm		>480 min.	6
Doxorubicin Hydrochloride 2.000 ppm		>480 min.	6
Etoposide 20.000 ppm		>480 min.	6
Methotrexate 25.000 ppm		>480 min.	6
Mitomycin C 500 ppm		>480 min.	6
Paclitaxel (taxol) 6.000 ppm		>480 min.	6
Thio-Tepa 10.000 ppm		>480 min.	6
Vincristine sulfate 1.000 ppm		>480 min.	6
Mitoxantrone 2.000 ppm		>480 min.	6
Epirubicin 2.000 ppm		>480 min.	6

Antibiotika

Cefuroxim 15.000 ppm		>480 min.	6
Dicloxacilin 10.000 ppm		>480 min.	6
Gentamicin 1.200 ppm		>480 min.	6

Testet iht EN 374-3:2003 og EN16523-1:2015