

Aquaflush®

Enkelt og effektivt

Transanal irrigation med Aquaflush®
konus-baseret rektalt system



Clinisupplies



**Aquaflush® giver tryghed
og mulighed for at
leve mere frit.**



Aquaflush® Enkelt og effektivt

Enkelt at anvende med et diskret nyt look, med den samme positive oplevelse.

Produktet er samlet og klar til brug. Unikt design med enkel indføring.


En serie med bløde silicone konusser for komfort.

Tre størrelser med hver deres volumen. Mini, Midi og Maxi for individuel tilpasning.



Unikt design for enkel anvendelse

Alle Aquaflush® systemer kommer samlet og er klar til brug.
Dette sikrer patienten et enkelt og effektivt system.

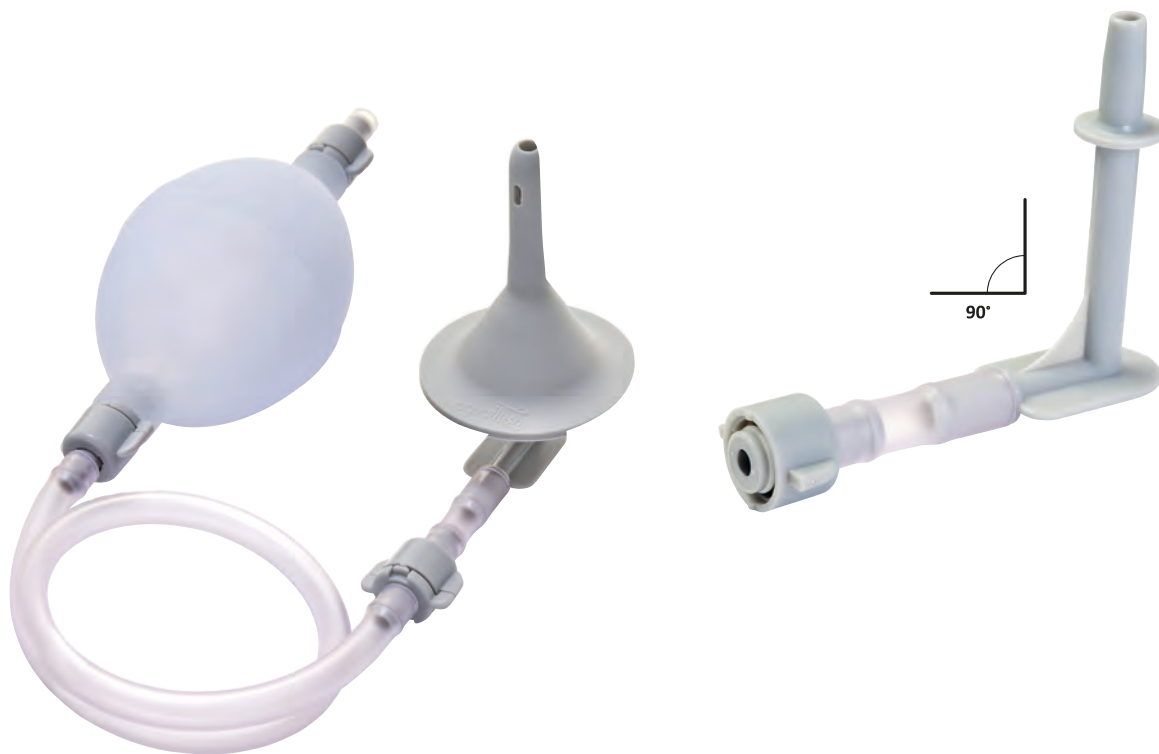

Designet med **patienten for øje.**

Unik albue-konnektor gør det **lettere at indføre konus og sidde på toilettet mens der irrigeres.**

90° vinklet albue-konnektor gør det muligt, at udføre TAI ergonomisk, også for en evt. hjælper.

Aquaflush®
Lev mere frit



Tre volumen mængder for individuel tilpasset irrigation



Mini

Compact – 120 ml

Sivende afføring/soiling
efter udskillelse

Skylning af rektal stump



Midi

Compact+ – 250 ml

Skylning af rektal stump

Tarm-inkontinens, passiv sivende afføring

Sivende afføring/soiling efter udskillelse

Rectocele – fremfald af tarmen ind i vagina

Tømningsbesvær i forbindelse med udskillelse

Startbesvær i forbindelse med udskillelse

Low Anterior Resection Syndrome (LARS)
(efter fjernelse af tumor i endetarmen)



Maxi

Lite, Actif & SRC – 1.2 L

Tarm-inkontinens

Forstoppelse (langsom passagetid/
funktionel/idiopatisk baggrund)

Neurogen (Rygmarvsskadet/MS,
Parkinsons, Spina Bifida,
Cauda Equina)

Kolostomi irrigation – med Actif

Low Anterior Resection Syndrome (LARS)
(efter fjernelse af tumor i endetarmen)

Tre konusser for at imødekomme dine patienters behov

Aquaflush® konus er lavet af medicinsk silikone og har tre åbninger, der sikrer optimal vandflow i tarmen.
Konus er blød og afrundet i spidsen, som sikrer komfortabel indføring.



Kort Konus
– til brug fra 3 år




Standard Konus



Selvsiddende Konus
– SRC


Aquaflush® Mini Compact er ideel, hvis du kun har brug for en mindre vandmængde for at skylle din endetarm efter toiletbesøg/udskillelse. Dette kan forebygge sivende afføring og soiling (bremsespor).

120 ml vand kan skylle endetarmen.

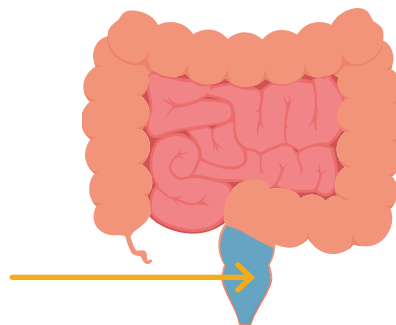

Aquaflush® Midi Compact + er ideel til dig, der oplever en mangelfuld tømning i forbindelse med toiletbesøg/udskillelse. Dette kan hjælpe dig med at opnå en mere effektiv og komplet tømning.

250 ml vand kan skylle endetarmen og den første lave del af tyktarmen.

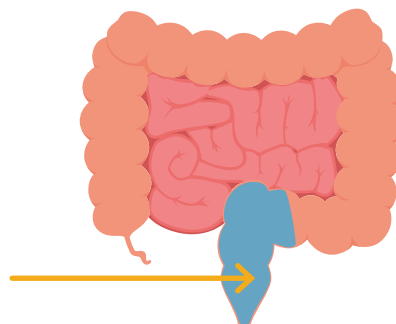



Aquaflush® Maxi system Lite, Actif eller SRC

Ideel til dig, som har brug for at kunne skylle højere op i tarmen.

Dette gøres for at opnå en skylning af tarmen helt op til venstre bøjning. (se illustrationen)

Du kan anvende systemet med **passivt indløb** over skulderhøjde efter ophæng eller **aktivt indløb** ved brug af pumpefunktionen.

Op til **1200 ml vand** kan skylle op til venstre bøjning i tyktarmen. Dette kaldes for højt skyl.

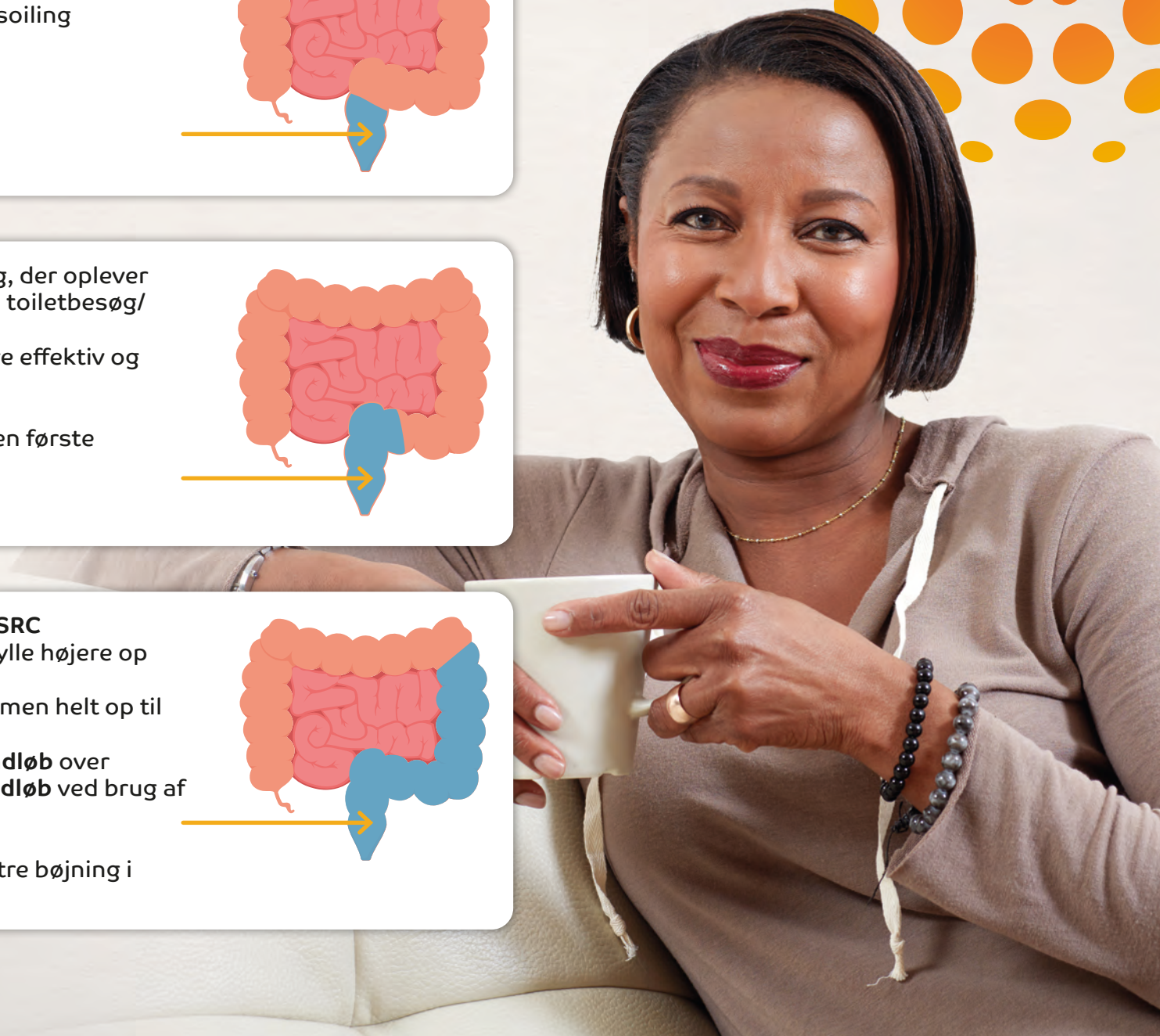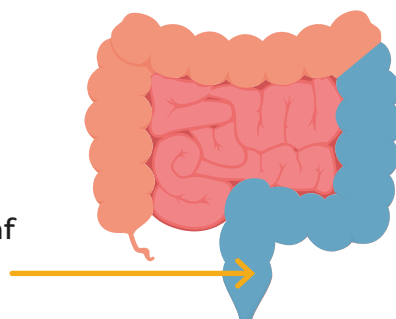

Kom godt igang med irrigation

Klargør systemet efter instruktionen i pakken. Fyld hele systemet med kropstempereret vand.

- 1** Ideelt bør transanal (TAI) irrigation udføres siddende på et toilet eller en bækkenstol.
- 2** Det kan udføres en gang dagligt eller hver anden dag. Skyl på ca. samme tidspunkt af dagen. Dette hjælper med at give en god rytme i fordøjelsen og udskillelsen.
- 3** Konus kan smøres med medfølgende glidemiddel for en bedre komfort og mindre friktion, når konus føres ind i endetarmen.
- 4** Vandmængde; Følg altid den anbefaling, der er givet under oplæring. Når vandet indføres i tarmen, bør det indføres i samlet mængde for optimal effektivitet. Almindelig anbefaling for tid, der bruges til vandets indføring er; For volumen op til 250 ml ca. 2-4 min. For volumen op til 1000 ml ca. 6-8 min.
- 5** Når vandet er ført ind i tarmen, kan konus fjernes kort efter. Derefter anbefales det, at sidde hensigtsmæssigt på toilettet, for at lette udskillelsen. (se illustration)
Sid afslappet og lad tarmen udskille vand og afføring i rolige omgivelser. Ofte tømmer tarmen sig af ca. 2-3 omgange.
- 6** Tag god tid til at udføre irrigationen især i starten.
Med rutinen anvendes mindre tid på selve udførelsen af skylningen.
- 7** Når transanal irrigation opstartes, kan der gå fra 1-3 måneder, før det kan forventes, at fuld effekt af rutinen er opnået.



Tal med din sundhedsprofessionelle kontaktperson om de oplevelser du har med din irrigation. På den måde kan de bedst vejlede og rådgive dig, og derved hjælpe dig med at optimere effekten af din irrigation.



Ansøgning om transanal irrigations (TAI) udstyr som hjælpemiddel

I Danmark kan der ansøges om hjælpemidler efter serviceloven §112. Kommunen har ret til at bevilge det hjælpemiddel, der er bedst egnet og billigst.

Det betyder, at kommunen kan bevilge det hjælpemiddel, som tilfredsstillende kan løse funktionsnedsættelsen til den billigste pris, ud fra kommunens indkøbsaftale.

Derfor skal du være opmærksom på, at kommunen kan bede dig afprøve et alternativt hjælpemiddel end det hjælpemiddel, du er oplært i.

Ansøger kan ikke søge om et specifikt produkt. Det er egenskaberne i hjælpemidlet, som er det, der ansøges om bevilling til. Eksempel på egenskaber ved TAI udstyr: Hjælpemidlet er til højt eller lavt skyl, har konuskateter eller ballonkateter, kan udføre passivt eller aktivt indløb af vandet.

Du er, som ansøger, forpligtet til i udstrakt grad at bidrage med oplysninger, der er relevante for din ansøgning. Kan du selv videregive dine journaloplysninger, vil det kunne gøre behandlingstiden af ansøgningen mere effektiv. På denne måde skal myndighedspersonen ikke både indhente dit samtykke og derefter journalen fra sygehuset.

Afdæk følgende i ansøgningen til kommunen om bevilling af hjælpemidler:

- Dokumenteret afklaring af, at tilstanden er permanent.
- Hjælpemidlet skal kompensere for en nedsat funktionsevne. Dvs. at, når hjælpemidlet anvendes, så er den nedsatte funktionsevne kompenseret, og hvis man undlader at anvende hjælpemidlet, så er den nedsatte funktionsevne tilbage.
- Hjælpemidlet skal væsentlig afhjælpe den berørte. Dvs., at som udgangspunkt skal det være nødvendigt at anvende hjælpemidlet som minimum 3-4 gange i ugen.
- Hjælpemidlet skal føre til en væsentlig lettelse i den berørtes dagligdag og liv. Den pågældende har ret til at kunne føre et liv, som andre mennesker i samme alder og samme livssituation.

Det er en fordel for sagsbehandlingen at dokumentere i ansøgningen, hvilke hjælpemidler, der er afprøvet, forud for det hjælpemiddel, som ansøgningen omhandler.

Når det omhandler udskillelse og fordøjelse, er mennesker meget forskellige. Men en ting er sikkert, vi kan ikke eksistere uden at have en regelmæssig fordøjelse og udskillelse!

Udstyr til TAI anvendes med henblik på at kompensere for en nedsat funktionsevne, der ofte vedrører tarmkontinens eller forstoppelse (funktionel/neurologisk).

Det ikke at kunne styre sin udskillelse i forbindelse med tarmkontinens, påvirker det enkelte menneskes dagligdag i væsentlig grad.

Det kan påvirke arbejdsevnen, føre til social isolation, samt være medudløsende årsag til psykiske udfordringer og depression.



Aquaflush®

Aquaflush® Mini Compact standard konus

Varenummer	Indhold	Beskrivelse
AFCS	Pumpe, Forlængerslange, 5 Konus, Toilettaske, glidemiddel	Startsæt
AFCM	Pumpe, forlængerslange, 15 konus, glidemiddel	Månedssæt
AFEXTN	2 forlængerslanger	Forlængerslange
AFLA	15 standard konus	Konus refill pakke

Aquaflush® Maxi Lite – standard konus

Varenummer	Indhold	Beskrivelse
AFLS	Vandpose,pumpe, 7 konus, Toilettaske, glidemiddel	Startsæt
AFLM	Vandpose, pumpe, 16 konus, glidemiddel	Månedssæt
AFEXTN	2 forlængerslanger	Forlængerslange
AFLA	15 standard konus, glidemiddel	Konus refill pakke

Aquaflush® Maxi (SRC) – Selvsiddende konus

Varenummer	Indhold	Beskrivelse
AFSRCS	Vandpose, pumpe, 5 konus, Toilettaske, glidemiddel	Startsæt
AFSRCM	Vandpose, pumpe, 15 konus, glidemiddel	Månedssæt
AFEXTN	2 forlængerslanger	Forlængerslange
AFSRCA	15 Selvsiddende konus (SRC), glidemiddel	Konus refill pakke

Aquaflush® Midi Compact+ standard konus

Varenummer	Indhold	Beskrivelse
AFCS	Pumpe, Forlængerslange, 5 Konus, Toilettaske, glidemiddel	Startsæt
AFCPM	Pumpe, forlængerslange, 15 konus	Månedssæt
AFEXTN	2 forlængerslanger	Forlængerslange
AFLA	15 standard konus, glidemiddel	Konus refill pakke

Aquaflush® Maxi Actif – kort konus

Varenummer	Indhold	Beskrivelse
AFAS	Vandpose, pumpe, 5 konus, Toilettaske, glidemiddel	Startsæt
AFAM	Vandpose, pumpe, 15 konus, glidemiddel	Månedssæt
AFEXTN	2 forlængerslanger	Forlængerslange
AFSC	15 korte konus, glidemiddel	Konus refill pakke

**HARDAM**

www.hardam-shop.dk

Telefon: 97 42 32 33





Leverandør af hjælpemidler.

At være leverandør af hjælpemidler og rådgivning er en tillidssag!

Derfor er der frit leverandør-valg i DK.

Kontakt vores kundeservice, hvis du ønsker at høre mere om, hvordan du kan få Kirstine Hardam A/S, som leverandør og dermed få muligheden for, at få glæde af rådgivning og den høje faglige service, vi tilbyder vores kunder.

Hurtig, sikker og diskret
hjemmelevering



CS23652_v4



Clinisupplies



For at bestille produkter:

www.hardam-shop.dk

Mail:

post@hardam.dk

Telefon:

97 42 32 33



Kirstine Hardam's kundeservice vil hjælpe dig og din sundhedsfaglige kontaktperson med at finde og bestille det rette Aquaflush® system for dig.