

Peristeen®

Peristeen® Analprop

For personer med luft- eller afføringsinkontinens

Peristeen Analprop er

- Udviklet til at forhindre lækage og reducere lugtgener
- Konstrueret til at tillade diskret luftafgang
- Formet til at sidde sikkert og stabilt under brug

Fri for
latex
og PVC



Peristeen Analprop

– er et enkelt og effektivt hjælpemiddel, der sætter en stopper for et stort problem: Luft- eller afføringsinkontinens.

Analproppen kan bruges af personer med luft- og afføringsinkontinens og fungerer ved at holde afføringen tilbage i endetarmen.

Analproppen kræver en kort tilvænningsperiode, hvis man har normal følelse i endetarmsområdet. For dem, der har nedsat eller ødelagt følelse, vil det kun i få tilfælde være nødvendigt med en tilvænningsperiode.

Afføringen skal helst være fast og formet. Det anbefales ikke at bruge analproppen ved diarré.

Blødt materiale

Peristeen Analprop er fremstillet af et blødt og behageligt skummateriale, der bevarer sin blødhed i brug, og tillader luft at passere. Produktet er fremstillet af materialer, der er fri for både latex og PVC.

Simpel håndtering

Analproppen holdes sammenpresset af en vandopløselig film. Når proppen føres op i endetarmen, kommer filmen i kontakt med varme og fugt fra tarmen, hvorefter den opløses. Dette sker i løbet af 30 sekunder.

Effektiv i brug

Peristeen Analprop indsættes med fingeren og folder sig ud inde i tarmen og bliver 3-4 gange større end den oprindelige størrelse. Den tager form efter tarmvæggen og beskytter således mod utæthed. Det betyder også, at risikoen for hud- og lugtgener reduceres betydeligt.

Proppen kan sidde i tarmen i op til 12 timer.

To størrelser

Da to mennesker ikke er ens, findes analproppen i to størrelser: Lille og stor. Det anbefales at prøve begge størrelser for at finde den, der passer bedst.

Tilbehør

Peristeen Analprop leveres med en tube gel, som smøres på spidsen af proppen for at lette indføringen.

Må ikke anvendes til

- Anal stenose.
- Hæmorider (tredje og fjerde grad).

Varetekst	Varenummer	Længde	Diameter	Diameter udfoldet	Antal i pakken
Peristeen Analprop, lille	1450	26 mm	12 mm	37 mm	20 stk, 1 stk. gel
Peristeen Analprop, stor	1451	26 mm	13 mm	45 mm	20 stk, 1 stk. gel