



# ENFit<sup>®</sup>

## LAVDOSIS ENTERAL SPRØJTE MED ENFit-KONNEKTOR TIL ENTERAL BRUG.

## BRUGSANVISNING

### BESKRIVELSE AF ENHEDEN

Enteral sprøjte med ENFit-konnektor.

### TILSIGTET ANVENDELSE

Medicinas enterale ENFit-sprøjter kan anvendes til enteral sondenæring, aspiration, skylning og enteral indgivelse af lægemidler hos alle patientgrupper med behov for sondenæring. Der er to typer ENFit-sprøjter: En, som er beregnet til brug på hospitaler, og en sprøjte til flergangsbrug, som er beregnet til brug i patientens hjem. Begge typer er konstrueret til at reducere risikoen for forkert påsætelse af den enterale sonde.

### BRUGSANVISNING

ENFit-sprøjter monteres på gastrointestinale indføringssystemer, f.eks. gastriske/nasogastriske enheder, for at tilføre ernæring eller lægemiddel til patienter, som fysisk ikke er i stand til at spise eller sluge af forskellige fysiologiske årsager. De kan også bruges til skylning af gastrisk indhold hos patienter.

### TILSIGTET BRUGER


Medicinsk personale og/eller medarbejdere med relevant uddannelse til hjemmebrug.

### KONTRAINDIKATIONER

Sprøjten er ikke beregnet til parenteral brug.

### ADVARSLER/FORHOLDSREGLER

- Må ikke genanvendes eller genbehandles, da det kan medføre lækage eller infektion.
- Sprøjten er kun beregnet til brug hos én patient.
- Undlad af anvende sprøjten, hvis emballagen er åben, spidsen har synlige skader eller sprøjten er beskadiget.
- Hvis der kommer væske ind i sprøjtes spids eller hulrummet på lavdosis-sprøjter, skal det fjernes ved, at man banker let på sprøjten. Ved brug af et pumpesystem kan forkert valg af sprøjte eller sprøjteprofil i en pumpemenu føre til unøjagtig administration til patienten.

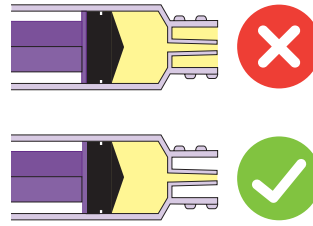

### ANVISNINGER

- Følg altid protokollen for brug af enterale sprøjter, sådan som det er angivet af en læge eller sygeplejerske.
- Sprøjten skal monteres på en han-ENFit-kompatibel konnektor under fyldning, administration OG andre stempelhandlinger for at reducere risikoen for unøjagtig doseringsmængde. Medicina fraråder brug af "cupfill"-teknikken til fyldning af sprøjter.
- Tryk stemplet helt ned inden fyldning. Træk væske ind i sprøjten. Brug den fremtrædende kant på den sorte pakning for nøjagtig måling. Fyldning over maks.-mærket frarådes.
- Luftbobler fjernes ved at holde sprøjten med spidsen pegende opad og banke let på sprøjten, så boblerne stiger op mod spidsen. Derefter trækkes stemplet lidt tilbage, hvorefter det presses opad for at udskyde luften ind i cylinderen og spidsen. Gentag, indtil boblerne er fjernet.
- Brug med det samme eller sæt beskyttelseshætten på og afmærk sprøjten, indtil den skal bruges.

### BORTSKAFFELSE

Bortskaf sprøjten i henhold til hospitalets regler. Ved brug i private hjem bortskaffes sprøjten med husholdningsaffaldet, eller kontakt evt. de lokale sundhedsmyndigheder.

### OPBEVARINGSFORHOLD



Opbevares tørt



Opbevares beskyttet mod sollys

### SYMBOLER PÅ MÆRKATER



Steriliseret med ethylenoxid



Engangsbrug



Må ikke resteriliseres



Advarsel



Se brugsanvisningen

### RECEPTPLIGTIG



Advarsel: Enheden må kun sælges til eller på henvisning af en læge



Må ikke anvendes, hvis emballagen er beskadiget



Fremstillet uden brug af ftalater, blødgøringsmidler og BPA



Indeholder ikke naturligt gummi



HMC Premedical S.p.A

Via Bosco 1/3,  
41037 Mirandola (MO) – Italien



0120



MEDICINA LTD.

Unit 2-4, Rivington View  
Business Park, Station Road,  
Bolton BL6 5BN, Storbritannien.



1639

ENFit er et registreret varemærke tilhørende GEDSA, som anvendes med dennes tilladelse.  
ENFITPELDIFU008DN1639UKCA

