

Begynd med selvsikkerhed, Start med **FLOWASSIST**.



Forbedret brugervenlighed

Ingen yderligere tillæg til hulstørrelsen er påkrævet



Forbedret Produktpræstation

Øget beskyttelse af klæbematerialet fra FLOWASSIST-delen



Mere diskret lavere profil

Tætningsringens tykkelse er reduceret til 2 mm

HVORDAN FUNGERER DEN

FLOWASSIST er en fleksibel ikke-absorberende nedløbsdel, som skærmer huden og det hydrokolloide materiale fra absorption og nedbrydning.

FLOWASSIST-nedløbet leder output ind i posen for at **forhindre lækage** og give **bedre hudbeskyttelse**.

Delt Modellerbar Hydrokolloid


Den delte tætningsring kan modelleres og tilpasses for en præcis og sikker pasform.

FLOWASSIST

Den ikke-absorberende nedløbsdel skærmer huden og det hydrokolloide materiale fra overdreven absorption og erosion/nedbrydning.

FLOWASSIST Nedløbet

Leder output væk fra huden og ned i posen.

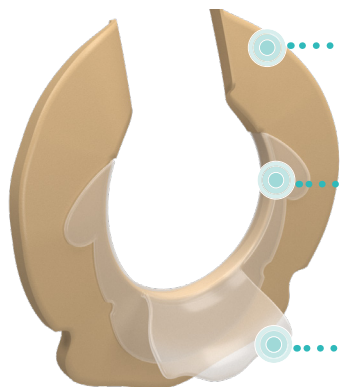

FORDELE VED FLOWASSIST



- ✓ Forbedret lækagebeskyttelse
- ✓ Beskyttelse af det hydrokolloide materiale for forlænget bæretid
- ✓ Hudens sundhed forbedres
- ✓ Bedste sikkerhed og komfort

FLOWASSIST er designet til at forebygge hudirritationer ved alle typer af stomi.

Dokumenteret effekt i stomiplejen

Kliniske undersøgelser viser betydelige forbedringer i **peristomal hudsundhed, forlænget bæretid og positive brugeroplevelser.**



Læs om de kliniske undersøgelser



"FLOWASSIST-ringen har været en **game-changer** for hver patient, jeg har afprøvet den på. Jeg har den på lager på hospitalet nu."

Lisa, Sundhedsprofessionel, USA

MONTERINGS GUIDE

1 Vask dine hænder og sørg for, at huden omkring din stomi er ren og tør. Varm tætningsringen i dine hænder i 30 sekunder, og fjern dækfilmen.

2 Placer FLOWASSIST-nedløbet under stomien, eller drej for at flugte med åbningen af stomien. Du kan holde i nedløbet for at hjælpe med at placere tætningsringen.

3 Saml enderne af tætningsringen rundt om stomien og sørg for, at enderne overlapper hinanden.

4A **4B** Klargør din poses åbning efter producentens anvisning. Sørg for, at FLOWASSIST-nedløbet er helt inde i poseåbningen. Træk derefter 1-dels pose (se figur 4A) eller 2-dels system (se figur 4B) op under nedløbet, så langt det kan komme.

5 Tryk let på posen for at opnå sikker vedhæftning.

6 Undgå så vidt muligt at efterlade synlig klæber fra tætningsringen. Hvis du bemærker, et område af tætningsringens klæber er blottagt, så prøv at justere posen, så den dækker dette område.

Se hvordan tætningsringen tilpasses ved montering.

Størrelse	Varenummer	Stomistørrelse
Small	OFA-S	15-23 mm
Medium	OFA-M	23-30 mm
Large	OFA-L	30-40 mm

BRUG FOR HJÆLP? **HARDAM**

Har du yderligere spørgsmål, kan du kontakte Hardams kundeservice på telefon 97 42 32 33 eller mail: post@hardam.dk



www.ostoform.com