



Clinisupplies

Aquaflush®

Transanal Irrigations System


Maxi Lite, SRC & Actif

Quick Start Guide



Quick start guide til Aquaflush® Transanal Irrigations system:

Maxi Lite, SRC & Actif

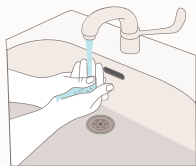

- 1.** Vask dine hænder før du starter din irrigation. Sørg for at du har alt, hvad du behøver tæt på.




Før du starter: Sørg for, at den orange hane på slangen er lukket i vandret position på tværs af slangens forløb.



- 2.** Skru vandposens låg af og fyld posen op med kropstempereret vand (37-38°). Se temperaturstrimmel. Fyld gerne mere i end den mængde du forventer at anvende. Sæt konus fast på albue-konnektoren.



**Stående -
Aktivt indløb**

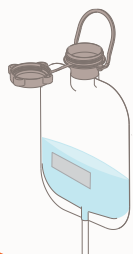


**Hængende -
Passivt indløb**


- 3.** Forbered systemet ved at fylde slangen med vand, inden du går i gang. Det gør du ved at åbne den orange hane på slangen, indtil vandet kommer ud af konus. Luk herefter indtil du skal begynde din irrigation. Dit Aquaflush® system er klar til brug.

Stående på gulv eller kommode - Placer vandposen på en flad overflade eller på gulvet ved hjælp af det medfølgende Aquaflush® posestativ. Aktivt indløb ved brug af pumpe.

Hængende - Passivt indløb ved hjælp af tyngdekraften. Hæng vandposen over skulderhøjde ved hjælp af den indbyggede bøjle og benyt S-krogen ved behov. Lad vandet løbe passivt ind i din tarm ved hjælp af tyngdekraften.

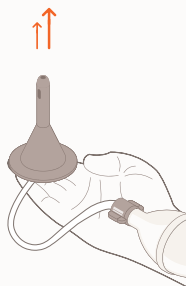


- 4.** Påfør det medfølgende vandbaserede glidemiddel på spidsen af konus og ved behov anus (endetarmsåbningen). Sid på toilettet med fødderne fladt på gulvet/taburet. Indsæt konus i anus. Konus indsættes forfra mellem dine ben, eller bagfra, fra siden, alt efter, hvad der føles bedst for dig. Hvis du bruger en selvsiddende konus (SRC) smør spidsen af konus og blod-kransen. Før konus helt ind og træk derefter forsigtigt lidt tilbage. Det vil gøre det muligt for blodkransen at sidde glat til endetarmsvæggen og blive på plads. Du kan give slip på konus, hvis du ønsker det.

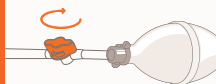

- 5.** Drej den orange hane til lodret/åben position, så den går langs med slangen. For aktivt indløb, klem forsigtigt på pumpen, indtil vandet kommer ud af konus. Du kan også indføre vandet passivt i din tarm, hvis du hænger vandposen op. Indførings tid af op til 1000 ml vand ca. 6-8 min.



- 6.** Når du har indført vandet, fjerner du konus efter kort tid, og bliver siddende på toilettet. Du kan opleve en hurtig strøm af vand med det samme, hvilket er normalt. Slap af og giv dig god tid. Sid korrekt på toilettet (se ill.). Det kan variere, hvor lang tid det vil tage for den enkelte at udskille vand og afføring efter brug af Maxi systemet.

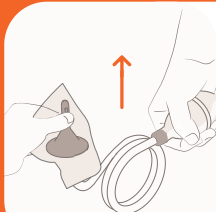

- 7.** Brug den medfølgende affaldspose til at fjerne konus fra albue-konnektoren. Bortskaf det i restaffald. Konus er et engangsprodukt.



- 8.** Til sidst frakobles pumpen, slangen og albue-konnektoren. Ryst det overskydende vand ud og lad det hænge og tørre. Det mindsker tilkalkning og risiko for algedannelse.

Aquaflush® Enkelt og effektivt

Aquaflush® Maxi kommer samlet, for at gøre din irrigationsoplevelse og opstart, så enkel som muligt.

Maxi Lite med standard konus

Beskrivelse	Varenummer	Indhold
Startsæt	AFLS	Toilettaske, vandpose, pumpe, 7 standard konus og glidemiddel
Månedssæt	AFLM	Vandpose, pumpe, 16 standard konus og glidemiddel
Forlængerslange	AFEXTN	2 forlængerslanger
Standard konus refill	AFLA	15 standard konus med glidemiddel

Maxi SRC med selvsiddende konus (SRC)

Beskrivelse	Varenummer	Indhold
Startsæt	AFSRCS	Toilettaske, vandpose, pumpe, 5 selvsiddende konus (SRC) og glidemiddel
Månedssæt	AFSRCM	Vandpose, Pumpe, 15 selvsiddende konus (SRC) og glidemiddel
Forlængerslange	AFEXTN	2 forlængerslanger
SRC konus refill	AFSRCA	15 selvsiddende konus (SRC) med glidemiddel

Maxi Actif med kort konus

Beskrivelse	Varenummer	Indhold
Startsæt	AFAS	Toilettaske, vandpose, pumpe, 5 korte konus og glidemiddel
Månedssæt	AFAM	Vandpose, pumpe, 15 korte konus og glidemiddel
Forlængerslange	AFEXTN	2 forlængerslanger
Kort konus refill	AFSC	15 korte konus med glidemiddel



Clinisupplies



For bestilling kontakt kundeservice på mail
post@hardam.dk

eller telefon

+45 97 42 32 33



www.hardam-shop.dk