

Navina Classic Produktinformation

Navina™ Systems er udviklet til at hjælpe voksne og børn fra 3-årsalderen, der lider af fækal inkontinens, kronisk forstoppelse og/eller tidskrævende behandling af tarmen.

Brugeren kan sidde i kørestol og/ eller have nedsat motorisk håndfunktion.

Ved at tilføje vand til tyktarmens nedre del, kan peristaltikken stimuleres, så tyktarmen og endetarmen tømmes. Børn skal ledsages af en voksen omsorgsperson, indtil denne mener, at barnet selvstændigt er i stand til at varetage proceduren.

- Konsultér altid en professionel sundhedsfaglig person, der er specialiseret i brugen af TAI, inden Navina Systems tages i brug.
- Anvend kun Navina Systems til dets formål, som beskrevet i denne vejledning.
- Navina Systems er til énpatientsbrug og bør ikke deles med andre.
- Navina Regular katetret må kun anvendes af voksne patienter.
- Navina Small katetret må kun anvendes sammen med det helt hvide Navina System.

Kontraindikationer

Du bør ikke anvende Navina™ Classic hvis du har én eller flere af følgende kontraindikationer:

- Kendt anal eller kolorektal forsnævring.
- Aktiv inflammatorisk tarmsygdom.
- Akut divertikulitis.
- Kolorektal cancer.
- Iskæmisk kolitis.
- Har fået foretaget et analt eller kolorektalt indgreb inden for de seneste 3 måneder.
- Har fået foretaget endoskopisk polypektomi inden for de seneste 4 uger.

Da listen med kontraindikationer ikke er fuldstændig, tager behandlerne også altid individuelle brugerfaktorer i betragtning.

Navina Classic Systems

Reference	Type	Specifikation
6900511	Navina Classic systemet Regular Kun til voksne	1 Navina Classic kontrolenhed 1 Vandbeholder 1 Vandslangesæt 2 Rektalkatetre Regular* 1 Navina taske 1 Tilbehørssæt
6900711	Navina Classic systemet Small Fra 3 år	1 Navina Classic kontrolenhed 1 Vandbeholder 1 Vandslangesæt 2 Rektalkatetre Small 1 Navina taske 1 Tilbehørssæt
6901711	Navina Classic systemet Cone Fra 3 år	1 Navina Classic kontrolenhed 1 Vandbeholder 1 Vandslangesæt 2 Cones 1 Navina taske 1 Tilbehørssæt

EN VELFUNDERENDE MAVE - ET GODT LIV



Navina Classic Systems forbrugsartikler

Reference	Type	Specifikation	Tekniske detaljer
6900611	Navina Classic System Regular refill	1 Navina Classic kontrolenhed 1 Vandbeholder 1 Slangesæt 2 Rektalkatetre Regular*	Kan anvendes 100 gange 1,5 liter, foldbar, dobbeltskala for synlighed Kan anvendes 15 gange Kan anvendes 100 gange Hydrofile éngangskatetre
6900811	Navina Classic System Small refill	1 Navina Classic kontrolenhed 1 Vandbeholder 1 Slangesæt 2 Rektalkatetre Small	Kan anvendes 100 gange 1,5 liter, foldbar, dobbeltskala for synlighed Kan anvendes 15 gange Kan anvendes 100 gange Hydrofile éngangskatetre
6901811	Navina Classic System Cone refill	1 Navina Classic kontrolenhed 1 Vandbeholder 1 Slangesæt 2 Cones	Kan anvendes 100 gange 1,5 liter, foldbar, dobbeltskala for synlighed Kan anvendes 15 gange Kan anvendes 100 gange Hydrofile éngangscones
6900310	Forbrugssæt Regular	1 Vandbeholder 15 Rektalkatetre Regular*	1,5 liter, foldbar, dobbeltskala for synlighed Kan anvendes 15 gange Hydrofile éngangskatetre
6900410	Forbrugssæt Small	1 Vandbeholder 15 Rektalkatetre Small	1,5 liter, foldbar, dobbeltskala for synlighed Kan anvendes 15 gange Hydrofile éngangskatetre
6901610	Forbrugssæt Cone	1 Vandbeholder 15 Cones	1,5 liter, foldbar, dobbeltskala for synlighed Kan anvendes 15 gange Hydrofile éngangscones
6894010	Rektalkatetersæt Regular*	10 Rektalkatetre	Hydrofile éngangskatetre
6894310	Rektalkatetersæt Small	10 Rektalkatetre	Hydrofile éngangskatetre
6901110	Slangesæt	1 Kateter- / coneslange 1 Vandbeholderslange	Kan anvendes 100 gange Kan anvendes 100 gange
6901200	Tilbehørssæt	2 Griberinge (1 lodret, 1 vandret) 1 Sikkerhedsbånd 1 Fikseringsbånd 1 Navina Smart fikseringsklemme	
6901311	Navina Classic kontrolenhed	1 Navina Classic kontrolenhed	Kan anvendes 100 gange

* Må kun anvendes til voksne
Alle Navina Classic komponenter skal kasseres som almindeligt husholdningsaffald.

wellspect.dk

