




SÅRBEHANDLING  
INTENSIVPLEJE  
STOMIPLEJE  
UROLOGI  
OPERATION  
FIXATION

# DuoDERM® E Border

## Sårbandage

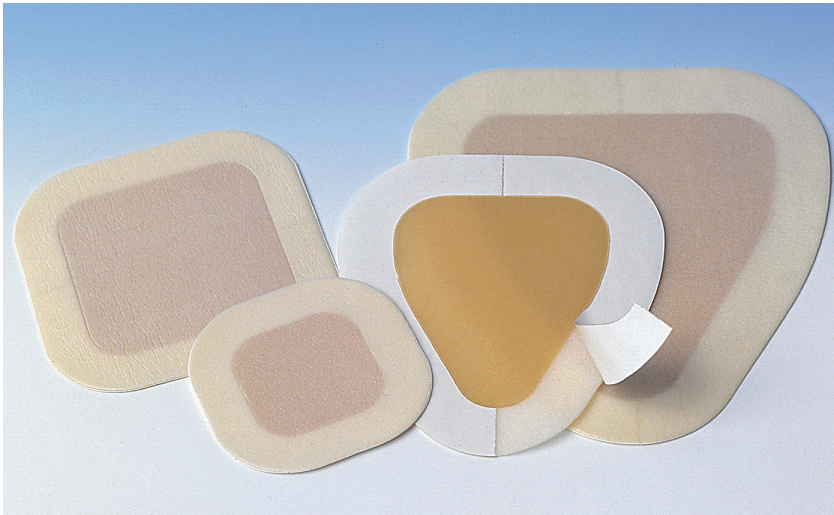

DuoDERM® E Border egner sig til bandagering af alle sårtyper med lille til moderat sekretion. I kontakt med sårveske dannes en gel, som opretholder et fugtigt sårmiljø og fremmer sårhelingen. DuoDERM® E Border har en diskret farve, og pladen sidder på ved bruse- og karbad. På grund af den ekstra klæbekant kan bandagen anvendes på svært bandagerbare områder, som f. eks. tryksår på os sacrum, trochanter og hæle.




**ConvaTec**

*Realise the possibilities™*


# DuoDERM® E Border

## KAN ANVENDES TIL BEHANDLING AF ALLE SÅRTYPER.

DuoDERM® E Border er smidig, og egner sig specielt til sår med let til moderat sekretion.

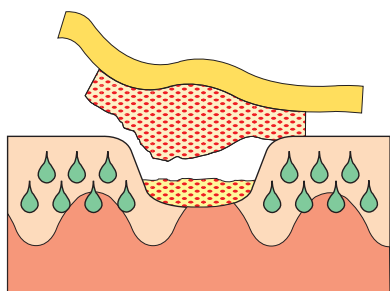


DuoDERM-massen, giver et ideelt helingsmiljø og beskytter huden omkring såret.

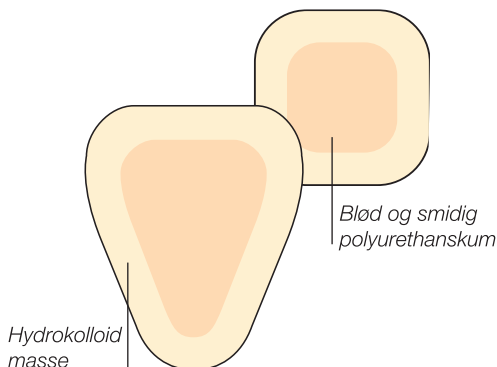

Hydrokolloid masse

Blød og smidig polyurethanskum

## SÅDAN ANVENDER DU DUODERM® E BORDER

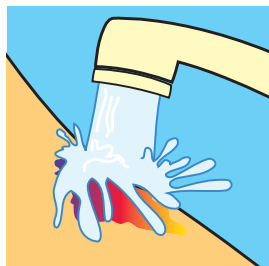

Tidligere anlagt DuoDERM®-bandage løsnes først rundt i kanterne, hvorefter den forsigtigt rulles af huden. Såret skylles skånsomt og løse fragmenter fjernes. Om muligt anvendes sprøjte. Aftør huden rundt om såret grundigt.




Vælg en dråbeformet eller kvadratisk DuoDERM® E Border. Dråbeformet plade anvendes på sakrale sår. Spidsen kan vende opad eller nedad. Alternativt kan spidsen klippes bort, afhængig af sårets placering.




Kvadratisk plade kan anvendes på hæle og albuer, ved at klippe slidser ind fra siderne.



Beskyttelsesfilmen fjernes over DuoDERM® materialet. Undgå at røre undersiden af bandagen med fingrene.

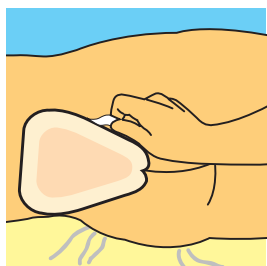

Påsat bandagen med en rullende bevægelse. Påtryk bandagen godt på midten. Beskyttelsesfilmen fra kanten af bandagen fjernes og bandagen varmes med håndfladen.

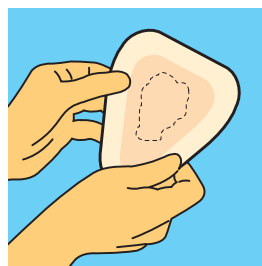

DuoDERM® E Border kan anvendes ved samtidig trykafastning. Afhængig af sekretionen fra såret sidder DuoDERM® E Border oftest i flere dage. Skift bandagen ved behov eller før lækage opstår.

### DuoDERM® E Border sårbandage

Størrelse	Stk./æske	Varenummer
10 x 10 cm.	5 stk.	H 7970
14 x 14 cm.	5 stk.	H 7971
15 x 18 cm. ( dråbe )	5 stk.	H 7973
20 x 23 cm. ( dråbe )	5 stk.	H 7974



## FAKTA

DuoDERM® E Border er en steril selvklæbende bandage med ekstra hæftkant, bestående af pektin, gelatine og natriumcarboxymethylcellulose (CMC) og syntetisk elastomer. Bandagen leveres i flere størrelser. Bandagen bør ikke tilklippes, da den herved mister den ekstra hæftkant. Bandagen bør hæfte ca. 3 cm. udenfor sårkanten. DuoDERM® E Border skiftes efter behov, eller én gang per uge.

## OPBEVARING

Opbevares tørt ved rumtemperatur.

## HOLDBARHED

Gammasteriliseret.

5 år fra produktionsdatoen.

Yderligere oplysninger kan ses i brugsanvisningen i pakken.



**ConvaTec**

Realise the possibilities™

ConvaTec Denmark Aps  
Birkerød Kongevej 2  
3460 Birkerød  
Tlf.: 48 16 74 74  
Fax: 48 16 70 45  
www.convatec.com  
convatec.danmark@convatec.dk