

Antimikrobiel bandage med sølv




AQUACEL® Ag Hydrofiber®-bandage er en bredspektret antimikrobiel bandage med en hurtig og god absorptionsevne. Gelen, der dannes, skaber et fugtigt sår miljø og muliggør skånsomme bandageskift. Det ioniserede sølv i bandagen har en bredspektret antimikrobiel effekt overfor kendte sårpatogener, såvel anaerobe som aerobe bakterier og svampe. Bandagen er derfor velegnet til væskende sår, hvor man ønsker at reducere bakteriefloraen, f.eks. i inficerede sår, eller hvis man ønsker at forebygge infektion.

AQUACEL® Ag-BANDAGE
Ioniseret sølv giver en vedvarende, bredspektret antimikrobiel effekt, og er enkel at fjerne fra såret uden at forårsage smerte.

**HYDROFIBER®
TEKNOLOGI**

Hydrofiber med sølv – en avanceret, højteknologisk fiber af ren, forædlet natriumcarboxymethylcellulose med sølvioner, som dræber mikroorganismer.

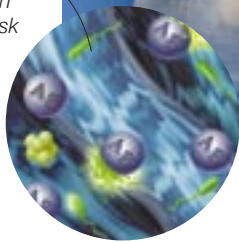

**ABSORPTION OG
RETENTION**
Fibrene omdannes hurtigt til en sammenhængende, antimikrobiel gel med unik evne til at absorbere og retinere sårsekret.

**GUNSTIG
SÅRHELINGSMILJØ**
Sammenhængende gel som skaber et gunstigt, fugtigt sårhelingsmiljø.

EFFEKTIV ANTIMIKROBIEL BEHANDLING

AQUACEL® Ag-bandage er en helt ny type antimikrobiel bandage, som anvendes ved behandling af inficerede sår eller sår, hvor man ønsker at reducere bakteriefloraen med henblik på at forebygge infektion eller at give bedre betingelser for heling. AQUACEL Ag-bandage håndterer og kontrollerer sårsekret og mindre blødninger.

KONTROL OVER SÅRSEKRETET

AQUACEL Ag-bandagens absorptions- og bakteriebindende evne er som AQUACEL® Hydrofiber®-bandage. Dette giver forlængede skifteintervaller, skaber et godt sår miljø og bidrager til at modvirke maceration af sårkanterne.

ENKEL AT ANVENDE

AQUACEL Ag-bandagen lægges direkte i såret med en dækbandage over. AQUACEL Ag anvendes normalt tør til væskende sår, men kan også fugtes med sterilt saltvand til behandling af tørre sår. Valg af sekundær bandage tilpasses den kliniske situation, f.eks. DuoDERM® Extra Thin -bandage og Versiva® -bandage, som fikserer AQUACEL Ag effektivt og opretholder et balanceret fugtigt sår miljø. På grund af den bløde struktur følger AQUACEL Ag såroverfladen også i caviteter og områder, som er vanskelige at bandagere. Ved idelugtende sår kan den lugthæmmende CarboFlex®-bandage benyttes som sekundær bandage.

AQUACEL® Ag Hydrofiber® bandage med sølv

Størrelse	Stk./æske	Varenr.
5 x 5 cm	10	403706
10 x 10 cm	10	403708
15 x 15 cm	5	403710
20 x 30 cm	5	403711

AQUACEL® Ag Hydrofiber® cavitetsbandage med sølv

2 x 45 cm (bånd)	5	403712
------------------	---	--------

AQUACEL® Ag Hydrofiber® postoperative bandager

4 x 10 cm	10	403739
4 x 20 cm	10	403740
4 x 30 cm	10	403741



FAKTA

**AQUACEL® Ag HYDROFIBER®
-BANDAGE**

AQUACEL Ag-bandage håndterer sårsekret på en unik måde. Materialet består af natriumcarboxymethylcellulose med 1,2% ioniseret sølv. Sølvionerne i AQUACEL Ag-bandagen er tilgængelige i bandagen i antimikrobiel form under hele bæretiden.

AQUACEL Ag-bandage har en bredspektret antimikrobiel effekt overfor kendte sårpatogener, mikrober, inkl. multiresistente bakterier som MRSA (Methicillinresistent staphylococcus aureus) og VRE (Vancomycinresistente enterococcer).

INDIKATIONER

Kan anvendes til de fleste typer væskende sår, f.eks. bensår, tryksår, diabetiske og akutte sår, som f.eks. hudafskrabninger, donorflader og brandsår (2. grad). Andre anvendelsesområder er kirurgiske sår, som overlades til sekundær opheling eller primært suturerede kirurgiske sår, hvor der forventes en del blødning.

SKIFTEINTERVALL

AQUACEL Ag kan skiftes med 1-7 dages interval afhængig af sekretionsmængde og sårets kliniske tilstand. Ved brandsår, hvor bandagen har fæstnet sig til såroverfladen, kan bandagen ligge på i op til 14 dage.

OPBEVARING

Opbevares tørt ved stuetemperatur.

STERILISERINGSMETODE

Gammasteriliseret.

KLASSIFISERING

AQUACEL Ag er CE-mærket og opfylder relevante miljø- og sikkerhedskrav.

HOLDBARHED

2 år.

For yderligere information, se brugsanvisning i pakningen.