

carefix[®]

Creating functional comfort



LeggyFix

Urinposefiksering



LeggyFix anvendes til fiksering af urinposer. Den er designet, så den holder posen sikkert på plads og samtidig fordeles trykket fra posen ligeligt rundt om benet.

Egenskaber:

- Nem at anvende
- Holder posen sikkert på plads og sikrer derved optimal støtte
- Fordeler trykket fra posen ligeligt rundt om benet
- Diskret fremtoning
- Reducerer støj fra posen
- Afhjælper risikoen for tryksår
- Ekstra sikkerhed ved fysisk aktivitet
- Meget elastisk, blødt og åndbart materiale
- Passer til både højre og venstre ben
- Passer til både lår og læg
- Med slids i bunden til urinposer med bundaftapning
- Kan holde op til 750 ml
- Praktisk farvekode angiver størrelsen
- Tåler vask ved 60°C
- Latex-fri
- Testet for skadelige stoffer iht. Oeko-Tex standard 100


Anvendelse:

LeggyFix anvendes til fiksering af urinposer. Den skal ombukkes, så den danner en lomme til urinposen. Når LeggyFix er ombukket, ses slidsen i bunden, der passer til ventilen i urinposer med bundaftapning.

Kvalitet:

63% polyester, 37% elastan.

Vaskeinstruktioner:

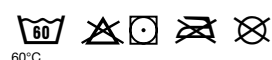

Anbefalede størrelser:

STØRRELSESKEMA	XS	S	M	L	XL
BENETS OMKREDS	25 - 33 cm	33 - 40 cm	40 - 50 cm	50 - 60 cm	60 - 70 cm

Farvekode på produktet angiver størrelsen.

Pakning:




10 stk. per pose


Instruction for use:




1 Træk fikseringen på benet med syning udad og farvekode opad.

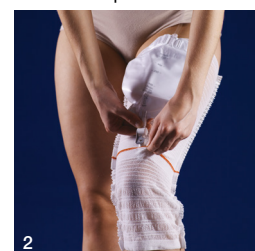

2 Træk urinposens ventil gennem hullet i den røde linje.

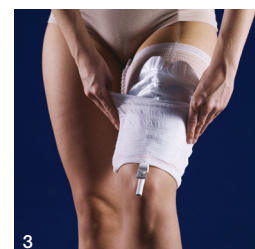

3 Træk den nedre ende af fikseringen op over urinposen.

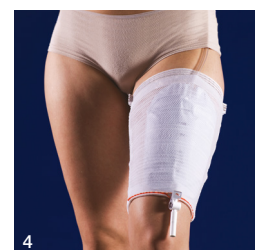

4 LeggyFix er på plads.

For yderligere information:

Forhandler: