



RENGØRING AF FLERGANGSSPRØJTER

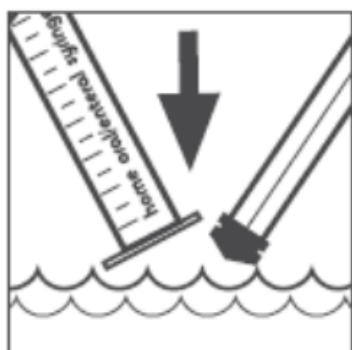

Sprøjten rengøres straks efter brug

- Sprøjten skylles med vand og kommes i varmt sæbevand.
- Sprøjten rengøres indvendigt ved at trække stemplet ind og ud indtil alle spor af ernæring og/eller medicin er væk.
- Adskil sprøjte og stempel og rengør omhyggeligt
- Skyl sprøjte og stempel i rindende koldt vand. Ryst overflødigt vand af.
- Dup med ren køkkenrulle/serviet (brug ikke viskestykke/klud og undgå at gnide på sprøjten).
- Sprøjte og stempel (stadig adskilt) opbevares i en ren og tør beholder med låg.
- Hvis stemplet går mere træg, markeringerne bliver uklare eller sprøjten bliver beskadiget, bør sprøjten kasseres og erstattes med en ny sprøjte på trods af, at den ikke er anvendt de oplyste 35 gange.

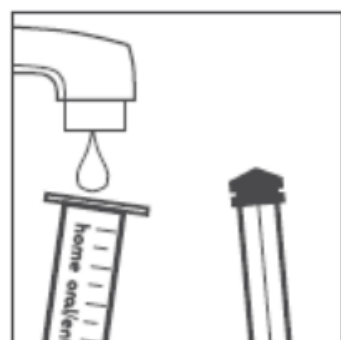

Sprøjten må ikke rengøres i opvaskemaskinen, da det forkorter levetiden

UDSKIFTES EFTER 7 DAGE/35 INDGIVELSE

