

# BESKYTTELSE AF STOMI VED BRUG AF LIVREM

Stomi-bøjlen er udviklet til at lave afstand til stomien, når bukselinningen ligger i samme højde som stomien og man f.eks. bruger livrem.

Stomi-bøjlen er udviklet af Børge Sørensen fra Viborg, som selv har stomi.



Varenummer:

8-9998 Længde 18,5 cm. Højde 3,0 cm.


Varenummer:

8-9999 Længde 17,5 cm. Højde 4,5 cm.

## Monteringsvejledning




1. Markere på inderside af linningen, hvor bøjlen skal beskytte.

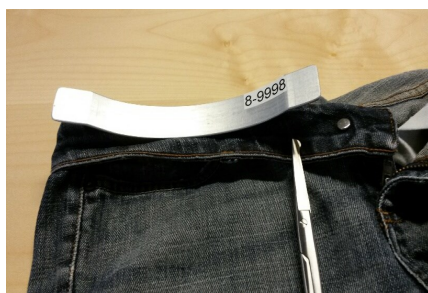

2. Klip et lille snit i linningen ca. 1 cm. fra kant at bøjlen.



3. Hullet skal være ca. 2,5 cm. bred.

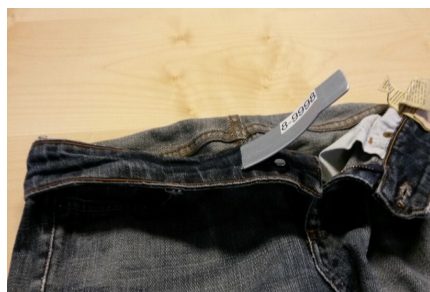

4. Bøjlen føres ind gennem hullet, så den passer, hvor den skal sidde.



5. Det kan være en fordel at føre bøjlen retur, ca. 1 cm forbi hullet.



6. Stomien er nu beskyttet mod linningen og bælte.

Kirstine  
**HARDAM**

Måbjerg Skolevej 48 • 7500 Holstebro

Tlf. 9742 3233 • post@hardam.dk • www.hardam.dk

Webshop: [www.hardam-shop.dk](http://www.hardam-shop.dk)