

Dansac TRE Seal

Mere end en ny tætningsring



Tre niveauer af hudbeskyttelse

Den unikke pH-buffer i Dansac TRE Seal er udviklet til at holde huden naturligt sund

Ved at opretholde den korrekte pH-værdi på huden hjælper den til at beskytte mod enzymatiske skader som skyldes output fra stomien.

Output fra stomien indeholder fordøjelsesenzymmer som nedbryder hudens celler. Disse enzymer trives bedst i et miljø med en neutral pH-værdi.

Naturligt sund hud er svagt syrlig med en pH-værdi på 4 til 6. Hvis fordøjelsesenzymmerne kommer i kontakt med huden, kan de påvirke hudens pH-værdi og muliggøre nedbrydningen af hudcellerne, hvilket medfører hudirritation.

Dansac TRE Seal har en pH-buffer som er udviklet til at opretholde hudens naturlige pH-værdi og bidrage til at reducere fordøjelsesenzymernes skadelige aktivitet på huden.

Dansac TRE Seal fremmer på denne måde et naturligt hudvenligt miljø ved at skabe et fjendtligt miljø for fordøjelsesenzymmerne.

YDRE DIAMETER	REF	ANTAL
48 mm	072-48	10





Dansac TRE Seal er mere end bare
en ny tætningsring

Med **tre niveauer af hudbeskyttelse**
er den udviklet til at hjælpe med at
holde huden naturligt sund

Løfter begrebet "hudbeskyttelse" til et nyt niveau - eller tre, for at være helt nøjagtig



Klæbeevne

Designet til at give en sikker og fleksibel forsegling som beskytter huden mod output fra stomien og som er let at aftage



Absorption

Hjælper med at absorbere fugtigheden og opretholde hudens naturlige balance uden at tætningsringen mister sin sammenhængsstyrke



pH-balance

Udviklet til at hjælpe med at håndtere fordøjelsesenzymernes skadende effekt på huden

Det siger Sundhedspersonalet om Dansac TRE Seal*:

“Brugervenligheden, beskyttelsen og holdbarheden passede fantastisk til mine patienter”

83%

af sygeplejerskerne var meget tilfredse/ tilfredse med Dansac TRE Seals klæbeevne på den peristomale hud

75%

af sygeplejerskerne var meget tilfredse/ tilfredse med TRE Seals udvaskningsresistens

74%

af sygeplejerskerne var meget tilfredse/ tilfredse med Dansac TRE Seals evne til at opretholde et sundt peristomalt hudmiljø

Dansac TRE Seal har tre niveauer af hudbeskyttelse

EN



Klæbeevne

Designet til at give en sikker og fleksibel forsegling som beskytter huden mod output fra stomien og som er let at aftage

TO



Absorption

Hjælper med at absorbere fugtigheden og opretholde hudens naturlige balance uden at tætningsringen mister sin sammenhængsstyrke

TRE



pH balance

Udviklet til at hjælpe med at håndtere fordøjelsesenzymernes skadende effekt på huden

