




Systemet samles efter matchende farvekoder på koblingerne.

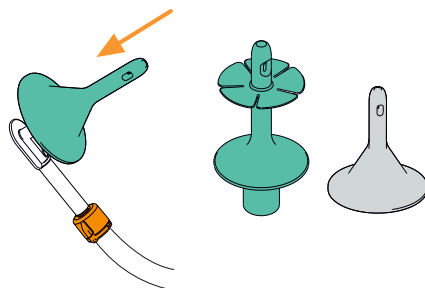


Sæt konus på albuekonnektor.
Om det er den korte, standard eller SRC konus er afhængig af, hvilket sæt du bruger.

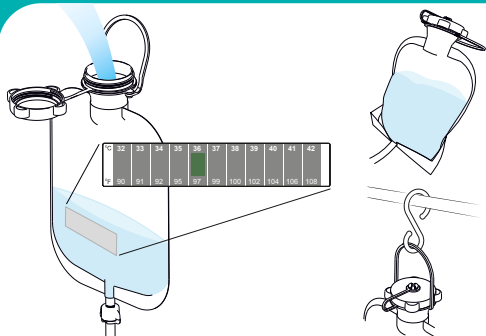


Luk ventilen og fyld vandposen med krops-tempereret vand. Brug temperaturindikator som guide. Sæt vandposen i stativet eller hæng den op over skulderhøjde.

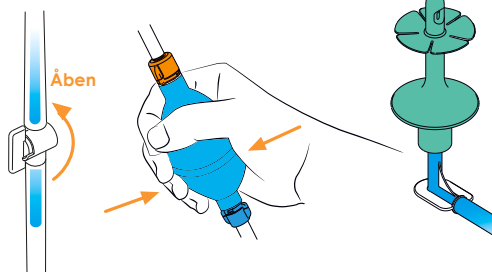

Klargør systemet: Åben ventilen, pump vand indtil der ikke er mere luft i systemet, og vandet kommer ud af konus. Luk ventilen.

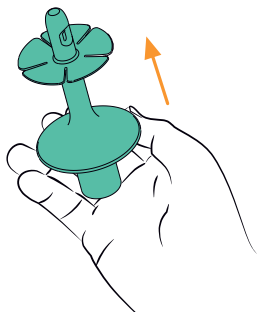

Indsæt konus og hold den på plads. Åben ventilen. Pump den anbefalede mængde vand ind i tarmen. Luk ventilen og fjern konus.

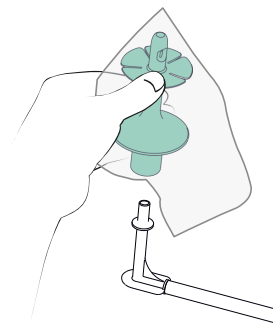

Vand og afføring tømmes ud i toiletet. Konus smides ud ved brug af den medfølgende affaldspose, og systemet tømmes for vand.

Scan QR-koden
og se den
animerede guide.



Kirstine Hardam A/S
Telefon: 97 42 32 33
Mail: post@hardam.dk
Webshop: hardam-shop.dk



Varenavn	Varenummer	Antal
Lite Start sæt	AFLS	7 standard konus
Lite Månedssæt	AFLM	16 standard konus
Actif Start sæt	AFAS	5 korte konus
Actif Månedssæt	AFAM	15 korte konus
SRC Start sæt	AFSRCS	5 SRC konus
SRC Månedssæt	AFSRCM	15 SRC konus
Lite Konus Refill pakke	AFLA	15 standard konus
Actif Konus Refill pakke	AFSC	15 korte konus
SRC Konus Refill pakke	AFSRCA	15 SRC konus