





## ease™ Kantsikring

### 1. Forberedelse

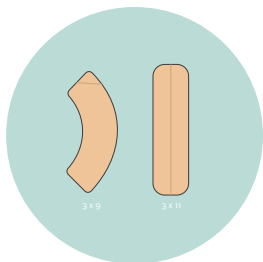


Vælg din foretrukne størrelse

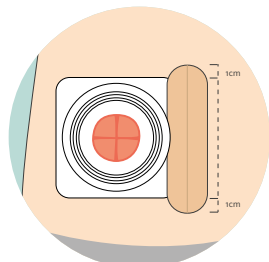


Kantsikringen skal overlape hudpladens kanter med minimum **1.5 - 2 cm**.

### 2. Påsættelse

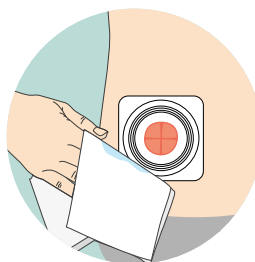


Rens huden med lunken vand. Dup huden forsigtig og efterlad en smule fugt. Kantsikringen klæber bedst, når huden er lidt fugtig.

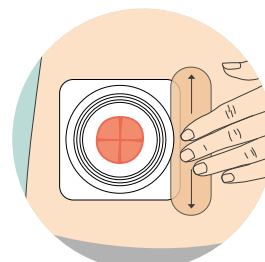

Fjern halvdelen af bagpapiret og anbring kantsikringen på huden, så den overlapper kanten af hudpladen. Fjern den resterende bagside og glat ned med fingrene i **30 sekunder** for at tillade kantsikringen at klæbe.

### 3. Fjernelse

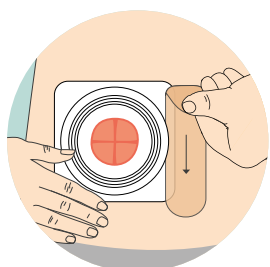

Støt huden og træk forsigtigt kantsikringen af. Klæbemiddelfjerner kan eventuelt anvendes for at hjælpe.

For yderligere information, ring til os på **48 16 74 75**

De henvises til indlæggssedlen for udførlig vejledning.

Distribueres af  
 ConvaTec

™ indikerer varemærker, der tilhører ConvaTec virksomheder.

# Kantsikring

Tynde fleksible kantsikringer designet til at tilpasse sig til din krop og bevæge sig med dig. Ease™ kantsikringer overlapper kanten af hudpladen for ekstra sikkerhed.



## Sikkerhed

Hvis kanten af hudpladen udvides og bliver klæbrig, fx som følge af fugt, dækker kantsikringen dette og forhindrer hudpladen i at klæbe til tøjet.



## Fleksibel og tynd

Tynd (0,44 mm) og følger din kropps bevægelser



## Hudvenlig

Fremstillet af hudvenlig Hydrokolloid.


Fri for latex.

Dækker kanterne af hudpladen, så hvis disse udtørres og får hårde kanter, hjælper kantsikringen med at undgå hudirritation.



## Vandtæt men stadig åndbar

Vandtæt top lag, så kantsikringen kan bruges til badning og svømning.

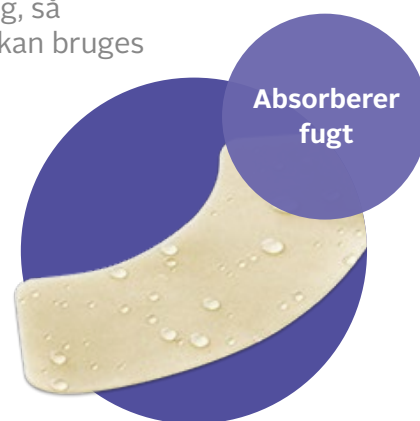

## Let at påsætte og fjerne

Split bagpapir giver mulighed for at fjerne den ene halvdel, påsætte kantsikringen behørigt og fjerne den sidste halvdel.

