


Actilite®

Sårkontaktlag med 99% Manuka honning og 1% Manuka olie

Produktbeskrivelse

Actilite er et tyndt viskosenet med antibakteriel Manuka honning og Manuka olie. Bandagen er designet til at beskytte såret og fremskynde heling, samtidig med at sårsekret kan passere gennem bandagen. Actilite's antibakterielle effekt fremkommer ved en kombination af den meget antibakterielle Manuka olie og Manuka honning. Denne kombination har vist sig at være effektiv mod flertallet af de mikroorganismer, der findes i sårinfektioner.

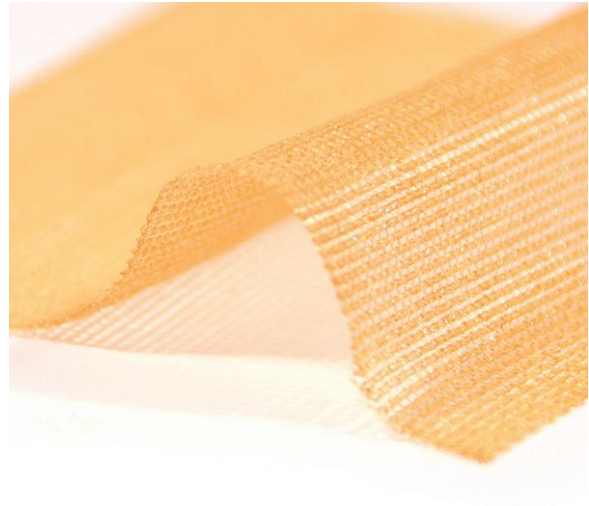

Indikation

- Granulerede og epitaliserede sår
- Som primærbandage, hvor man ønsker en antibakteriel beskyttelse

Kontraindikation

- Overfølsomhed over for bistik

Fordele

- Antibakterielt
- Anti-inflammatorisk
- Mindsker lugtgener
- Osmotisk effekt
- Bibeholder et fugtigt sårhelingsmiljø

Brugsanvisning

Fjern den gennemsigtige beskyttelsesfilm og læg honningbandagen direkte på såret. Det har ingen betydning hvilken side af bandagen, der lægges mod såret. Kan klippes til eller formes efter behov.

Anvend velegnet sekundærbandage afhængig af mængden af sårekssudat.

Actilite kan ligge på såret i op til 7 dage.

Opbevares ved stuetemperatur.

Produkt	CE-klassifikation	Varenr.	Størrelse	Antal/æske
Actilite	IIB	CR3849	10 x 10 cm	10
Actilite	IIB	CR3852	10 x 20 cm	10
Actilite	IIB	CR4366	20 x 30 cm	10
Actilite	IIB	CR4367	30 x 30 cm	5
Actilite	IIB	CR4368	30 x 60 cm	5