

NOVALIFE

Brugerguide
NovaLife TRE bandager

Shelley,
Ileostomi siden 2015



NovaLife TRE

Denne brugerguide giver dig vigtig information om klæberpladen på dit NovaLife TRE produkt.

Når du sætter bandagen på

Stomibandagens klæbeevne til din hud er altafgørende. TRE klæberen hjælper til at give en sikker binding mellem hud og plade.

- Hvis du sammenligner med andre NovaLife klæbere, vil du bemærke, at NovaLife TRE klæberen er hvid og at pladen er tyndere.
- Klæbepladen har en høj klæbeevne, og er designet til at være fleksibel og til at følge kroppens bevægelser, så du kan udføre de aktiviteter, du er vant til.




TRE klæberen hæfter sikkert til huden (illustration)

Mens du har bandagen på

TRE klæberen er designet til at absorbere stomioutput og sved.

- Din stomi har en fugtig overflade, og din hud udskiller sved gennem svedkirtler.
- Når du skifter bandagen, vil du bemærke, at farven på klæberen har fået en lysere nuance, hvilket er helt efter hensigten. Det sker, fordi den absorberer fugten omkring stomien. Til trods for at klæberen absorberer fugt, beholder den sin styrke uden at gå i opløsning.
- Klæberen svulmer op i områder med høj fugtighed, hvilket specielt vil kunne ses i området tæt på stomien.

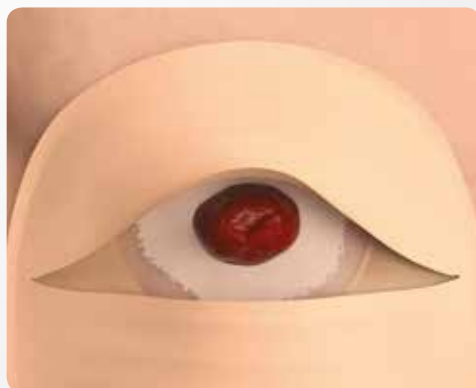


TRE klæberen bliver hvid og svulmer op (illustration)

Når du skifter bandagen

Klæbepladen sidder sikkert under brug og er samtidig let at aftage, når du skal skifte bandagen.


- Når du fjerner klæbepladen, vil den ofte have et spættet udseende og havde skiftet farve i områder, der har været udsat for høj fugtighed.

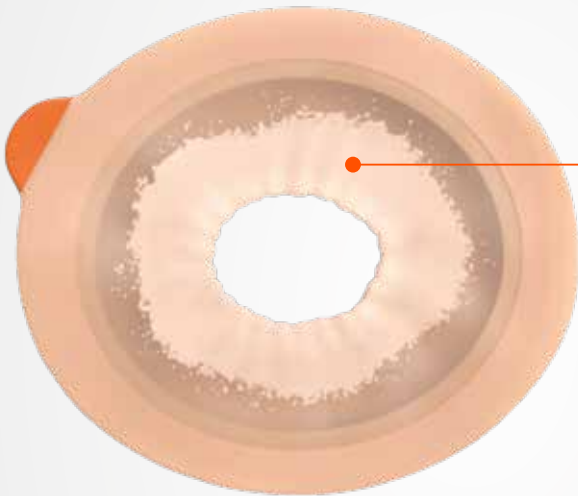

(illustration)



Farveændringen til en lysere hvid nuance indikerer at klæberen har absorberet fugt.

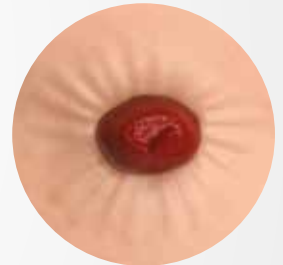

Når du fjerner bandagen vil du se, hvor fleksibel klæberen er og hvordan den har tilpasset sig hudens form.

Den bedste hud er sund hud

Dansac & Hollister Danmark | Lille Kongevej 304 | 3480 Fredensborg
Tlf.: 4846 5100 | mail: dk.salg@dansac.com | www.dansac.dk

dansac 
Dedicated to Stoma Care



Dansac-logoet, NovaLife og TRE er varemærker tilhørende Dansac A/S. ©2019 Dansac A/S. Før brug bør du læse brugervejledningen for at få oplysninger om brug, kontraindikationer, advarsler, forholdsregler og instruktioner.