

Coloplast *Fistel* og Sår Bandageringsystem

- *Nemt at håndtere*
- *Hudvenlig og fleksibel klæber*
- *Bedre patientkomfort*
- *Fås i tre størrelser*
- *Lang bæretid*



Coloplast

Fistel og Sår Bandageringsystem



Mange udfordringer ved fistel bandageringer

For mange sygeplejersker er det en stor udfordring at bandagere fistler. Coloplast har i tæt dialog med stomi-sygeplejersker erfaret et stort behov for en innovativ løsning på disse udfordringer. Ifølge de tilbagemeldinger vi har fået, skal løsningen bl.a. kunne opfylde følgende behov:

- Nemt at håndtere
- En hudvenlig og fleksibel klæber
- En stor klæberflade
- Flere størrelser
- Lang bæretid
- Alt i ét system

Mindre tid på bandagering

Coloplast Fistel og Sår Bandagering er et "alt i ét" system og er meget tidsbesparende for sygeplejersken.

Holdbar klæber

Den bløde og fleksible 2-lags klæber er formbar. Klæberen er udvaskningsresistent og har en lang bæretid. Klæberen følger kroppens forskellige konturer og tilpasser sig nemt hudfolder og ujævnheder.

Klæberen består af to lag. Det nederste lag ind mod huden er formbart og giver en tæt forsegling. Det øverste udvaskningsresistente lag forhindrer hurtigt opløsning af klæberen.



Oppustelig ring

Den oppustelige ring er placeret lige under koblingen. Den forhindrer væske i at løbe ud under bandageringen og gør påsætning af det fleksible låg nemmere. Den oppustelige ring kan pustes op med den tilhørende pumpe.



Klippeguide

Det er meget vigtigt, at bandagen passer nøjagtigt til såret. Derfor er klippeguiden specielt designet, så det er nemt at tilklippe klæberen.



Fleksibelt låg

Låget er nemt at påsætte og aftage og giver adgang til at tilse sår og fistel. Det fleksible låg er desuden forsynet med et filter.



Udløb

Udløbet er forsynet med en blød udløbsventil, der gør det nemt at tømme posen for fistel og sår sekret. Udløbet er også forsynet med en tilbageløbsventil, som forhindrer væsken i at løbe tilbage i såret.



Drænagepose

Drænageposen kan indeholde to liter væske og kan benyttes ved store mængder sekret. Posen er specielt designet, så den nemt kan kobles til Coloplast Fistel og Sår Bandageringsystemets udløb.



Drænport

Drænporten er nem at sætte fast på låget og giver mulighed for at indføre et kateter.



Coloplast Fistel og Sår Bandageringsystem fås i et bredt sortiment. Du kan vælge mellem mini, midi og maxi poser. Drænageposer samt løse låg og drænporte kan købes separat. Se i øvrigt sortimentsoversigten.

 **Coloplast**

Coloplast Danmark A/S
Møllevej 11-15
2990 Nivå
Telefon 4911 1213

www.coloplast.dk