

# FULCIONEL KOMPRESSIONSBELTE

Velegnet når komfort er vigtig, og når nem håndtering ønskes. Derudover er bæltet velegnet ved nedsat lungefunktion, hvor bæltet ikke må klemme opadtil.

## FAKTA

- Giver optimal støtte og holder brokket på plads
- Fjerner tyngdefornemmelse og forbedrer kropsharmonien
- Hudvenligt materiale i 4 vejs-stræk, hvor stomien kan producere under bæltet
- Unik komfort og håndtering
- Kan specialsyes, hvis andre længder og højder ønskes, samt hvis der ønskes hul



LÆNGDE	16 CM HØJ			20 CM HØJ			26 CM HØJ			
	OMKREDS V/STOMIEN	SORT	HVID	BEIGE	SORT	HVID	BEIGE	SORT	HVID	BEIGE
60 - 75 cm - x-small		16XSS	16XSH	16XSB	20XSS	20XSH	20XSB	26XSS	26XSH	26XSB
75 - 90 cm - small		16SS	16SH	16SB	20SS	20SH	20SB	26SS	26SH	26SB
90 - 105 cm - medium		16MS	16MH	16MB	20MS	20MH	20MB	26MS	26MH	26MB
105 - 120 cm - large		16LS	16LH	16LB	20LS	20LH	20LB	26LS	26LH	26LB
120 - 135 cm - x-large		16XLS	16XLH	16XLB	20XLS	20XLH	20XLB	26XLS	26XLH	26XLB
135 - 150 cm - xx-large		16XXLS	16XXLH	16XXLB	20XXLS	20XXLH	20XXLB	26XXLS	26XXLH	26XXLB

## MÅLTAGNING OG ANVENDELSE

- Tag et mål hen over stomien rundt om maven liggende og stående
- Mål hvilken højde, der er nødvendig, så bæltet dækker brokket
- Bæltet tages på liggende eller stående
- Nemtest at tage hånden ind i lommen, strække armen frem for sig og herefter samle bæltet i modsat side af stomien