



DEN SIKRE OG NÆNSOMME FIKSERINGSTAPE

- Minimerer traume og smerte ved bandageskift^{1,2}
- Ideel fikseringsløsning for patienter med sart og følsom hud
- Tilpasser sig kroppens konturer

Safetac® lag


- Reducerer smerte og traume ved bandageskift^{1,2}

Vævet stof

- Formbar
- Let at klippe til

Polyuretan filmbagside

- Åndbar
- Vandtæt

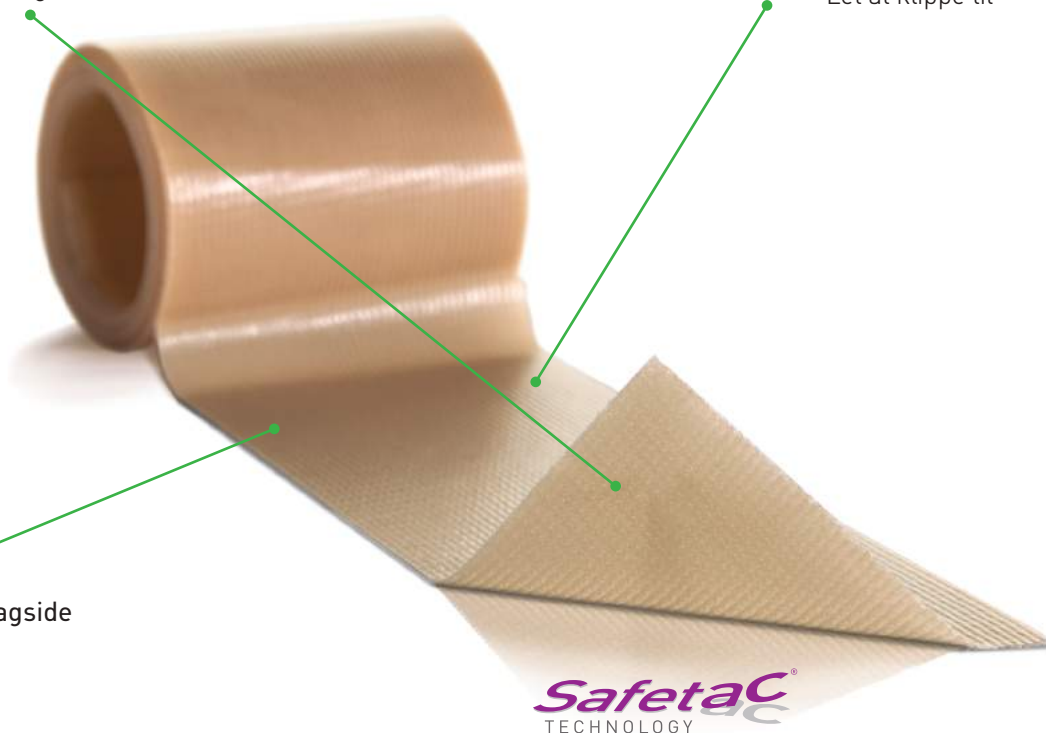


Safetac® teknologi

Safetac® teknologi. Mindre smerte og mindre traume.

Safetac er en patenteret klæbeteknologi, der minimerer smerte hos patienten og traume mod såret. Safetac teknologi findes udelukkende på Mölnlycke Health Care bandager, herunder Mepilex® sortimentet, Mepitel®, Mepiform® og Mepitac®.

Læs mere på www.safetac.com

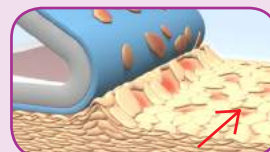


Stripping af hudceller med traditionel klæb




Ingen stripping af hudceller med Safetac teknologi


Sådan anvendes Mepitac®

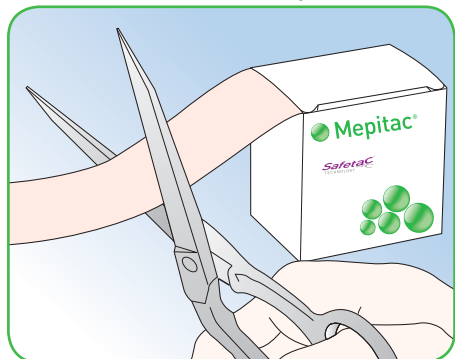

Huden skal være ren, tør og fri for creme, salve og lign.
Klip et passende stykke af.

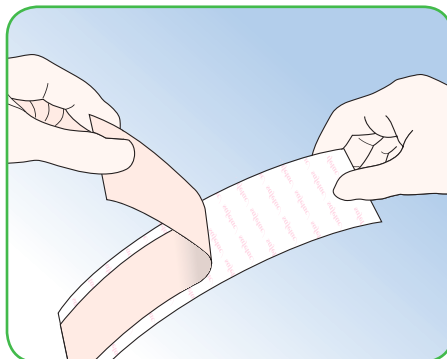

Fjern beskyttelsesfilmen.

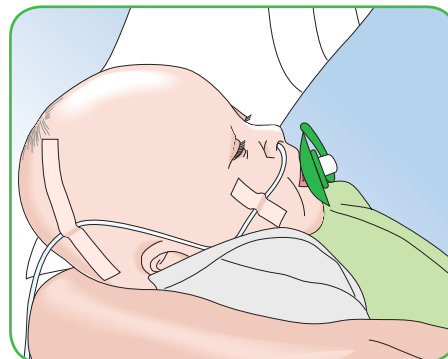

Påfør Mepitac uden at strække tapen. Hvis det er nødvendigt at inspicere eller flytte tapen, kan Mepitac løftes og sættes på igen.

Sådan virker Mepitac

Mepitac er yderste behagelig samt nem at applicere og aftage. Safetac laget giver en sikker fiksering og minimerer smerte ved aftagning fra hud/kropsbehåring. Hvis det er nødvendigt at efterse eller flytte fikseringstapen, kan Mepitac løftes og appliceres igen.

Mepitac er en ideel fikseringsløsning for patienter med sart og følsom hud. Mepitac egner sig til patienter, der har brug for gentagen applicering og aftagning af tape på samme hudområde, f.eks. nyfødte- og dialysepatienter.

Fordele ved Mepitac

- Minimerer smerte og traume ved bandageskift
- Tilpasser sig kroppens konturer
- Efterlader ingen klæberester på huden
- Vandtæt
- Åndbar

Anvendelsesområder

Mepitac er udviklet til fiksering af medicinsk udstyr som dræn, slanger, sonder, elektroder, IV kanyler og bandager. Mepitac giver en blid beskyttelse mod huden ved anvendelse under udstyr som f.eks. slanger.

Bemærk

Mepitacs klæbeevne kan forringes ved brug i et fugtigt miljø som for eksempel kuvøse eller på patienter med feber, eller som sveder meget. Mepitac egner sig ikke til fiksering af arterielle katetre eller -kanyler.



MEPITAC SORTIMENT

Art. Nr.	Str.cm	Stk/inderkrt.	Stk/trp.krt.
298300	2 x 300	1	12
298400	4 x 150	1	12

Mölnlycke Health Care
Gydevang 33, 3450 Allerød
Tlf.: 48 168 268
www.molnlycke.dk

Mölnlycke Health Care navn og logo, Safetac® og Mepitac® er registrerede varemærker, som tilhører Mölnlycke Health Care AB.

 **MÖLNLYCKE
HEALTH CARE**