



Clinisupplies

Aquaflush®


Transanal Irrigations System

Midi Compact+
Quick Start Guide




Quick start guide til Aquaflush® Transanal Irrigations system:


Midi Compact+

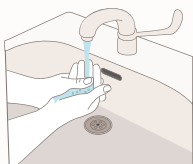


1. Vask dine hænder før du starter din irrigation. Sørg for, at du har alt, hvad du behøver tæt på.

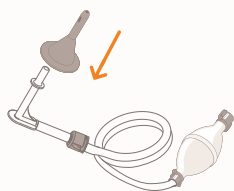


2. Sæt konus fast på albue-konnektoren. Fyld en skål eller en beholder med kropstempereret vand (37-38°C).

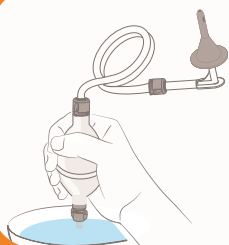

3. Hold bunden af pumpen i vandet og pump indtil du får en jævn strøm af vand fra konussen. Hvis du bruger en forlængerslange, monter gerne denne inden du pumper vandet igennem systemet. Dit Aquaflush® system er nu klar til brug.

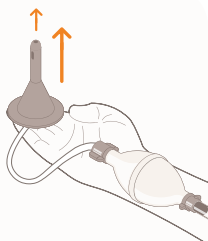


4. Påfør det medfølgende vandbaserede glidemiddel på spidsen af konus og ved behov anus (endetarms-åbningen). Sid på toilettet med fødderne fladt på gulvet/taburet. Indsæt konus i anus. Konus indsættes forfra mellem dine ben, eller bagfra, fra siden, alt efter, hvad der føles bedst for dig.

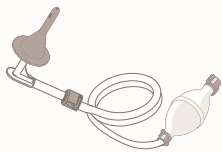


- 5.** Husk at holde pumpen lavere end konus, indtil du har indsat konus og er klar til at irrigere. Dette vil forhindre vandet i at løbe ud. Når du er klar klem forsigtigt på pumpen, for at føre vandet ind i din endetarm. Hvis du bruger Midi Compact+ som et passivt indløbssystem vha. tyngdekraften, hæv nu pumpen op over din talje, for at lade vandet løbe ind i din tarm.



- 6.** Når du har indført vandet, fjerner du konus efter kort tid og bliver siddende på toilettet. Du kan opleve en hurtig strøm af vand med det samme, hvilket er normalt. Slap af og giv dig god tid. Sid korrekt på toilettet (se ill.) Det kan variere, hvor lang tid det vil tage for den enkelte at udskille vand og afføring efter brug af Midi systemet.

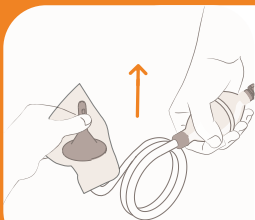

- 7.** Brug den medfølgende affaldspose, til at fjerne konus fra albue-konnektoren. Bortskaf det i restaffald. Konus er et engangsprodukt.

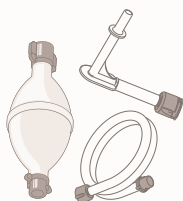

- 8.** Til sidst frakobles pumpen, slangen og albue-konnektoren. Ryst det overskydende vand ud og lad det stå/hænge og lufttørre. Det mindsker tilkalkning og risiko for algedannelse.



- 9.** Ønsker du at vaske systemet, skal du kun bruge en meget mild sæbe og skylle grundigt. Ryst overskydende vand ud af systemet og sæt til tørre.

Aquaflush® Enkelt og effektivt

Aquaflush® Midi Compact+ kommer samlet, for at gøre din irrigationsoplevelse og opstart, så enkel som muligt.

Formonteret unikt design
til **enkel indføring.**

Findes i en række forskellige
konus i blød medicinsk silikone
for **komfort.**

For diskretion er alle konus,
ventiler og pumper i en neutral
farve.

Midi Compact+ (250 ml) er
effektiv, hvis du har brug
for lidt ekstra vand, for at
hjælpe med udtømningen af
endetarmen og den første lave
del af tyktarmen.



Beskrivelse	Varenummer	Indhold
Startsæt	AFPCS	Toilettaske, pumpe, forlængerslange, 5 standard konus og glidemiddel
Månedssæt	AFCPM	Pumpe, forlængerslange, 15 standard konus og glidemiddel
Forlængerslange	AFEXTN	2 forlængerslanger
Standard konus refill	AFLA	15 standard konus og glidemiddel
SRC konus refill	AFSRCA	15 selvsiddende (SRC) konus og glidemiddel



Clinisupplies

HARDAM

www.hardam-shop.dk

For bestilling kontakt kundeservice på mail
post@hardam.dk

eller telefon
+45 97 42 32 33



CSF00898_V1