



Clinisupplies

Aquaflush®

Transanal Irrigations System


Mini Compact

Quick Start Guide




Quick start guide til Aquaflush® Transanal Irrigations system:


Mini Compact

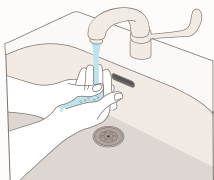


1. Vask dine hænder før du starter din irrigation. Sørg for, at du har alt, hvad du behøver tæt på.

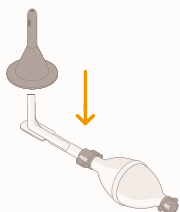


2. Sæt konus fast på albue-konnektoren. Fyld en skål eller en beholder med kropstempereret vand (37-38°C).

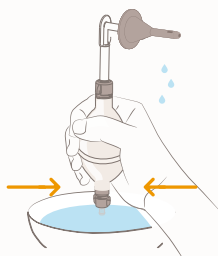

3. Hold bunden af pumpen i vandet og pump indtil du får en jævn strøm af vand fra konussen. Hvis du bruger en forlængerslange, monter gerne denne inden du pumper vandet igennem systemet. Dit Aquaflush® system er nu klar til brug.

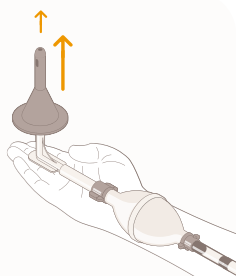


4. Påfør det medfølgende vandbaserede glide-middel på spidsen af konus og ved behov anus (endetarmsåbningen). Sid på toilettet med fødderne fladt på gulvet/taburet. Indsæt konus i anus. Konus indsættes forfra mellem dine ben, eller bagfra, fra siden, alt efter, hvad der føles bedst for dig.

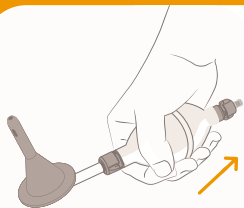


- 5.** Hvis du ikke anvender forlængerslange, så kan det være en fordel at tippe pumpen let opad. Klem på pumpen for at lade vandet strømme ind i din endetarm. Anvendes forlængerslange kan du sidde med pumpen i hånden og spidsen opad.



- 6.** Når du har indført vandet, fjerner du konus efter kort tid, og bliver siddende på toilettet. Du kan opleve en hurtig strøm af vand med det samme, hvilket er normalt. Slap af og giv dig god tid. Sid korrekt på toilettet, se ill. Det kan variere, hvor lang tid det vil tage for den enkelte at udskille vand og afføring efter brug af Mini systemet.

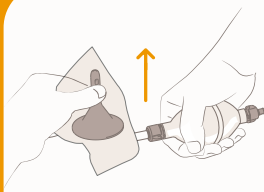

- 7.** Brug den medfølgende affaldspose til at fjerne konus fra albue-konnektoren. Bortskaf det i restaffald. Konus er et engangsprodukt.

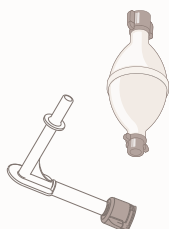

- 8.** Til sidst frakobles pumpen, slangen og albue-konnektoren. Ryst det overskydende vand ud og lad det stå/hænge og lufttørre. Det mindsker tilkalkning og risiko for algedannelse.



- 9.** Ønsker du at vaske systemet, skal du kun bruge en meget mild sæbe og skylle grundigt. Ryst overskydende vand af, og ud af systemet og sæt til tørre.

Aquaflush® Enkelt og effektivt


Aquaflush® Mini Compact kommer samlet, for at gøre din irrigationsoplevelse og opstart, så enkel som muligt.

Formonteret unikt design
til **enkel indføring.**

Findes i en række forskellige
konus i blød medicinsk silikone
for **komfort.**

For **diskretion** er alle konus,
ventiler og pumper i en neutral
farve.

Mini Compact (120 ml) er effektiv
til **tømning af endetarmen.**

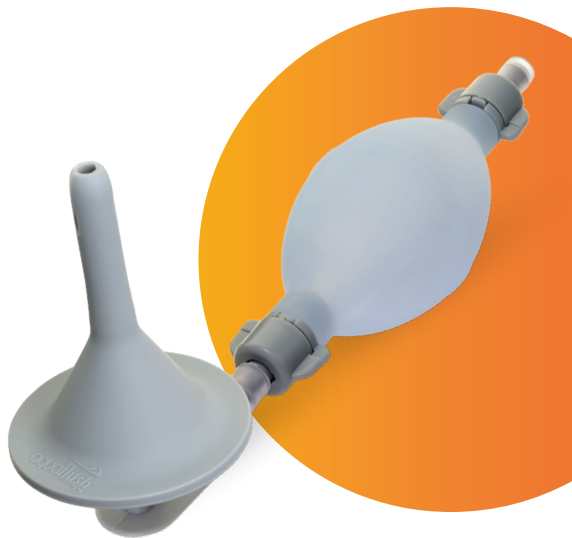

Beskrivelse	Varenummer	Indhold
Startsæt	AFCS	Toilettaske, pumpe, forlængerslange, 5 standard konus og glidemiddel
Månedssæt	AFCM	Pumpe, forlængerslange, 15 standard konus og glidemiddel
Forlængerslange	AFEXTN	2 forlængerslanger
Standard konus refill pakke	AFLA	15 standard konus og glidemiddel



Clinisupplies

H
HARDAM

For bestilling kontakt kundeservice på mail
post@hardam.dk

eller telefon
+45 97 42 32 33



www.hardam-shop.dk