

GO MOLDABLE

Den første 1-dels bandage med Moldable Technology™. Tilbyder det enkle og det praktiske ved en 1-dels pose kombineret med en veldokumenteret hudbeskyttelsesplade.

Moldable Technology™ giver en fleksibel tætning, som følger stomiens bevægelser og tilpasser sig dens størrelse og form samtidig med, at materialet kvæller op og giver en yderligere forbedret tætning. Resultatet bliver en meget sikker og tæt pasform.

95.6%

af alle stomiopererede, der startede ud med ConvaTec Moldable Technology™, bevarede huden sund og intakt¹.




For mere information
kontakt vores
kundeservice på 4816 7475

Det er tid til at **Go Moldable**
Bedre tilpasning. **Færre** lækager. **Sundere** hud.
Nu tilgængelig i flere varianter for at give stomiopererede
frihed og tryghed til at leve livet fuldt ud.

ConvaTec


Så enkelt anvender du Este

1

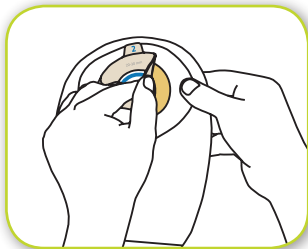


Tag den formbare plade af posen

2

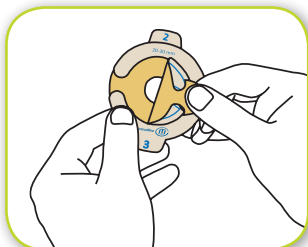


Tag fat i fligen mærket "1" og tag den af.

3

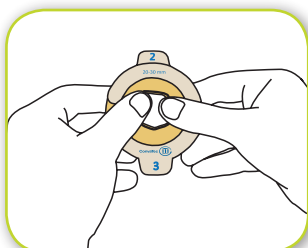


Form åbningen ved at rulle pladens udgangshul tilbage, så den passer til din stomi. Du skal ikke trække eller klippe for at gøre hullet større. Kun rulle.

4

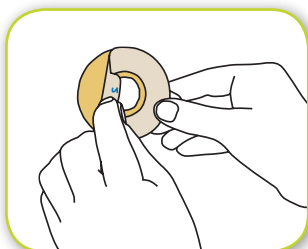

Tag fat i fligen mærket "2" og tag beskyttelsesfilmen af, så hudbeskyttelsespladen kan fæstes på huden.


5

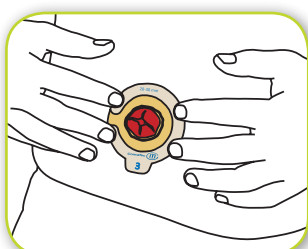

Sæt den formbare plade på huden. Tryk let på hudbeskyttelsespladen hele vejen rundt og form den mod stomien.


emTM Moldable bandagen

6

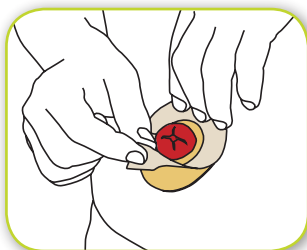


Tag fat i fligen mærket "3" og tag den del af beskyttelsesfilmen af.

7

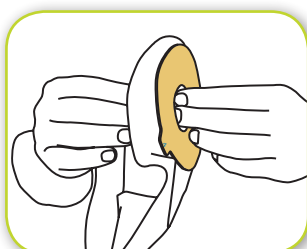


Træk posens sider fra hinanden for at lukke luft ind.

8

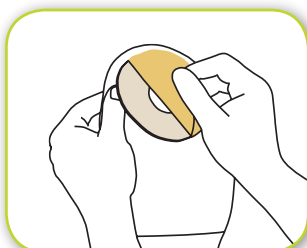


Tag beskyttelsesfilmen af hudbeskyttelsespladen på posen.

9

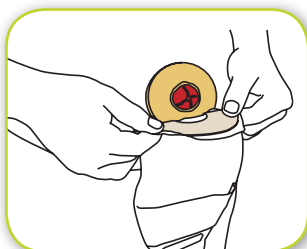

Sæt posen på pladen og huden. Det kan være lettere at se, hvordan posen skal placeres, hvis du bukker posen på midten af posens hudbeskyttelsesplade.

10

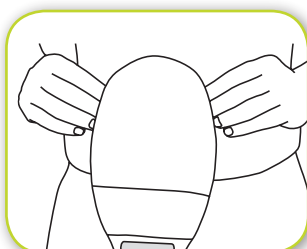

Tryk let på hudbeskyttelsepladen i 30 sekunder, så der skabes en optimal vedhæftning til huden.


*For mere information
se brugsvejledning i æsken.*



NU er ConvaTec Moldable Technology™ også tilgængelig i Esteem™ 1-dels bandage!

Bekvemmeligheden ved en 1-dels pose kombineret med en veldokumenteret¹ hudbeskyttelse er en perfekt kombination for stomiopererede.

1

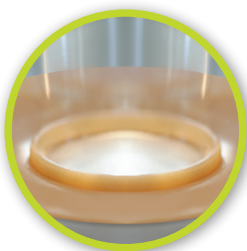

SIKKERT

Fleksibel tætning, som følger stomiens bevægelser og tilpasser sig stomiens størrelse og form, giver en meget sikker og tæt pasform. Dette betyder færre lækager og sundere hud.¹

2



ENKELT

Du skal kun rulle, modellere og tilpasse hudbeskyttelsen til den form og størrelse, som behøves. Ingen klip, ingen træk.

3



KOMFORTABELT

Tyndt og fleksibelt design som er udviklet til at følge kroppen. Denne avancerede pose har et blødt, komfortabelt ydermateriale, inspektionsvindue og Invisiclose™ integreret poselukning med lomme – Lock-it poket™


På posens forside er der et vindue, som gør det enkelt at inspicere stomien.



Komfortabelt ydermateriale



InvisiClose™ integreret poselukning

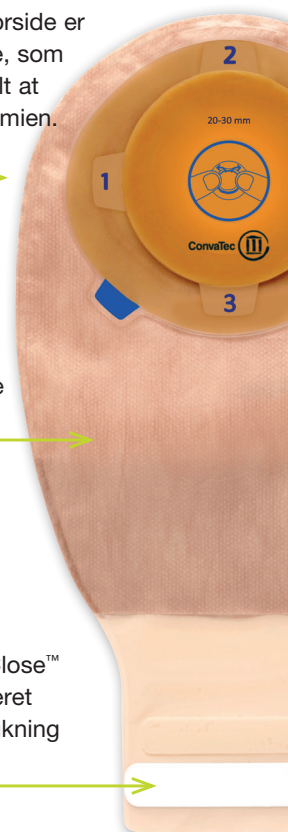

Den dokumenterede styrke hos ConvaTec Moldable Technology™

- 9 ud af 10, som startede ud med ConvaTec Moldable Technology™, bevarede en sund hud.¹
- 8 ud af 10, som skiftede til ConvaTec Moldable Technology™, forbedrede hudens tilstand.¹

!

1. Szewczyk MT, Majewska GM, Cabral MV, Hölzel-Piontek K. Osmose Study: Multinational Evaluation of the Peristomal Condition in Ostomates Using Moldable Skin Barriers. Poster presented at ECET, Paris, France, June 2013.

© 2014 ConvaTec Inc. ®/™ er varemærker tilhørende ConvaTec Inc.