

# Natura<sup>®</sup> HUDPLADE

ConvaTecs hudplader har mange unikke egenskaber og har den højeste kvalitet i forhold til sikkerhed, funktionalitet og komfort. Præcis som vores stomiposer.

Stomahesive<sup>®</sup> hudplader til sikker og skånsom beskyttelse af huden.

Durahesive<sup>®</sup> hudplade svulmer op og skaber en tæt krage omkring stomien.

Fleksibel klæber – tynd og smidig.

## Produktfakta

### Stomahesive<sup>®</sup> hudplade

● Stomahesive<sup>®</sup> er med stor succes blevet brugt som hudplade af stomiopererede i næsten fyrré år. Materialet består af naturlige stoffer, som blandt andet pektin og gelatin, og har en klæbeevne, der er både skånsom og sikker. Pektinet sørger for naturlig hudbeskyttelse ved at sænke pH værdien på huden.<sup>1</sup> Stomahesive<sup>®</sup> absorberer fugt fra huden uden at klæbeevnen forringes. Materialet er meget hudvenligt. Irritation og overfølsomhed på grund af materialet ses meget sjældent.

### Durahesive<sup>®</sup>

● Durahesive<sup>®</sup> er en videreudvikling af det klassiske Stomahesive<sup>®</sup> materiale.

Durahesive<sup>®</sup> er udviklet specielt til ileostomier og urostomier og kan absorbere flydende udskillelser uden at forringe klæbeevnen. Hudpladen svulmer langsomt op, i takt med at den optager fugt, og danner en krage omkring stomien, som dels forebygger erosion af hudpladen, og som beskytter huden omkring stomien.

### Flexible hudplader

- Flexible med akrylatklæber anbefales hvis man vil anvende hudpladen i mere end 3 dage.
- Flexible med hydrokolloidklæber anbefales hvis man ønsker at skifte hudplade 2-3 gange om ugen.

### Standard hudplade

- Anbefales når huden omkring stomien er ekstra følsom.

### Opbevaring

- Stomiplader skal opbevares tørt og ved stuetemperatur. Undgå kulde og høj luftfugtighed.

### Holdbarhed

- Fem år fra produktionsdato.

### Klassificering

- Produkterne er CE-mærket og opfylder relevante miljø- og sikkerhedskrav.


### Affaldshåndtering

- Følg de lokale anvisninger. Ved brug i hjemmet pakkes alt stomimateriale omhyggeligt ind og bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Indholdet i posen kan efter behov først tømmes ud i toiletet.


# Brugsanvisning

1. Rens huden rundt om stomien med en mild sæbe og lunke vand. Skyl og tør grundigt.
2. Mål stomiens diameter, og vælg en passende hudplade.
3. Indtegn stomiens diameter på pladen og klip hullet ud lige uden for den tegnede linje ved hjælp af en krum saks.

## Forberedelser

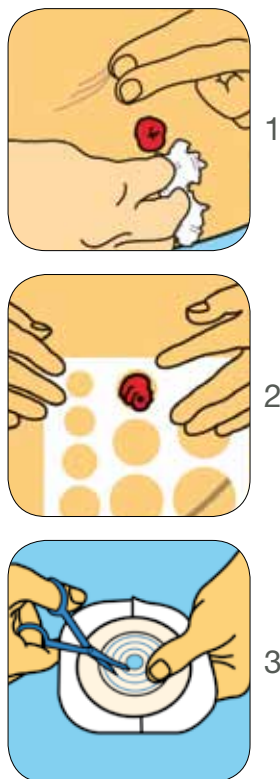

## Påsat hudpladen/ Aftag hudpladen

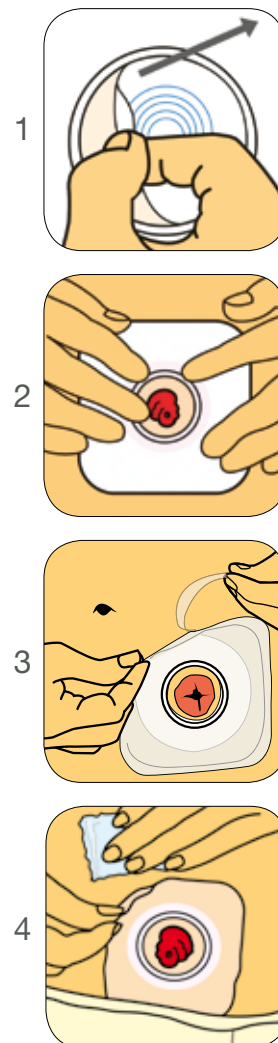

1. Fjern beskyttelsesfilmen fra hudpladen.
2. Fastgør hudpladen og massér den fast i 30 sekunder. Vær særligt omhyggelig i området nærmest stomien.
3. Fjern beskyttelsesfilmen fra den hvide klæber. Tryk den hvide klæber fast på huden imens eventuelle folder udglattes.
4. **Fjernelse:** Når du skal fjerne hudpladen, løsner du forsigtigt hudpladen fra huden, samtidig med at du trykker let på huden med den anden hånd. Hvis hudpladen sidder meget fast, kan du forsigtigt løsne den med et stykke fugtet gaze.

## Varenummer

10 stk./æske

|  | Ringstørrelse<br>mm | ConvaTec varenr. | © 2012 ConvaTec Inc. Symbolerne ®/™ angiver<br>varemærke tilhørende ConvaTec Inc. |
|--|---------------------|------------------|---|
| Natura® Durahesive® hudplade   | 38                  | 413154           |   |
|  | 45                  | 413155           |   |
|  | 57                  | 413156           |   |
|  | 70                  | 413157           |   |
| Natura® Stomahesive® hudplade  | 38                  | 401574           |   |
|  | 45                  | 401575           |   |
|  | 57                  | 401576           |   |
|  | 70                  | 401577           |   |
| Natura® Stomahesive® Flexible hudplade<br>med akrylatklæber, beige     | 38                  | 125263           |   |
|  | 45                  | 125264           |   |
|  | 57                  | 125265           |   |
|  | 70                  | 125266           |   |
| Natura® Stomahesive® Flexible hudplade<br>med hydrokolloidklæber, hvid | 38                  | 410294           |   |
|  | 45                  | 410295           |   |
|  | 57                  | 410296           |   |
|  | 70                  | 410297           |   |

▲ For detaljerede oplysninger, se brugsanvisningen i emballagen.