


HVORDAN DEN VIRKER

Cohesive® PASTA er baseret på den samme formel som andre **Cohesive®** produkter og beskytter huden omkring stomien på nøjagtig samme måde:

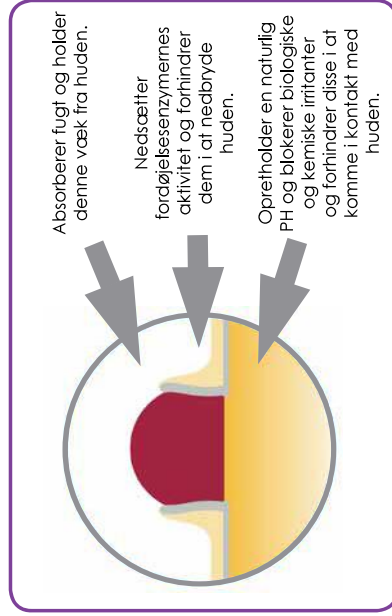

“ (Med **Cohesive® PASTA**) Jeg har ikke brug for at skifte pose så ofte og det betyder at min hud er mindre rød og irriteret. ”

eakin®

Velvære og Sikkerhed



Cohesive®
PASTA

Cohesive® PASTA

En **alkoholfri** stomipasta udviklet til at give hudbeskyttelse og forebygge lækage fra selv vanskelige stomier.

Pakkestr. 1

REF 839010

Vægt: 60 gr.

eakin®

Kontakt os venligst for mere information og prøver:

Focuscare Denmark ApS,
Østervangsvej 21
DK-8900 Randers

Telefon: +45 49 26 13 99
Fax: +45 49 21 02 57

Email: info@focuscare.dk
www.focuscare.dk



Focuscare

Manufactured by:
TG Eakin Limited
15 Ballystockart Road
Comber
Northern Ireland
BT23 5QY

CEPFLY/2NB (DK)

Cohesive® PASTA

VELVÆRE



Cohesive® PASTA er en stomi pasta der er anderledes. Det er en unik, alkohol-fri pasta som giver en højere grad af velvære og sikkerhed.

Cohesive® PASTA er i familie med produkterne Eakin **Cohesive®** ringe og **Cohesive SLIMS®** og er baseret på samme formel. Produkter der har beskyttet huden omkring stomier i mere end 30 år.

“ Jeg er vild med **Cohesive® PASTA**, den har givet mig stort velvære og er nem at bruge. ”

ALKOHOL- FRI

• Ingen af Eakin® produkterne indeholder alkohol og er derfor overordenligt hudvenlige. **Cohesive® PASTA** er behagelig, fordi den ikke svider på huden, som almindelige stomipastaer gør.

• Ingen alkohol betyder også at **Cohesive® PASTA** ikke tørrer ud. Derfor er der intet spild, hvis du skulle glemme at sætte hæften på tuben.

“ Jeg føler ingen smerte når (Cohesive®) pastaen kommer på hudløs hud, faktisk dulmer det. ”

“ Jeg har brugt pasta i mange år og har vænnet mig til at det gjorde ondt, men med denne (Cohesive®) pasta mærker jeg ingenting. ”



HUDVENLIG

Når brugere bliver bedt om at beskrive deres hudstilstand efter brug af **Cohesive® PASTA** er svarene meget positive :

- 'Sårene omkring min stomi er nu helet op.'
- 'Min hud holder sig sundere når jeg bruger pastaen'
- '**Cohesive® PASTA** føltes behagelig at bruge'
- 'Min hud er bedre nu, den er mindre rød'
- 'Min hud er helet og kløen er holdt op siden jeg startede med at bruge pastaen'.

NEM AT BRUGE

- **Cohesive® PASTA** er hurtig og nem at bruge. Den vil fæstne på fugtig hud og man behøver ikke vente på at pastaen skal tørre før man sætter posen på.
- **Cohesive® PASTA** kan bruges omkring en colostomi, ileostomi og urostomi og til at udfylde dybe hudfalter, ar eller ujævne overflader med. Kan anvendes sammen med alle typer af poser.
- **Cohesive® PASTA** danner en gel og bliver ikke hård som almindelige stomipastaer. Derfor er den meget behagelig og nem at fjerne.
- **Cohesive® PASTA** skal IKKE bruges sammen med pudder eller creme. Kan anvendes sammen med **Cohesive SLIMS®** eller **Cohesive®** ringen.

Brug af Cohesive® PASTE i stedet for andre pastaer:



Rengør og tør huden omkring stomien, huden skal være helt fri for opløsningsmidler, pudder eller fedtstof.



Tryk pastaen ud og udfyld alle hudfalter, ar eller ujævne overflader.



Kom derefter pasta rundt om hele stomien – helt tæt op til slimhinden.



Sæt posen på plads og hold den fast der ca. 30 sekunder.

Brug af Cohesive® PASTE sammen med SLIMS:



Rengør og tør huden omkring stomien, huden skal være fri for opløsningsmidler, pudder eller fedtstof.



Udfyld alle hudfalter, ar og ujævne overflader hvis effekten af **Cohesive SLIMS®** skal optimeres.



Placer derefter **Cohesive SLIMS®** rundt om stomien helt tæt op til slimhinden.



Sæt posen på plads og hold den fast der i ca. 30 sekunder.

Cohesive® PASTE