

Skånsom sårheling



DuoDERM® Extra Thin er en okklusiv, absorberende bandage, som kan anvendes til tørre og let væskende sår. Ved kontakt med sårveske dannes en fugtig gel, som opretholder det fugtige sårmiljø, der fremmer sårhelingen¹.

DuoDERM® Extra Thin-bandage er en hæftende plade, som er virus- og bakterietæt^{2,3}, flexibel, og som kan klippes til den ønskede pasform. Bandagen bør gå ca. 2 cm ud over den raske hud. Kan anvendes som både primær og sekundær bandage. Bandagen findes også i post-op størrelser.



Hygiejne

– bakterie- og virustæt barriere^{2,3}

Sårheling

– skaber optimalt miljø for sårheling¹


Veldokumenteret

– DuoDERM-familien er en af verdens mest veldokumenterede bandager

Klippeguide for DuoDERM®

Tips ved anvendelse:

- Varm bandagen med hænderne, inden den appliceres på såret
- Applicer DuoDERM med en margin på 2 cm ud over sårkanterne
- Vær opmærksom på, at huden er tør, inden pladen appliceres
- Ved moderat til kraftigt væskende sår, kan DuoDERM kombineres med AQUACEL® Hydrofiber®-bandage
- Bandagen kan sidde på i op til 7 dage, eller skiftes når det er klinisk indikeret.

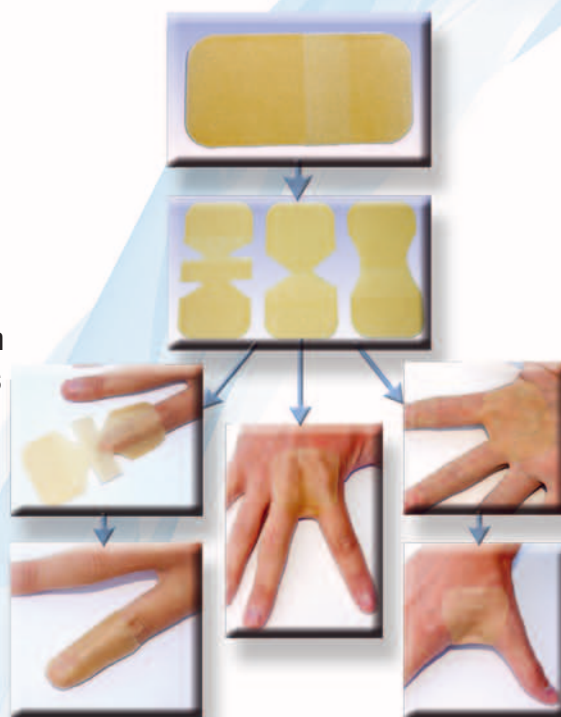

DuoDERM® Extra Thin-bandage

STØRRELSE	STK./ÆSKE	VARENØR.
10 x 10 cm	20	401807
10 x 15 cm (oval)	5	651008
7,5 x 7,5 cm	5	H7951
10 x 10 cm	5	H7954
15 x 15 cm	5	H7956
5 x 10 cm	10	H7959
5 x 20 cm	10	H7961
9 x 15 cm	10	187920
9 x 25 cm	10	187921
9 x 35 cm	10	187922

Referens: **1.** Demetriades D, Psaras G. Occlusive versus semi-open dressings in the management of skin graft donor sites. *S Afr J Surg.* 1992;30:40-41. **2.** Bowler PG, Delargy H, Prince D, Fondberg L. The viral barrier properties of some occlusive dressings and their role in infection control. *Wounds.* 1993;5:1-8. **3.** Hutchinson JJ, McGuckin M. Occlusive dressings: A microbiological and clinical review. *Am J Infect Control.* 1990;18:257-268.

© 2006 E.R. Squibb & Sons, L.L.C.

® er registreret varemærke tilhørende E.R. Squibb & Sons, L.L.C. ConvaTec er autoriseret bruger.

FAKTA

DuoDERM® Extra Thin-bandage

DuoDERM® Extra Thin er en tynd hæftende plade, der består af en underside af hydrokolloider i en vedhæftende masse og en overside af polyurethanfilm. Den vedhæftende overflade indeholder syntetiske elastomerer, der øger bandagens evne til at håndtere såreksudat.

Indikationer

DuoDERM® Extra Thin anvendes til tørre og let væskende sår, f.eks. tryksår (stadie I-II), bensår, diabetiske sår, kirurgiske sår, delhudsforbrændinger, donorsteder, skrabsår og gnavsår.

Skiftetofrekvens

Bandagen skiftes efter max. 7 dage, eller når den er mættet.

Opbevaring

Opbevares ved stuetemperatur. Undgå stærkt lys.

Steriliseringsmetode

Gammasteriliseret.

Klassificering

DuoDERM® Extra Thin er CE-mærket og opfylder alle relevante miljø- og sikkerhedskrav.

Holdbarhed

5 år.

Yderligere oplysninger kan ses i brugsanvisningen i æsken.



ConvaTec, Lyngby Hovedgade 98
2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 45 87 60 11 - Fax: 45 87 35 11
Kundeservice: 80 30 60 11
Mail: convatec.danmark@bms.com
www.convatec.com