

Quick start guide

Aquaflush® 200

Aquaflush®

A. pose B. konus C. Flaske



1. Vask dine hænder.
Find alt frem du skal bruge




2. Fyld flasken med kropstempereret vand (37-38 grader)


Skrul låget på flasken




3. Pres sammen om flasken, så der kommer vand ud af konus.
Dit Aquaflush® system er nu klar til brug

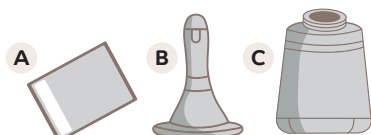


Sæt konus på låget

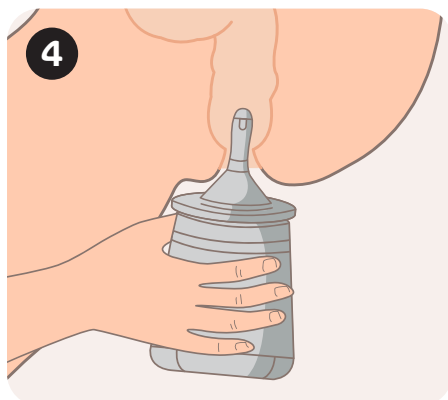

4. Påfør gel på konus.
Sæt dig på toilettet og før konus ind i endetarmen.
Pres flasken sammen, så vandet kommer ind i tarmen

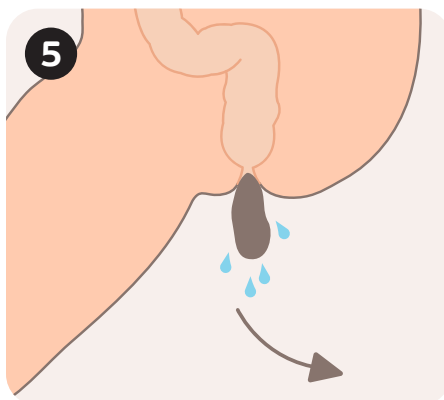

5. Efter at have indført vandet, skal du blive siddende på toilettet. Ofte ses det, at vandet hurtig kommer retur til toilettet, mens det kan tage nogle minutter før afføringen kommer.

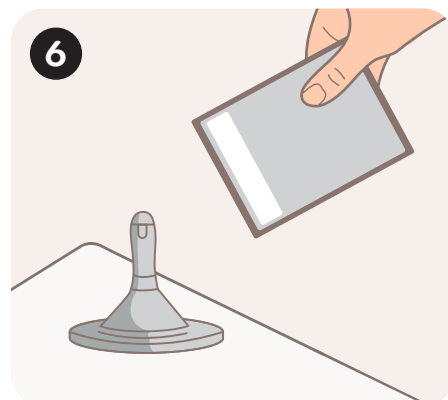

6. Konus er til engangsbrug.
Bortskaffes som restaffald i den medfølgende pose.
Skrul låget af.
Ryst vand ud af flaske og låg, og lad det lufttørre.



Clinisupplies

H
HARDAM
www.hardam-shop.dk
Tlf 97 42 32 33

