



Quick start guide Aquaflush® 500X

Aquaflush®

A: Konus B: Pose C: Låg, forlængerslange og "alblue-konnector" D: Flaske



1. Vask dine hænder, og find alt frem du skal bruge

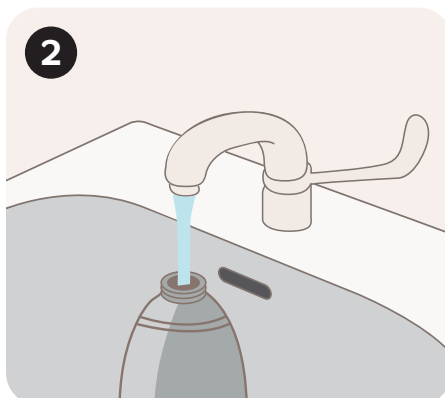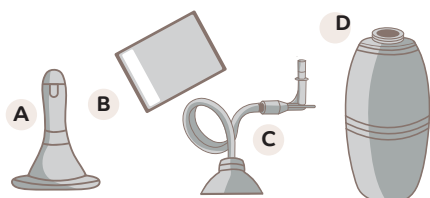


2. Fyld flasken med kropstempereret vand (37-38 grader).

Skrul låget på flasken




3. Sæt konus på forlængerslangen.


Mens du holder systemet over vasken, presses forsigtigt på flasken, indtil der kommer vand ud af konus. Hold herefter flasken i en 45 graders vinkel eller med bunden opad.

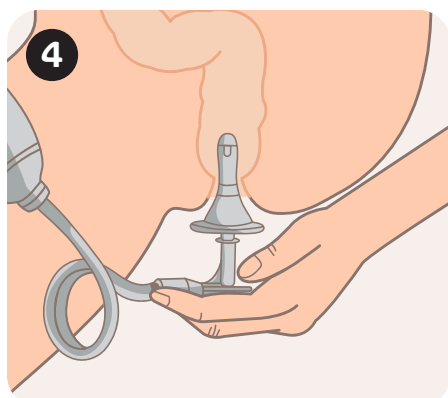

4. Påfør gel på konus. Sæt dig på toilettet, og før konus ind i ende-tarmen. Lad vandet løbe ind. Enten passivt eller ved at trykke på flasken, evt mod låret. Fjern Konus.

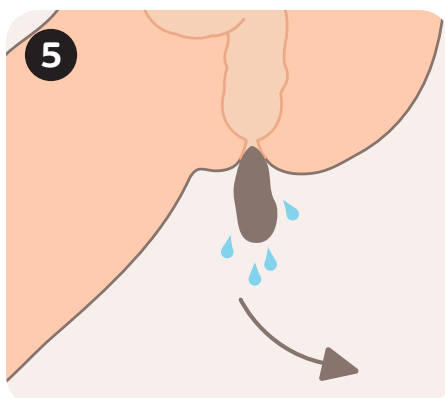

5. Bliv siddende på toilettet. Ofte kommer vand retur med det samme, mens det kan tage op til 15 minutter eller måske længere før tømningen af vand og afføring er komplet.

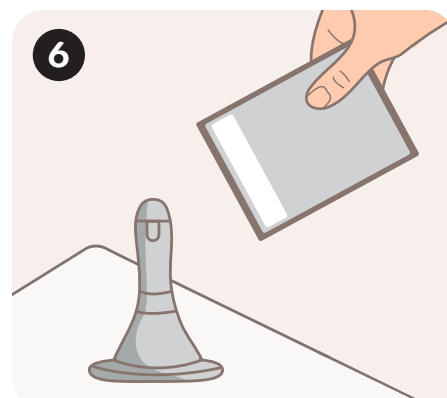

6. Konus er til engangsbrug.

Bortskaffes i restaffald i den medfølgende pose. Ryst vand ud af låg, slange og flaske, og lad det luft tørre. Hvis du vasker sættet, anbefales at bruge en mild sæbe og skylle godt efterfølgende

