

Quick start guide Aquaflush® 200X

Aquaflush®

A. Konus B. Pose C. Låg med slange og albue connector
D. Flaske



1. Vask dine hænder.
Find alt frem du skal bruge





2. Fyld kropstempereret vand
(37-38 grader) i flasken

Skrul låget godt fast




3. Sæt konus på forlængerslangen.
Mens du holder systemet over vasken,
presses forsigtigt på flasken, indtil der
kommer vand ud af konus.
Hold herefter flasken i en 45 grader
vinkel eller med bunden opad

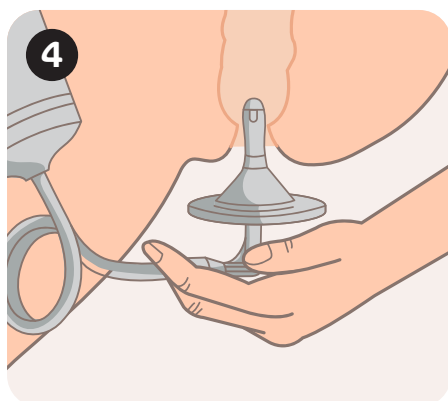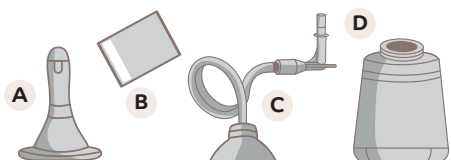

4. Påfør gel på konus.
Sæt dig på toilettet, og før konus
ind i endetarmen.
Pres flasken sammen, så vandet
kommer ind i tarmen. Du kan evt.
presse flasken mod låret.



5. Bliv siddende på toilettet.
Ofte kommer vandet retur med
det samme, mens det kan tage
nogle minutter før afføringen
kommer.

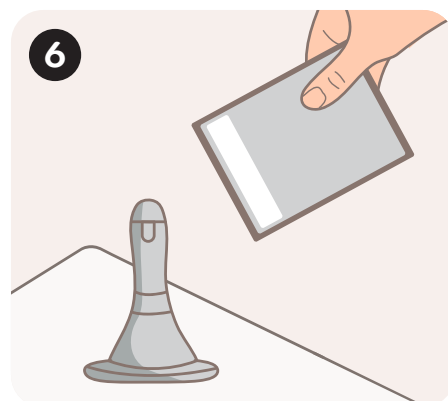

6. Konus er til engangsbrug.
Bortskaffes som restaffald i den
medfølgende pose
Skrul låget af, og ryst vand ud af
flaske, låg og slange og lad det
lufttørre.
Hvis du ønsker at vaske sættet,
anbefales at bruge en mild sæbe
og skylle godt efterfølgende



Clinisupplies

H
HARDAM
www.hardam-shop.dk
tlf 97 42 32 33

