

Individuelle løsninger

Sådan anvendes
Brava® Beskyttende Tætningsring



Brava®

Sørg for at huden omkring stomien er ren og tør før påsætning af Brava Beskyttende Tætningsring.

Forberedelse

1



Tag Tætningsringen ud af blisterpakningen ...



... og træk derefter beskyttelsespapiret af på begge sider ved at holde i aftagningsørerne.

Tilpas

2



Form og ...



... stræk Tætningsringen til den ønskede form.

Påsætning

3



Sæt Brava Beskyttende Tætningsring på huden omkring stomien.



Om nødvendigt tilpasses formen ydermere. Form Tætningsringen med fingrene, så produktets kant sidder glat og fast på huden.



Tætningsringen kan også sættes direkte på klæberen, inden påsætning af klæberen/basispladen på huden.

 Læs altid brugervejledningen, som leveres sammen med produkterne, inden anvendelse.