


VARENUMRE

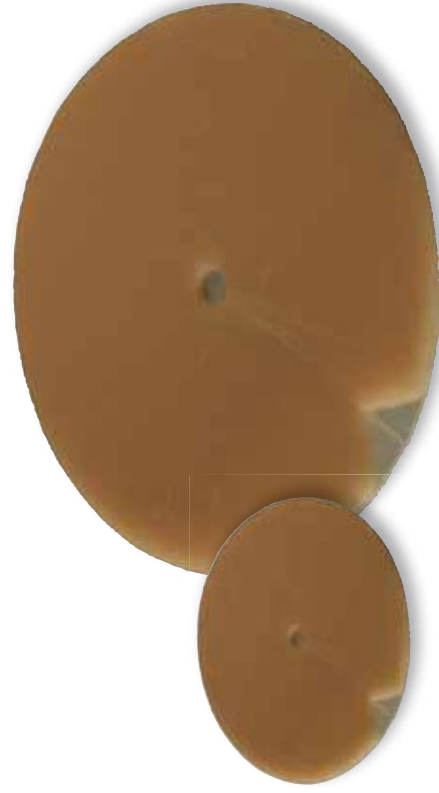

	Diameter	Antal/æske	Varenumre
Stor Surround™ hudbeskyttelse	98 mm	10	839011
Lille Surround™ hudbeskyttelse	58 mm	20	839012

Tip : Start med den lille ring, som absorberer fint. Er der ekstra meget sekretion kan den store **Surround™** med fordel anvendes, da dens evne til absorption er større.



Manufactured by:
TG Eakin Limited
15 Ballystockart Road
Comber
Northern Ireland
BT23 5QY

Kontakt os venligst for mere information og prøver :

Focuscare Denmark ApS.

Østervangsvej 21

DK-8900 Randers

Telefon: +45 49 26 13 99

Fax: +45 49 21 02 57

Email: info@focuscare.dk

www.focuscare.dk



Focuscare

UNDGÅ LÆKAGE OG SMERTER

Surround™ giver fuldstændig hudbeskyttelse og overfladen danner en vandtæt barriere til huden. Baseret på den samme formel som Eakin **Cohesive®** produkterne yder **Surround™** beskyttelse på følgende 3 unikke måder:

- 1) Absorberer fugt og holder denne væk fra huden.
- 2) Nedsætter enzymaktiviteten, og forhindrer enzymerne i at nedbryde huden.
- 3) Opretholder normal pH værdi og blokerer for at biologiske og kemisk irriterende stoffer kommer i kontakt med huden

PRODUKT FORDELE

|| Efter 7 dages brug af **Surround™**, var der markant forbedring af huden og mindre smerter ||

- Mindsker hudirritation
- Giver komplet hudbeskyttelse
- Øger komforten
- Absorberer lækage
- Fremmer helingsprocessen
- Nem at bruge

BRUGES TIL MANGE FORMÅL

Surround™ hudbeskyttelsesring er effektiv til mange former for anvendelse, nogle af disse er nævnt her:

- PEG sonder
- Katetre
- Tracheostomier
- Drænlanger
- Mic-Key sonder
- ACE stoppere
- Blære top katetre

|| Efter brug af Surround hudbeskyttelse var huden meget fin, ingen udlæt og den gav ligeledes støtte til PEG sonden ||

NEM AT BRUGE

Surround™ hudbeskyttelse kan tilpasses efter 4 simple trin:



Rengør og tør den omkringliggende hud.



Fjern dækpapiret.



Anbring **Surround™** hudbeskyttelsesring på den omgivende hud, overløb de 2 ender en smule for at gøre ringen stærkere.



Tryk let omkring kanten på ringen indtil den sidder sikkert placeret.

EKSEMPEL : BRUGT RUNDT OM EN PEG SONDE



Før brugen af **Surround™** hudbeskyttelse - huden er hudløs og smertende



Surround™ hudbeskyttelse dækker det berørte område og yder komplet beskyttelse

Sygeplejersken sagde at "den former sig rigtig godt til huden".