

Brugervejledning



MiniTell Pilleæske

Produktegenskaber:

- Kompakt design.
- Stort LCD display.
- 5 rum til medicin.
- Låseknop til transport.
- Max. 5 alarmer pr. dag.
- Snooze funktion.
- Alarm med lyd og/eller vibration.
- Separate batterier til ursystem og alarmgivere.
- LED lys gør displayet synligt i mørke.

VIGTIGT! Ikke alle typer medicin tåler at blive udsat for luftpåvirkninger (blive taget ud af originalindpakningen før indtagelse). Er du i tvivl, så kontakt apoteket eller din læge.

VIGTIGT! Når pilleæsken tages med i en lomme eller i en taske, er det meget vigtigt, at låse-knappen (HOLD) er skubbet til højre. Så kan pilleæskens indstillinger ikke uforvarende blive ændret.

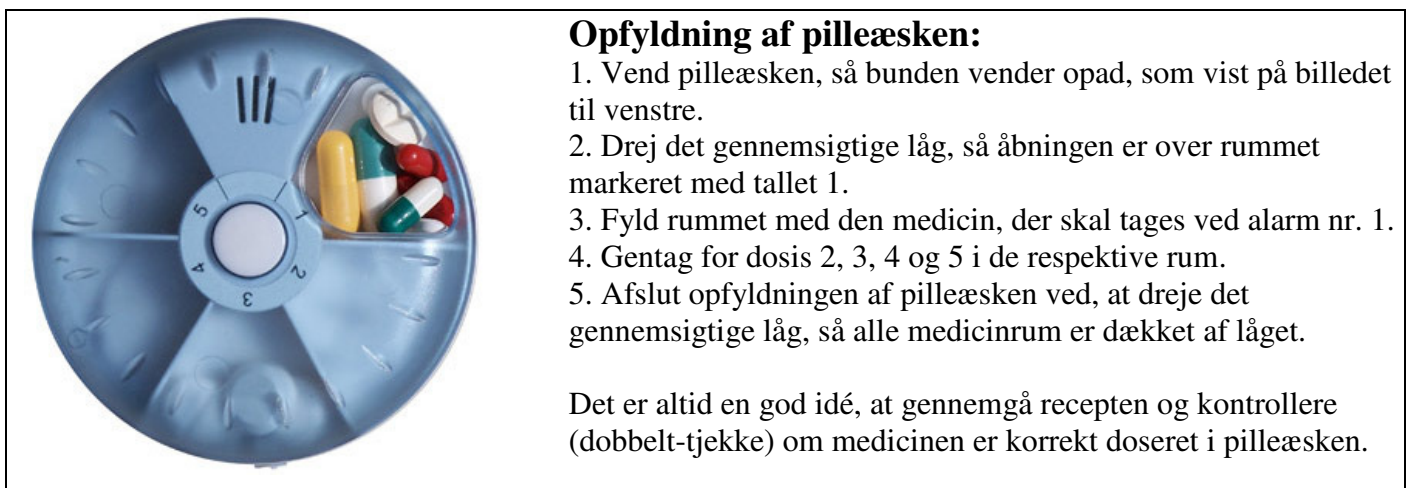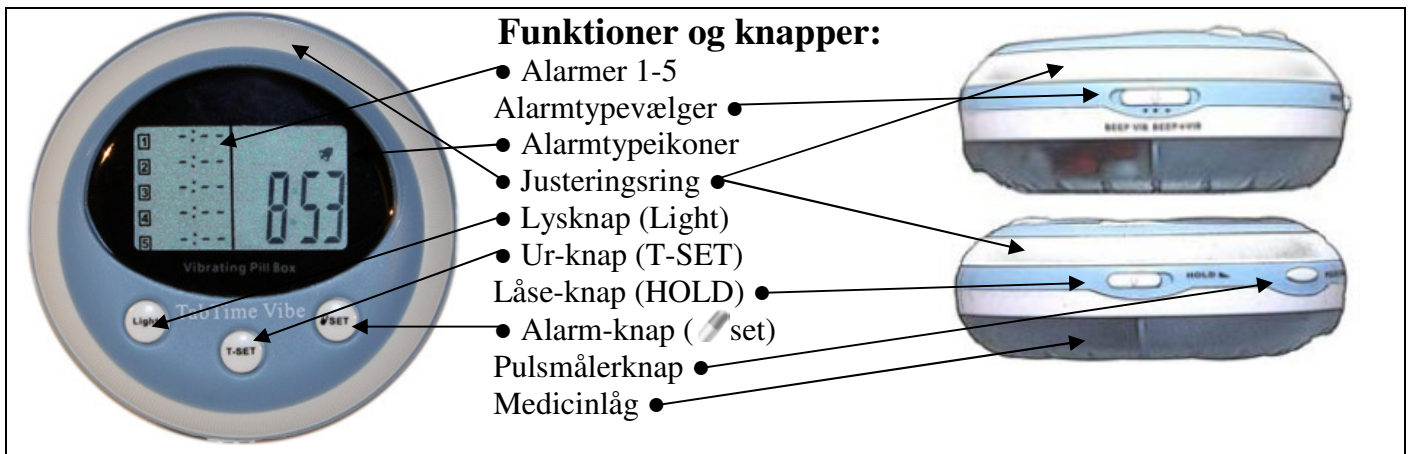



Indstilling af uret:

Vend pilleæsken så fronten vender opad som vist på billedet til venstre.

1. Kontroller at låse-knappen (HOLD) på pilleæskens side er skubbet til venstre (væk fra teksten HOLD).
2. Hold T-SET knappen inde i 4 sekunder indtil **T-SET** -ikonet vises i displayet. Slip knappen.
3. Timetallet vil blinke og ved at dreje på justeringsringen med eller mod uret kan timetallet indstilles.
4. Tryk én gang på T-SET knappen for at godkende timetallet, hvorefter minutterne vil blinke på displayet.
5. Ved at dreje på justeringsringen med eller mod uret kan minuttallet indstilles.
6. Tryk T-SET knappen en sidste gang for at godkende minutterne. Indstilling af uret er afsluttet.

Forskellen på AM og PM: (Når der ikke vises PM på display er det underforstået AM)

Bemærk at uret skifter til PM tid kl 12 (middag) Det vil sige PM12 = middag om dagen

AM eksempel 1: Tiden mellem midnat og middag. F.eks 12:15 AM = 12:15. (lidt over midnat)

AM eksempel 2: Tiden mellem midnat og middag. F.eks 4:15 AM = 04:15 (om natten/morgnen)

AM eksempel 3: Tiden mellem midnat og middag. F.eks 9:30 AM = 09:30 (om formiddagen)

PM eksempel 1: Tiden mellem middag og midnat. F.eks 4:30 PM = 16:30 (om eftermiddagen)

PM eksempel 2: Tiden mellem middag og midnat. F.eks 9:30 PM = 21:30 (om aftenen)

PM eksempel 3: Tiden mellem middag og midnat. F.eks 12:00 PM = 12:00 (om middag)

NYESTE MODEL ER MED 24 TIMERS URVÆRK og der kan ses bort fra ovenstående



Indstilling af alarmer:

Vend pilleæsken så fronten vender opad som vist på billedet til venstre.

1. Kontroller at låse-knappen (HOLD) på pilleæskens side er skubbet til venstre.
2. Hold **#SET** knappen inde i 3 sekunder, indtil ikonet **AL-SET** vises, og tiden ved ikonet for den først alarm blinker (Vist med en rød ring på billedet til venstre) Slip knappen.
3. Indstil alarmtiden ved at dreje justeringsringen med eller mod uret. Tiden vil skifte i 30-minutters intervaller, og kan altså kun indstilles til hver hele eller halve time.
4. Når den ønskede alarmtid er indstillet for alarm nummer 1 trykkes én gang på **#SET**-knappen.
5. Tiden for alarm nummer 2 kan nu indstilles. Drej justeringsringen, indtil den ønskede tid er vist.
6. Gentag for alarmerne 3, 4 og 5.
7. For at afslutte indstillingen af alarmer kan du trykke på **#SET**-knappen indtil **AL-SET**-ikonet forsvinder.
8. **Slet en alarm** ved at aktivere **AL-SET**-mode og den ønskede alarm. Drej justeringsringen indtil tiden vises som -:- (Mellem PM 11.30 og AM 12.00)



Alarmerne vil automatisk genaktiveres klokken AM 01.00 hver nat.




Indstilling af alarmtype:


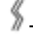
Vend pilleæskens så den knap markeret med BEEP, VIB og BEEP+VIB er synlig som vist på billedet til venstre.

Knappen har 3 indstillingsmuligheder:

1. BEEP: Knappen skubbet helt til venstre. Alarmer vil kun afgive lyd.

Vises i displayet med -ikonet.

2. VIB: Knappen skubbet til midterposition. Alarmer vil kun vibrere.

Vises i displayet med  - -ikonet.

3. BEEP+VIB: Knappen skubbet helt til højre. Alarmer vil bade afgive lyd og vibrere. Viser i displayet med  -ikonet.

Når der kommer en alarm:

1. Drej pilleæskens bagside, således at ét af de 5 pillerum er tilgængelige. Alarmen afbrydes automatisk

2. Ønskes der anvendelse af den indbyggede 'snooze' funktion kan der trykkes på en vilkårlig knap på pilleæskens overside. Efter 5 min. vil alarmen komme påny.

Batteriskift:

OBS! Er du i tvivl om, hvilket batteri du mener der behøver udskiftning, bør du ringe til os på tlf 63 71 30 50.

Skift af AAA batteriet:


(Hvis lyd giver og/eller vibrator virker svage)

1. Åben pilleæskens ved at skubbe "OPEN"-knappen i den retning pilen viser, og "skille pilleæskens ad" på midten.
2. Fjern batterilåget så batterierne er synlige som vist på billedet til venstre.
3. Fjern det gamle batteri og isæt det nye batteri med polerne i den rigtige retning (Angivet i rummet, hvor batteriet skal sidde)
4. Sæt batterilåget på plads og klik pilleæskens halvdele sammen igen.

Skift af Lithium batteriet:

(Hvis displayet forsvinder/falmer. Type CR2032, det runde batteri)

1. Åben pilleæskens ved at skubbe "OPEN"-knappen i den retning pilen viser, og "skille pilleæskens ad" på midten.
2. Fjern batterilåget så batterierne er synlige som vist på billedet til venstre.
3. Skub batteriholderen til siden med en negl eller lignende.
4. Tag batteriholderen ud.
5. Fjern det gamle batteri og isæt det nye batteri med +-siden op.
6. Lås batteriet fast ved at isætte batteriholderen.
7. Sæt batterilåget på plads og klik pilleæskens halvdele sammen igen.

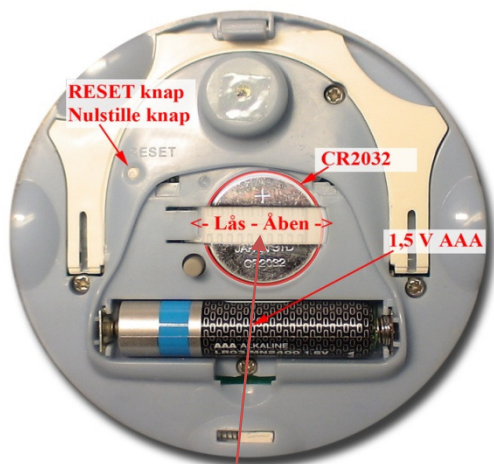

Bemærk placering af 'RESET' knap
Hvis skærm er gået i 'sort', kan man nulstille med denne knap.



Batteri arm skal vende sådan, i forhold til billedet herover.

Man skubber først den lange ind under og derefter trykker let ned og skubber armen til venstre ind under låsetappen.



Lys i displayet:

Er det for mørkt til at du kan se, hvad der står på displayet, kan du trykke på "Light"-knappen.

Displayet vil blive oplyst i 5 sekunder, hvorefter lyset langsomt toner ud.



NB! Låse-knappen (HOLD)

Husk altid at have HOLD-knappen aktiveret, når du ikke lige indstiller uret eller alarmene eller en alarm er aktiveret.

Knapperne er deaktiverede, når låse-knappen er skubbet til den side, hvor der står HOLD .