




BRUGSANVISNING

InsulinSaver er et produkt designet til at hjælpe insulinbehandlede diabetikere med at få en idé om, hvilke temperaturer deres insulin bliver udsat for eller har været udsat for.

InsulinSaver er indstillet til at give signal ved temperaturer som flere insulinproducenter har fastsat som maksimum-/minimumtemperatur for insulin (+2°C til +30°C).

Batterilevetiden for en InsulinSaver, der ikke har været udsat for høje eller lave temperaturer, er 12-18 måneder. Dette forudsætter, at enheden er tændt døgnet rundt. Vi yder 1 års garanti, forudsat at enheden ikke er blevet forbrugt.


1. Bemærk startdatoen:

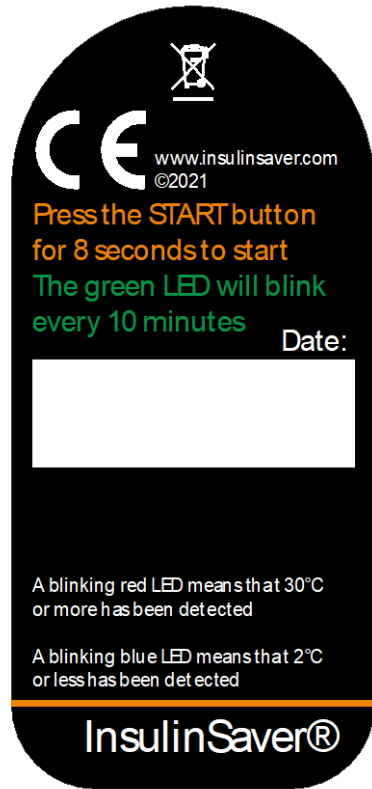

Notér datoen,
når InsulinSaver
startes


Notér datoen, hvor du startede din InsulinSaver for at holde styr på batteritiden. Dette gør du på bagsiden af din InsulinSaver.

2. Start din InsulinSaver:

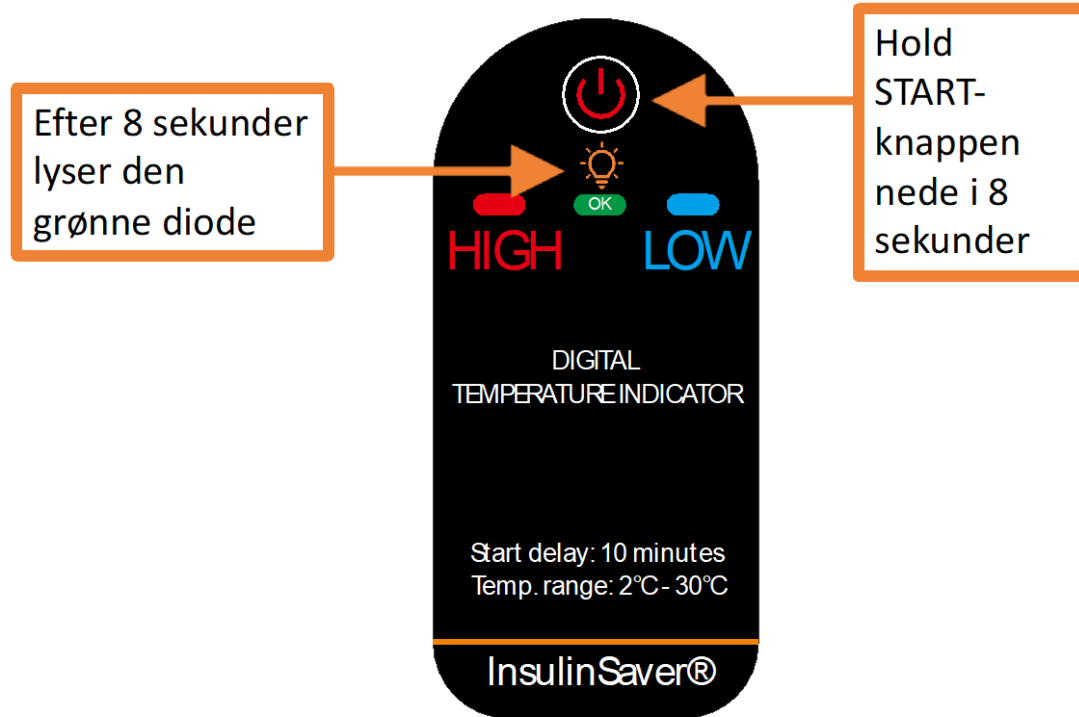


For at starte din InsulinSaver, skal du holde START-knappen inde i 8 sekunder, hvorefter den grønne diode begynder at blinke. Din InsulinSaver begynder at registrere temperaturen efter 10 minutter.

3. Kontroller, at din InsulinSaver er i gang:

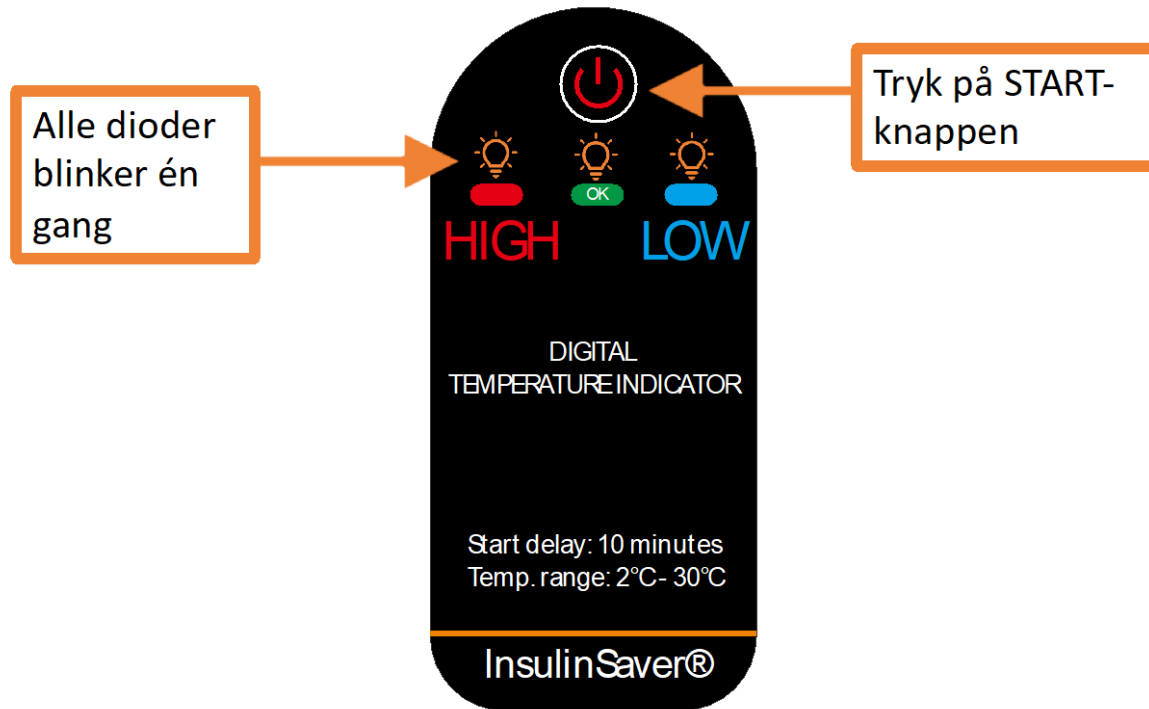


Tryk én gang på START-knappen. Hvis din InsulinSaver er i gang vil alle de tre dioder blinke.

4. Hvordan din InsulinSaver signalerer til dig:

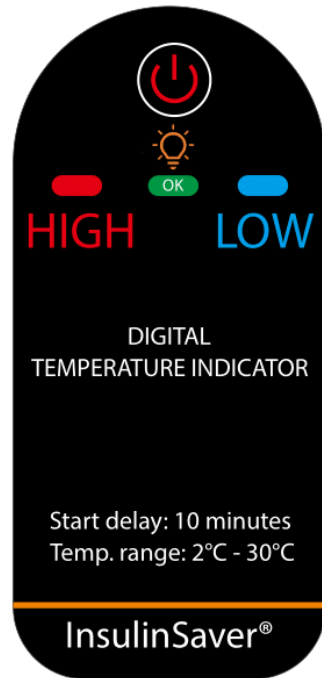


Temperatur inden for +2 til +30°C
Den grønne diode i midten signalerer hver 10. minut, at din InsulinSaver er inden for godkendt temperatur. *Bemærk! Du behøver ikke vente på det grønne blink.*

Se punkt 3 for at kontrollere om din InsulinSaver er tændt.

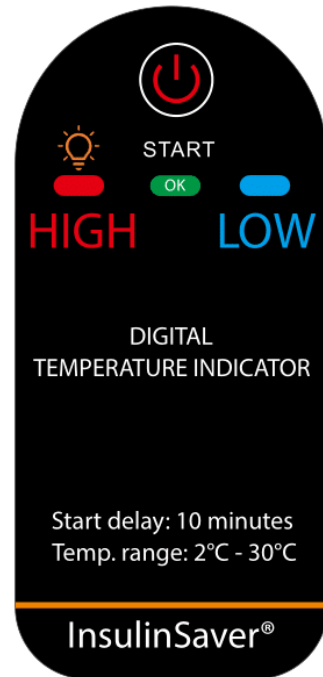

Temperatur over 30°C


Hvis din InsulinSaver har været udsat for en temperatur over 30°C i mere end 5 minutter, vil den røde diode blinke gentagne gange.

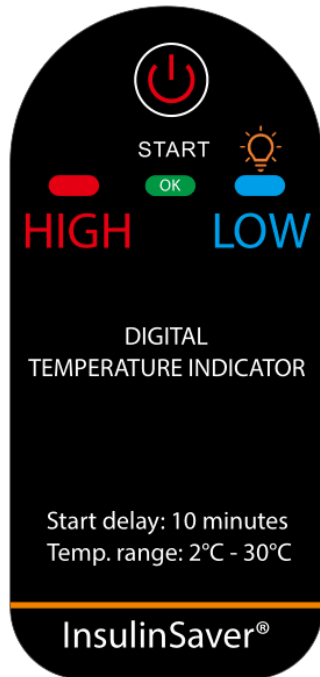

Temperatur under 2°C

Hvis din InsulinSaver har været udsat for en temperatur under 2°C i mere end 5 minutter, vil den blå diode blinke gentagne gange.


5. Sluk/nulstil alarmer på din InsulinSaver:

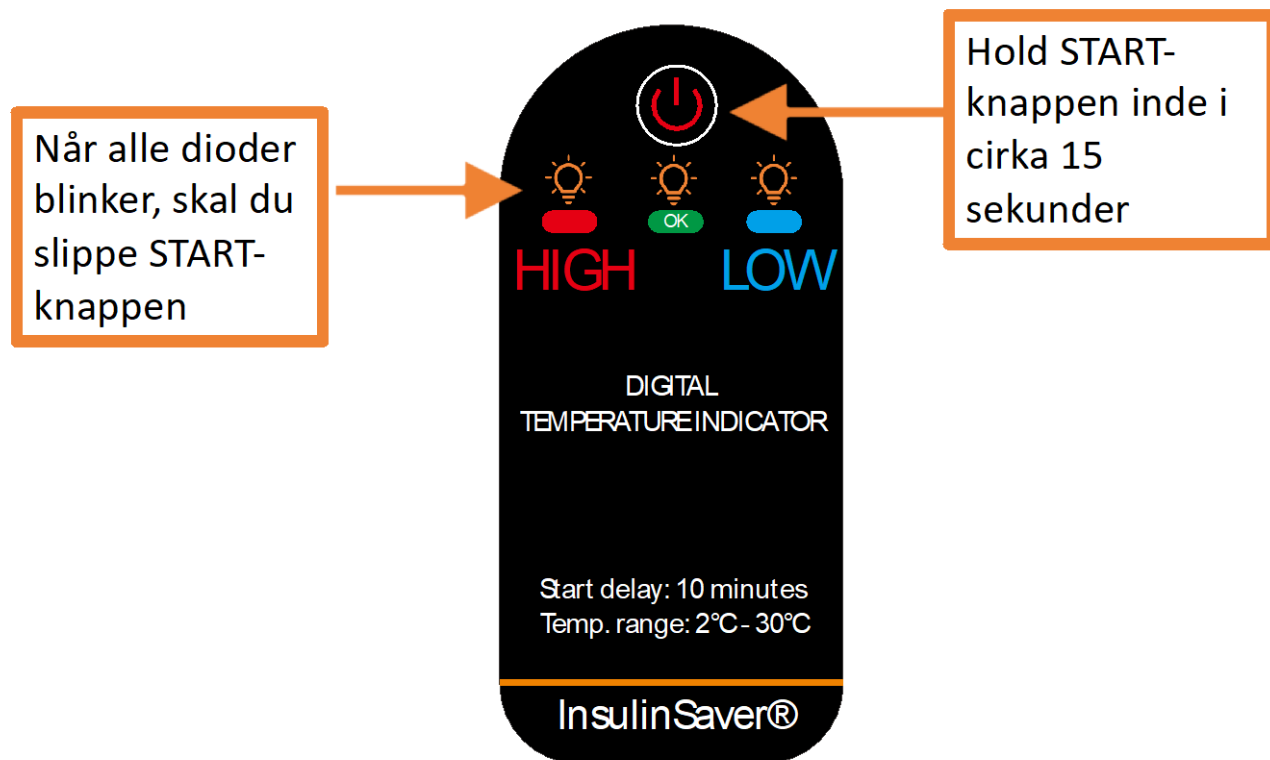

For at slukke din InsulinSaver, hold START-knappen nede i ca. 15 sekunder. Når alle dioderne blinker, slipper du START-knappen. Eventuelle alarmer nulstilles ved slukning

Hvis hensigten var at nulstille alarmer, kan du nu genstarte din InsulinSaver, se punkt 2.

6. Kontroller, at din InsulinSaver er slukket:

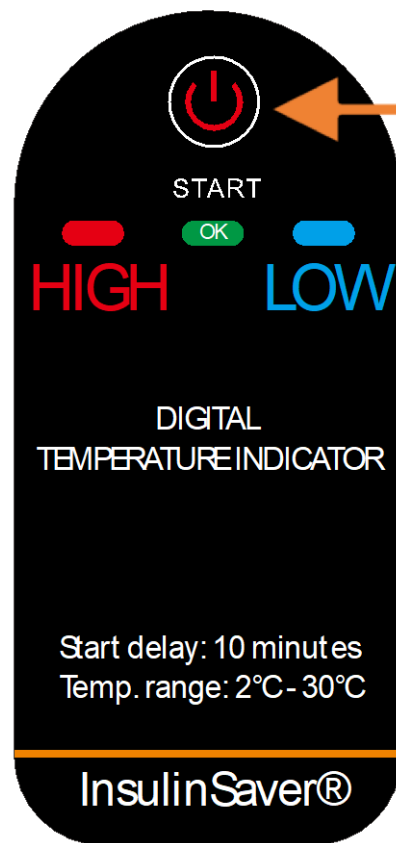

Tryk på START-knappen

Tryk én gang på START-knappen. Hvis din InsulinSaver er slukket, blinker ingen af dioderne.

Vær opmærksom på!

- **InsulinSaver er ingen garanti for at dit insulin er brugbart under alle omstændigheder, men derimod et hjælpemiddel til at øge din tryghed.**
- **InsulinSaver tåler ikke kraftige stød eller kraftigt tryk.**

Affaldshåndtering

- **Smid ikke din InsulinSaver i husholdningsaffaldet.**
- **InsulinSaver skal sorteres som elektronikaffald.**

Du kan ikke skifte batteriet selv. Når batteriet i InsulinSaver ikke virker mere, så skal den smides ud som elektronikaffald.